



MANUEL 2024

Produits & Procédures

Dr Dan Fischer
Fondateur, Ultradent Products, Inc.



À PROPOS D'ULTRADENT PRODUCTS



En 1976, après avoir obtenu son diplôme à l'université de Loma Linda et ouvert son propre cabinet, le Dr Dan Fischer a inventé sa solution hémostatique révolutionnaire, Astringedent™. Il répondait ainsi au besoin de produit pour la gestion des tissus permettant d'obtenir une hémostase plus rapide et profonde. La solution hémostatique Astringedent, avec l'embout Metal Dento-Infusor™ et le fil de rétraction Ultrapak™, sont devenus les produits phares d'Ultradent. Pour la première fois, les praticiens pouvaient obtenir rapidement et de manière prédictible une hémostase profonde. Le succès de la solution hémostatique Astringedent a alimenté le désir du Dr Fischer de poursuivre le développement de solutions innovantes – aboutissant ainsi à la fondation d'Ultradent Products, Inc. Fondée il y a maintenant 45 ans, Ultradent – société familiale d'envergure internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits bucco-dentaires – garde pour objectif l'amélioration de la santé bucco-dentaire à travers le monde en créant de meilleurs produits dentaires qui continuent à définir de nouvelles références dans cette industrie. Le Dr Fischer est titulaire de nombreux brevets.

À l'heure actuelle, Ultradent étudie, conçoit, fabrique et distribue plus de 500 matériaux, dispositifs et instruments utilisés par les dentistes à travers le monde. Parmi eux figurent le système d'éclaircissement Opalescence™ et le système révolutionnaire d'éclaircissement professionnel à domicile, Opalescence Go™. La famille de produits Ultradent comprend également la lampe à photopolymériser à LED aux multiples récompenses VALO™, le sealant pour puits et sillons UltraSeal XT™ hydro et le gel de mordantage Ultra-Etch™.

Ultradent a reçu les distinctions Exportateur de l'année et Distributeur de l'année du Secrétariat d'État aux petites entreprises (Small Business Administration aux États-Unis). Plus récemment, Ultradent s'est vu décerner le prix Héros des soins de santé dans la catégorie Performances d'entreprise. Ultradent et le Dr Fischer sont reconnus pour leur leadership industriel et leurs contributions déterminantes à la communauté dentaire. En 2013, le bureau du développement économique et rural du gouverneur de l'Utah a qualifié le Dr Fischer d'« homme international de l'année » pour ses contributions au maintien des relations économiques et culturelles entre l'état de l'Utah et l'Union européenne.

Le Dr Fischer œuvre sans relâche pour « améliorer la santé bucco-dentaire à travers le monde ». Au-delà de la communauté dentaire, Ultradent fait don de produits à des acteurs humanitaires aux niveaux régional, national et international. L'entreprise parraine en outre une association à but non lucratif – la Diversity Foundation – qui a mis sur pied un programme de sensibilisation ayant pour objectif de lutter contre les crimes haineux et l'intolérance. Ce programme fait la promotion de la diversité et encourage une prise de conscience multiculturelle parmi des individus venant de tous horizons.

Le Dr Fischer mène sa vie selon les mêmes valeurs que celles qui guident Ultradent : intégrité, qualité, travail, innovation et attention. Lorsqu'il ne travaille pas, il aime s'occuper de son jardin et passer du temps avec sa femme, ses enfants et ses nombreux petits-enfants.

Suivez-nous sur nos pages des médias sociaux.

Scannez un code QR pour suivre les activités d'Ultradent sur Facebook, Instagram et LinkedIn et être au fait des meilleures offres et des actualités.

Facebook



Instagram



LinkedIn





ÉCLAIRCISSEMENT • 3-26

Éclaircissement « sur mesure » à domicile
Gouttières d'éclaircissement préchargées
Résine pour réservoir Block-Out
Plaques pour le thermoformage de gouttières
Accessoires

Éclaircissement en cabinet
Technique Walking Bleach
Pâte de micro-abrasion amélaire
Accessoires



SCELLEMENT • 77-86

Ciments provisoires à base de polycarboxylate et de résine, sans eugénol
Scellement provisoire des facettes
Résine de scellement photopolymérisable pour facettes
Composite auto-photo de scellement et de reconstitution
Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine



PROPHYLAXIE • 27-34

Sealant pour puits et sillons
Agent siccatif
Vernis au fluorure de sodium
Vernis de désensibilisation dentinaire
Dentifrices d'éclaircissement



FINITION • 87-98

Polissoirs à usage unique
Disques de mise en forme et de finition
Système de polissage pour composites Original
Système de polissage pour composites Natural
Système de polissage pour céramiques Universal Natural
Système de polissage pour céramiques Universal
Brossettes de polissage
Pâte de polissage diamantée
Agent siccatif
Bandes de finition
Composite de réétanchéification



PRÉPARATION • 35-44

Révéléateur de caries
Écarte-langue, -lèvres et -joues
Dignes en caoutchouc
Protège-dent interproximal

Comblement des contre-dépouilles
Système de matrices sectionnelles
Matrice et porte-matrice à usage unique



MATÉRIEL • 99-116

Accessoires pour lampe à polymériser
Lampes à polymériser LED à large spectre
Lasers à diode

Lunettes de protection
Ciseaux



TISSUE MANAGEMENT • 45-56

Sulfate de fer
Chlorure d'alumine
Solution à base de sulfate de fer et de subsulfate de fer

Solution détachante
Fil de rétraction tricoté
Instruments d'insertion



MORDANÇAGE & ADHÉSIFS • 57-66

Système automordançant (« sans rinçage »)
Système de mordançage total (« mordançage et rinçage »)
Gel d'acide phosphorique
Primer automordançant
Adhésifs
Adhésif photopolymérisable

Primer pour zircone/métal
Mordançage de la porcelaine
Gel d'acide fluorhydrique
Solution de silane
Fond de cavité à base d'hydroxyde de calcium



ENDODONTIE • 117-132

Ciment pour réparation à base d'agrégat de trioxyde minéral
Ciment endocanalaire
Gutta-percha enrobée de résine
Lubrifiants pour limes
Pâte d'hydroxyde de calcium
Citric Acid
Embouts endodontiques
Forets et tenons
Résine provisoire photopolymérisable



RESTAURATION • 67-76

Universal Composite
Composite fluide
Composite Wetting Resin
Système de gabarits pour composites directs



EMBOUTS & SERINGUES • 133-141

Embouts pour restauration
Embouts endodontiques
Seringues et couvre-seringues
Accessoires

J-Temp™

TEMPORARY RESIN

4 Indications en 1



Bite ramps & surélévations occlusales temporaires



Reconstitution pour la fixation des crampons pour digue dentaire




Restaurations provisoires



Solidarisation des transferts d'implant



Voir page 132.

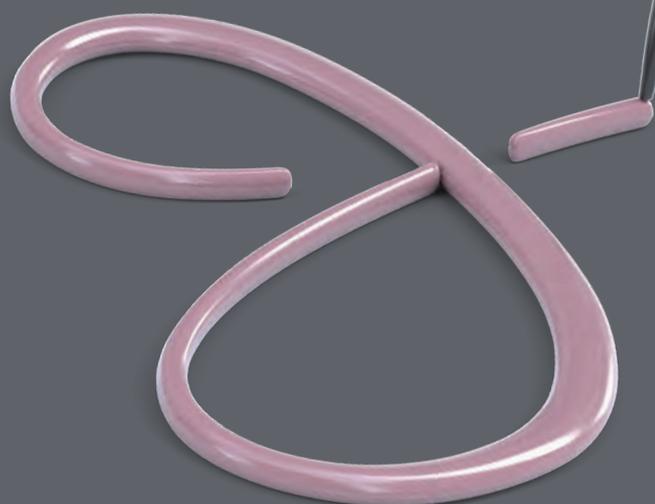

La résine provisoire J-Temp™ est une résine polyvalente à utiliser dans le cadre de différentes procédures. Elle peut être utilisée pour les restaurations provisoires, la solidarisation des piliers d'implants pour les empreintes, la reconstitution de structure pour la fixation des crampons pour digue dentaire ainsi que les Bite ramps et les surélévations occlusales provisoires. Disposer d'une résine provisoire pouvant être utilisée dans différentes procédures permet de gagner du temps, de l'argent et de l'espace de stockage.



PLUS D'INFOS SUR
ULTRADENT.EU/J-TEMP

ÉCLAIRCISSEMENT



45 ANS
1978-2023

THAO NGUYEN – Little Cottonwood Canyon

Questions sur l'éclaircissement dentaire
Protocole d'un traitement d'éclaircissement
Guide de référence pour l'éclaircissement dentaire avec Opalescence
ÉCLAIRCISSEMENT COSMÉTIQUE
Éclaircissement « sur mesure » à domicile
Gouttières d'éclaircissement préchargées
Résine pour réservoir Block-Out
Plaques pour le thermoformage de gouttières
Accessoires
ÉCLAIRCISSEMENT MÉDICAL
Éclaircissement en cabinet
Technique Walking Bleach
Pâte de micro-abrasion
amélaire
Accessoires



ÉCLAIRCISSEZ VOTRE SOURIRE – Questions sur l'éclaircissement dentaire

La dyschromie des dents peut avoir de nombreuses causes. Certains médicaments, traumatismes dentaires, obturations radiculaires, aliments et boissons peuvent, avec le temps, entraîner des dyschromies dentaires. Certaines dyschromies sont superficielles, tandis que d'autres sont internes. Dans les deux cas, le dentiste peut les traiter efficacement. L'éclaircissement professionnel est la meilleure solution pour éclaircir les dents en toute sécurité.

Dans ces cas, l'éclaircissement est cosmétique et peut être obtenu avec des produits adaptés conçus pour obtenir des résultats, comme c'est le cas avec nos gels d'éclaircissement Opalescence™ PF utilisés avec des gouttières sur mesure ou avec nos gouttières prêtes à porter à usage unique proposées dans Opalescence Go™ avec la gouttière UltraFit. Ces produits permettent d'obtenir un sourire plus blanc. En cas de réapparition de la dyschromie, il suffit d'une retouche rapide pour retrouver un sourire parfait.

D'autres types de taches peuvent pénétrer l'émail et la dentine par l'intérieur, suite à des maladies, des traumatismes ou des traitements médicaux. Les facteurs à l'origine de ces dyschromies peuvent être congénitaux, systémiques, métaboliques, pharmacologiques, traumatiques ou iatrogènes (fluorose dentaire, jaunisse, prise de tétracycline ou minocycline pour adulte, porphyrie, blessure et érythroblastose du nouveau-né en sont des exemples). Un éclaircissement médical en cabinet est nécessaire pour traiter ces types de dyschromie. Dans de nombreux cas, cet éclaircissement ciblé peut rendre les restaurations, facettes ou couronnes inutiles ou repousser considérablement leur réalisation.


L'éclaircissement professionnel est la meilleure solution et le moyen le moins invasif pour éclaircir les dents en toute sécurité.

COMMENT FONCTIONNE L'ÉCLAIRCISSEMENT ?

Les gels d'éclaircissement Opalescence contiennent un ingrédient éclaircissant actif – du peroxyde de carbamide ou du peroxyde d'hydrogène. Les gels à base de peroxyde se dégradent en molécules d'eau, d'oxygène et d'oxygène réactif. Ces molécules d'oxygène réactif traitent à la fois l'émail et la dentine, agissant par oxydation des liaisons des molécules à l'origine des dyschromies. La modification des molécules à l'origine des taches entraîne l'éclaircissement de la dent¹.

Les molécules d'oxygène réactif se répandant dans toute la dent, toute la surface de la dent ne doit pas nécessairement être en contact avec l'agent d'éclaircissement pour être entièrement éclaircie.

Les molécules d'oxygène réactif devant se dissiper avant le collage, il est nécessaire d'attendre 7 à 10 jours avant toute procédure de collage²⁻⁴.

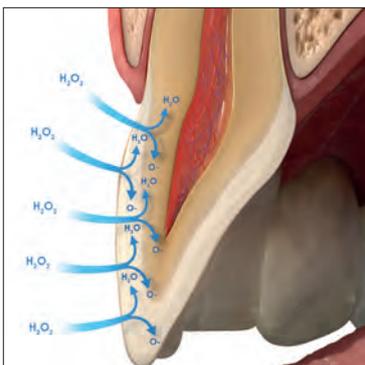

L'ÉCLAIRCISSEMENT AFFECTE-T-IL LA FORCE D'ADHÉSION ?

Bien que les agents éclaircissants libèrent de l'oxygène dans la dent, les restaurations collées déjà en place ne s'en trouvent pas affaiblies.

Remarque : il convient d'attendre 7 à 10 jours après le traitement d'éclaircissement avant l'application de toute résine. La forte concentration d'oxygène dans la dent pourrait avoir un effet négatif considérable sur la polymérisation des résines.

COMBIEN DE TEMPS LES DENTS RESTENT-T-ELLES CLAIRES ?

Les résultats de l'éclaircissement sont stables. En fonction de l'alimentation et du style de vie du patient, il doit toutefois être renouvelé périodiquement.

Cela ne devrait pas occasionner de problème, les agents éclaircissants étant inoffensifs.

L'ÉCLAIRCISSEMENT PROVOQUERA-T-IL DES SENSIBILITÉS DENTAIRES ?

L'éclaircissement peut entraîner l'apparition de sensibilités dentaires. Celles-ci sont toutefois passagères et disparaissent à la fin des traitements d'éclaircissement. Si des traitements de désensibilisation sont souhaités, il est recommandé d'utiliser le gel de désensibilisation UltraEZ™ ou le vernis fluoré Enamelast™. Il est également possible d'utiliser le dentifrice éclaircissant Opalescence™ spécial dents sensibles pour aider à prévenir ou atténuer les éventuelles sensibilités.

L'ÉCLAIRCISSEMENT AVEC LES PRODUITS OPALESCENCE AFFAIBLIRA-T-IL L'ÉMAIL DES DENTS ?

Non. Il n'a pas été démontré que l'éclaircissement avec Opalescence affaiblit l'émail dentaire^{5,6,7}.

IMPORTANT : LE MEILLEUR ÉCLAIRCISSEMENT SE FAIT SOUS SUPERVISION D'UN DENTISTE.

Les traitements d'éclaircissement dentaire avec Opalescence sont efficaces et sans danger lorsqu'ils sont utilisés comme il convient et avec les matériaux adaptés. Cela inclut un examen complet, des instructions relatives au procédé d'éclaircissement choisi et la surveillance du patient pendant la phase de traitement. Il est fréquent que l'autotraitement avec des produits achetés en magasin ne donne pas les résultats escomptés et laisse le patient sans solution pour traiter, notamment, les éventuels problèmes de sensibilité.

1. Kwon SR, Wertz PM. Review of the Mechanism of Tooth Whitening. *J Esthet Restor Dent.* 2015 Sep-Oct;240-57. 2. Da Silva Machado J, et al. The influence of time interval between bleaching and enamel bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2007;19(2):111-8; discussion 19. 3. Spyrides GM, et al. Effect of whitening agents on dentin bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2000;12(5):264-70. 4. Unlu N, Cobankara FK, Ozer F. Effect of elapsed time following bleaching on the shear bond strength of composite resin to enamel. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater.* 2008 Feb;84(2):363-8. 5. Metz MJ, Cochran MA, Matis BA, Gonzalez C, Platt JA, Pund MR. Clinical evaluation of 15% carbamide peroxide on the surface microhardness and shear bond strength of human enamel. *Oper Dent.* 2007;32(5):427-436. doi:10.2341/06-142 6. Cadenaro M, Navarra CO, Mazzoni A, et al. An in vivo study of the effect of a 38 percent hydrogen peroxide in-office whitening agent on enamel. *J Am Dent Assoc.* 2010;141(4):449-454. doi:10.14219/jada.archive.2010.0198 7. Cadenaro M, Breschi L, Nucci C, et al. Effect of two in-office whitening agents on the enamel surface in vivo: a morphological and non-contact profilometric study. *Oper Dent.* 2008;33(2):127-134. doi:10.2341/07-89



Protocole d'un traitement d'éclaircissement

Nous recommandons les étapes suivantes pour l'évaluation et le traitement d'éclaircissement professionnel.

1. RÉALISER L'ANAMNÈSE DU PATIENT

Déceler l'origine de la coloration des dents et rechercher les restaurations susceptibles d'affecter le résultat final (avec radiographie si nécessaire).

Identifier le système d'éclaircissement souhaité (cosmétique pour les dyschromies courantes / médical pour les dyschromies dues à une maladie, un trauma ou un traitement médical). Reconsidérer l'anamnèse régulièrement en ajoutant une question concernant la satisfaction du patient en matière d'esthétique dentaire. Expliquer au patient que les restaurations n'éclairciront pas et l'avertir du besoin éventuel de nouvelles restaurations après l'éclaircissement. Vérifier s'il y a des sensibilités existantes et administrer un traitement adapté pour les éliminer avant de commencer l'éclaircissement. L'éclaircissement est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent.

Les patients ayant des problèmes de santé graves doivent consulter leur médecin traitant avant le traitement. L'éclaircissement cosmétique des dents n'est pas autorisé avant l'âge de 18 ans.

2. EFFECTUER UN EXAMEN DENTAIRE

Identifier l'origine des dyschromies, évaluer la santé gingivale et dentaire. Rechercher les restaurations dans la région esthétique qui pourraient ne pas être en harmonie après l'éclaircissement. Proposer leur remplacement ou leur resurfaçage après l'éclaircissement.

3. GÉRER LES ATTENTES DU PATIENT

Lui parler des possibilités et des limites de l'éclaircissement dans son cas précis et l'aider à définir ses attentes de façon réaliste.

4. RÉALISER UN TRAITEMENT D'HYGIÈNE DENTAIRE

Procéder au traitement d'hygiène dentaire. Utiliser une pâte de polissage pour éliminer toute la plaque. Pour les patients ayant une hypersensibilité connue, appliquer le vernis fluoré Enamelast™ après le polissage.

5. DÉTERMINER LA TEINTE INITIALE DE LA DENT

Identifier la teinte initiale de la dent à l'aide d'un teintier. Prendre une photo avec la barrette de la teinte après le traitement d'hygiène dentaire.

6. INFORMER LE PATIENT

Les dents peuvent rester blanches au moins un an^{1,2}. En fonction de l'alimentation et du style de vie du patient, l'éclaircissement doit être renouvelé périodiquement pour conserver l'aspect souhaité. Donner au patient les instructions nécessaires pour l'utilisation des produits d'éclaircissement choisis et répondre à ses éventuelles questions ou inquiétudes.

7. ÉLABORER UN PLAN DE TRAITEMENT POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT

Plusieurs produits d'éclaircissement Opalescence™ peuvent être utilisés dans le cadre du plan de traitement pour l'éclaircissement de manière à aider le patient à obtenir les résultats recherchés. Si le patient a des antécédents de sensibilité dentaire, il convient d'ajouter un protocole de désensibilisation préalable au traitement d'éclaircissement ainsi que d'envisager l'emploi d'un gel moins concentré et/ou une durée de port plus courte. Les patients peuvent également utiliser le dentifrice éclaircissant Opalescence™ Spécial dents sensibles avant et tout au long de leur traitement d'éclaircissement. Envisager en outre, si le patient tolère les traitements d'éclaircissement sans présenter de sensibilité, d'utiliser un gel plus concentré pour obtenir des résultats plus rapidement.

8. OBTENIR LE CONSENTEMENT DU PATIENT

Faire signer au patient un formulaire de consentement pour l'éclaircissement décrivant le traitement d'éclaircissement et son coût.

9. DÉTERMINER LA TEINTE FINALE DE LA DENT

Identifier la teinte finale à l'aide du teintier. Prendre une photo avec la barrette de la teinte initiale et finale. On ne peut constater la teinte définitive des dents que quelques jours après la fin du traitement car les dents peuvent continuer à éclaircir après le dernier traitement d'éclaircissement.

10. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES SENSIBILITÉS LE CAS ÉCHÉANT

Certains patients peuvent présenter une sensibilité persistante. Il est recommandé d'utiliser le gel de désensibilisation UltraEZ™ ou le vernis fluoré Enamelast™. Il est également possible d'utiliser le dentifrice éclaircissant Opalescence™ formulé pour dents sensibles pour aider à minimiser les sensibilités.

Remarque : il convient d'attendre 7 à 10 jours après le traitement d'éclaircissement avant l'application de toute résine. La forte concentration d'oxygène dans la dent pourrait avoir un effet négatif considérable sur la polymérisation des résines.

1. de Geus JL, de Lara MB, Hanzen TA, et al. One-year follow-up of at-home bleaching in smokers before and after dental prophylaxis. *J Dent.* 2015;43(11):1346-1351. 2. Wiegand A, Drebenstedt S, Roos M, Magalhães AC, Attin T. 12-month color stability of enamel, dentine, and enamel-dentine samples after bleaching. *Clin Oral Investig.* 2008;12(4):303-310.



Guide de référence pour l'éclaircissement dentaire avec Opalescence™

*Les dispositifs médicaux pour l'éclaircissement des dents ne sont pas disponibles dans certains pays de l'Union européenne. Veuillez demander conseil à votre fournisseur dentaire.

NOM DU PRODUIT	INGRÉDIENTS	INDICATIONS
----------------	-------------	-------------

Éclaircissement dentaire cosmétique



Opalescence™ PF 10 %

Nitrate de potassium, fluorure et xylitol

COSMÉTIQUE, À DOMICILE
Patients ayant des problèmes de sensibilité ; peut être porté en journée ou la nuit



Opalescence™ PF 16 %

Nitrate de potassium, fluorure et xylitol

COSMÉTIQUE, À DOMICILE
Éclaircissement plus rapide, port recommandé en journée



Opalescence Go™ 6 %

Nitrate de potassium, fluorure et xylitol

COSMÉTIQUE À DOMICILE
Prêt à l'emploi, alternative aux produits achetés en magasin



Opalescence™ Office 6 %

Nitrate de potassium et fluorure

COSMÉTIQUE, TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE
Traitement rapide au fauteuil

Éclaircissement dentaire médical*



Opalescence™ Endo

—

MÉDICAL, TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE
Éclaircissement interne des dents dépulpées ayant reçu un traitement endodontique



Opalescence™ Boost™ 40 %

Nitrate de potassium et fluorure

MÉDICAL, en cabinet au fauteuil, application directe par voie interne.

Autres traitements



Pâte de micro-abrasion Opalustre™

—

TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE
Traitement au fauteuil pour éliminer définitivement les imperfections amélaire superficielles



Gel de désensibilisation UltraEZ™

Nitrate de potassium et fluorure

À DOMICILE
Traitement des hypersensibilités



Remarque : pour déterminer l'équivalence de PH à partir d'une concentration de PC, diviser par trois.
Par exemple, du PC à 45 % équivaut à du PH à ~15 %. Cela est important à savoir afin d'évaluer correctement l'intensité des produits d'éclaircissement.

PARFUMS	DURÉE DE PORT	SUBSTANCE ACTIVE	Concentrations de peroxyde d'hydrogène par rapport au peroxyde de carbamide
10 % Menthe 10 % Pastèque 10 % Nature	8–10 heures par jour	Peroxyde de carbamide à 10 %	<p>~3 % PH 10 % PC</p>
16 % Menthe 16 % Pastèque 16 % Nature	4–6 heures par jour	Peroxyde de carbamide à 16 %	<p>~5,8 % PH 16 % PC</p>
6 % Menthe 6 % Pastèque	60–90 minutes par jour	Peroxyde d'hydrogène à 6 %	<p>6 % PH</p>
—	5 applications de 20 minutes NE dépassez PAS 6 applications par consultation	Peroxyde d'hydrogène à 6 %	<p>6% PH</p>
—	1 à 5 jour(s) par traitement	Peroxyde d'hydrogène à 35 %	<p>35 % PH</p>
—	2–3 applications de 20 minutes NE dépassez PAS 3 applications par consultation	Peroxyde d'hydrogène à 40 %	<p>40 % PH</p>
—	Au cabinet	Acide chlorhydrique à 6,6 % Carbure de silice	
—	15–60 minutes par jour	Nitrate de potassium à 3 % et NaF neutre à 0,25 %	

N°1 EN ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE PROFESSIONNEL DANS LE MONDE*

Opalescence



Tooth Whitening

+30 ans d'expérience
en éclaircissement

100 millions de
sourires éclatants

+50 récompenses par des organismes
professionnels dentaires



*Etudes keystone sur les marchés Américains, Europe, Amérique Latine et Asie Pacifique.



Éclaircissement – COSMÉTIQUE






Dr Dan Fischer
Fondateur, Ultradent Products, Inc.

Pour un sourire plus blanc et plus lumineux

Avoir des dents plus blanches, l'un des plus vieux rêves de l'être humain. Dans des temps reculés, les gens ont essayé de nombreux ingrédients et de nombreuses techniques, la plupart du temps en vain ou avec des effets indésirables graves sur leurs dents. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'éclaircir les dents efficacement et sans effets indésirables. Mais les conditions préalables sont doubles : il faut avoir les produits adéquats – tels que nos gels Opalescence à base de PF (nitrate de potassium et fluorure) qui aident à préserver l'émail pendant l'éclaircissement. D'autre part, il faut les utiliser convenablement.

La révision de la directive Cosmétiques de l'UE édicte une procédure que nous avons toujours suivie : l'intervention d'un chirurgien-dentiste dans les procédures d'éclaircissement cosmétique. Ainsi, l'ensemble du traitement est réalisé sous la supervision d'un professionnel et les dents du patient sont entre de bonnes mains.

« Pour chaque traitement, la prescription devra être faite par un chirurgien-dentiste [...] ou être effectuée sous sa supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Les praticiens de l'art dentaire pourront remettre ces produits au patient pour le reste du traitement. »*

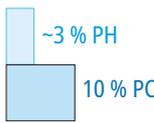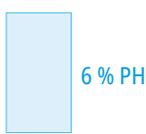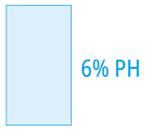NOM DU PRODUIT	INDICATIONS	SUBSTANCE ACTIVE	
 Opalescence™ PF 10 %	COSMÉTIQUE, À DOMICILE Patients ayant des problèmes de sensibilité ; peut être porté en journée ou la nuit	Peroxyde de carbamide à 10 %	
 Opalescence™ PF 16 %	COSMÉTIQUE, À DOMICILE Éclaircissement plus rapide, port recommandé en journée	Peroxyde de carbamide à 16 %	
 Opalescence Go™ 6 %	COSMÉTIQUE À DOMICILE Prêt à l'emploi, alternative aux produits achetés sans ordonnance	Peroxyde d'hydrogène à 6 %	
 Opalescence™ Office 6 %	COSMÉTIQUE, TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE Traitement rapide au fauteuil	Peroxyde d'hydrogène à 6 %	

* Directive du Conseil 2011/84/UE



Meilleur système d'éclaircissement cosmétique à domicile


Opalescence™ PF 10 % et 16 %

PEROXYDE DE CARBAMIDE
AVEC NITRATE DE POTASSIUM ET FLUORURE

- Éclaircissement dentaire cosmétique avec gouttières sur mesure
- Les gels d'éclaircissement dentaire Opalescence PF contiennent du PF (nitrate de potassium et fluorure)
- Le gel d'éclaircissement Opalescence PF a été formulé pour maximiser le confort du patient
- Le gel visqueux et épais ne coule pas sur les tissus mous et garantit le maintien bien en place de la gouttière
- Formulé pour prévenir la déshydratation et l'effet ressort
- Deux concentrations pour la flexibilité du traitement
- Disponible dans les parfums **Menthe**, **Pastèque** et **Nature**
- Port de jour ou de nuit

La consistance visqueuse et épaisse du gel d'éclaircissement Opalescence l'empêche de s'échapper de la gouttière, comme c'est le cas d'autres gels d'éclaircissement² ; grâce à cette viscosité, la gouttière confortable reste bien en place. Le gel Opalescence PF contient du nitrate de potassium et du fluorure. Opalescence est efficace pour réduire l'effet ressort comparé aux produits d'éclaircissement dentaire concurrents³. Le gel d'éclaircissement Opalescence contient au moins 20 % d'eau, ce qui aide à prévenir la déshydratation. Une étude universitaire a montré que le gel reste actif 8 à 10 heures pour un éclaircissement pendant la nuit⁵, ce qui signifie que les patients obtiennent des résultats rapidement, augmentant ainsi l'observance. Le gel Opalescence est proposé en plusieurs concentrations, formulations, parfums et kits pour satisfaire les besoins de vos patients en matière d'éclaircissement.

Le gel Opalescence est à utiliser pour l'éclaircissement des dents tachées avant la mise en place de composites, facettes et/ou couronnes. Il est efficace pour faire disparaître certaines voire toutes les dyschromies dentaires internes dues à des facteurs congénitaux, systémiques, pharmacologiques, traumatiques, etc., ainsi qu'au vieillissement. Il est efficace contre les dyschromies dues à la fluorose et à la tétracycline^{3,6}.

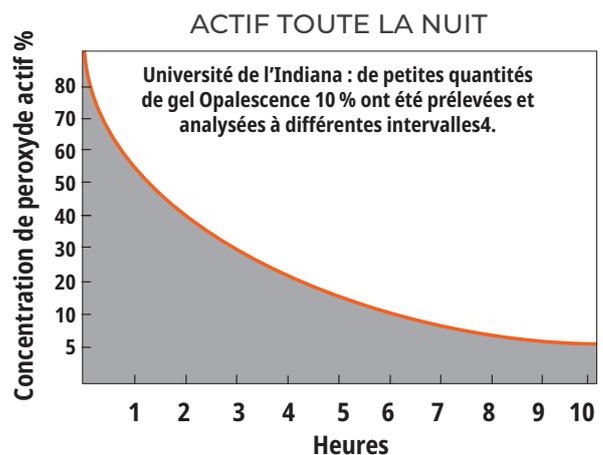

1. realitysmetics.com. 2. Cordeiro D, Toda C, Hanan S, et al. Clinical evaluation of different delivery methods of at-home bleaching gels composed of 10% hydrogen peroxide. *Oper Dent.* 2019;44(1):13–23. doi:10.2341/17-174-C
3. Caughman WF, DMD, Frazier KB, Haywood, VB. Carbamide peroxide whitening of non-vital single discolored teeth: Case reports. *Quintessence Int.* 1999;30(3):155-61. 4. Grobler, S.R., et al. A Clinical Study of the Effectiveness of Two Different 10% Carbamide Peroxide Bleaching Products: A 6-Month Follow-up; *Int J Dent.* May 5, 2011: 167525; doi: 10.1155/2011/167525. 5. Matis BA, Gaiao U, Blackman D, Schultz FA, Eckert G. In vivo degradation of bleaching gel used in whitening teeth. *J Am Dent Assoc.* 1999;130(2):227-35. 6. Morgan J, Presley S. In-office "power" bleaching of vital teeth as an adjunct to at-home bleaching. *Pract Perio Aesthet Dent.* 2002;14(2):16–23.



AVANT ET APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Robert Nixon



Avant éclaircissement.



Dents de l'arcade supérieure après 5 nuits de traitement avec le gel d'éclaircissement Opalescence PF à 10 %, soit environ 40 heures.

Avec l'aimable autorisation du Dr Stephan Hoefler



Avant éclaircissement.



Résultat après 8 jours de traitement avec le gel d'éclaircissement Opalescence PF 16 % – 3 heures par jour.

Avec l'aimable autorisation du Dr Stephan Hoefler



De nouvelles restaurations sont programmées avant de procéder à l'éclaircissement.



Résultat après 6 nuits de traitement avec le gel d'éclaircissement Opalescence PF 10 % – 8 heures par nuit. Nouvelles restaurations composites en place.

Avec l'aimable autorisation de Carol Jent, RRDH.



Avant éclaircissement.



Après un mois d'éclaircissement.

Avec l'aimable autorisation d'Ultradent Products Inc.



Dyschromies modérées à importantes dues à la tétracycline.



Amélioration en 2 semaines. Les dyschromies dues à la tétracycline peuvent nécessiter un traitement de 2 à 6 mois¹.

INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT



1. Recommander au patient de se brosser les dents avant de charger la gouttière et de la mettre en place. Passer en revue avec le patient les instructions fournies avec le kit d'éclaircissement. Lui expliquer ensuite comment charger la gouttière en exprimant un cordon de gel ininterrompu, à mi-distance environ du bord incisif du côté facial de la gouttière, de molaire à molaire. Lui expliquer également qu'il convient d'utiliser 1/3 à 1/2 d'une seringue.



2. Placer la gouttière sur les dents. Appuyer délicatement sur la gouttière pour mettre le gel en place. Une pression trop ferme entraînera le débordement du gel de la gouttière.



3. En cas d'application de gel en excès ou si du gel s'est écoulé de la gouttière, essayer délicatement avec une brosse à dents.



4. Nettoyer la gouttière avec une brosse à dents et de l'eau. Ranger la gouttière dans son étui lorsqu'elle n'est pas utilisée. Rappeler au patient de suivre le protocole d'éclaircissement prédéfini.

¹ Haywood VB, Leonard RH, Dickinson GL. Efficacy of six months of nightguard vital bleaching tetracycline-stained teeth. *J Esthet Dent.* 1997;9(1):13-19



FABRICATION D'UNE GOUTTIÈRE



1. Couler l’empreinte avec du plâtre à prise rapide ou du plâtre dur. Couler l’empreinte peu après pour garantir la précision. Plus la quantité de plâtre dur utilisé est faible, plus il est facile de le tailler. Les zones du palais et de la langue ne sont pas coulées ou doivent être éliminées après la prise du plâtre. Laisser le modèle sécher pendant deux heures.



2. Appliquer une couche d’environ 0,5 mm d’épaisseur d’Ultradent™ LC Block-Out Resin sur les surfaces labiales et à une distance d’environ 1,5 mm du bord gingival pour ménager des réservoirs d’éclaircissement. **NE PAS** appliquer sur les bords incisifs ni sur les surfaces occlusales. Polymériser chaque dent pendant 5 secondes avec la lampe à polymériser VALO™. Enlever la couche inhibée par l’oxygène.



3. Utiliser le thermoformeur pour chauffer la plaque pour gouttière Sof-Tray™ standard jusqu’à ce qu’elle s’affaisse de 5 à 15 mm pour la version 0,9 mm, et de 25 mm pour les plaques de 1,5 mm et 2,0 mm. Abaisser le plastique sur le modèle. Laisser refroidir puis retirer le modèle du thermoformeur.



4. Avec des ciseaux tactiles (ciseaux crantés Ultra-Trim), couper soigneusement et précisément la gouttière le long de la ligne nette qui se situe à hauteur de la gencive. Festonner les bords pour éviter le contact avec le tissu gingival.



5. Repositionner la gouttière sur le modèle en plâtre et en vérifier les bords. Chauffer les bords avec une flamme douce, un quadrant après l’autre, si nécessaire avec une torche au butane. Pendant qu’ils sont encore chauds, maintenir immédiatement et fermement la périphérie de chaque segment contre le modèle pendant trois secondes avec un doigt ganté mouillé avec de l’eau. Si cela amincit trop la gouttière, en fabriquer une nouvelle.

Opalescence PF Kits Patient



Parfum	10%	16%
Menthe	5364	4480
Pastèque	5365	4481
Standard	5366	4482

8 seringues de 1,2 ml (1,50 g) d’Opalescence PF
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)
1 étui à gouttière
1 teintier

Opalescence PF Kits Dentiste



Parfum	10%	16%
Menthe	5379	4483
Pastèque	5380	4484
Nature	5381	4485

8 seringues de 1,2 ml (1,50 g) d’Opalescence PF
1 seringue de 1,2 ml (1,38 g) d’Ultradent LC Block-Out Resin
2 plaques Sof-Tray de 0,9 mm
1 embout Black Mini Tip
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)
1 étui à gouttière
1 teintier

Opalescence PF en seringue Recharge



Parfum	10%	16%
Menthe	5394	4486
Pastèque	5395	4487
Nature	5396	4488

40 seringues de 1,2 ml (1,50 g) d’Opalescence PF



Opalescence™ Office

ÉCLAIRCISSEMENT AU CABINET
- PEROXYDE D'HYDROGÈNE à 6 %




Embout Black Mini™ Tip

- Éclaircissement dentaire cosmétique avec du peroxyde d'hydrogène à 6 %
- SANS LAMPE !
- Jusqu'à cinq applications de 20 minutes, sans dépasser 6 applications par consultation
- Le gel d'éclaircissement Opalescence Office a été développé pour un confort maximal du patient
- Application précise ; bien visible pour une élimination totale
- Contient du PF (nitrate de potassium et fluorure)


Le produit d'éclaircissement au cabinet Opalescence Office est un système d'éclaircissement dentaire cosmétique développé pour un premier traitement d'éclaircissement au fauteuil. Le début du traitement d'éclaircissement est sous le contrôle total ou la supervision du dentiste, conformément à la directive européenne Cosmétiques. Il est possible d'utiliser Opalescence Office comme traitement d'éclaircissement exclusif, du début à la fin. Définissez des objectifs réalistes avec vos patients, car plusieurs rendez-vous au cabinet peuvent être nécessaires. Le gel Opalescence Office est activé chimiquement et ne nécessite pas de lampe pour éclaircir les dents. Le mélange de seringue à seringue active le produit juste avant l'application. Le peroxyde d'hydrogène à 6 % est appliqué de manière pratique avec la seringue sur les dents pour l'éclaircissement.

INSTRUCTIONS

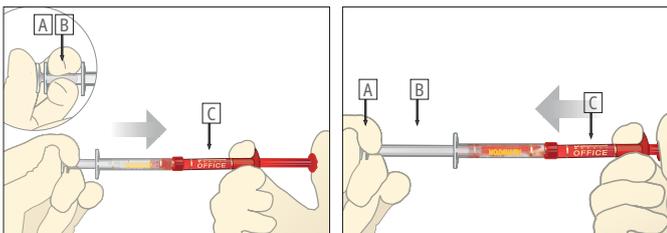

1. S'assurer que les seringues sont bien fixées. Appuyer sur le petit piston transparent (A) pour l'enfoncer dans la petite seringue transparente intermédiaire (B) de manière à percer la membrane interne et mélanger l'agent éclaircissant et l'activateur.

2. Appuyer sur le piston de la seringue rouge (C) de manière à transvaser tout son contenu dans la seringue transparente (B).

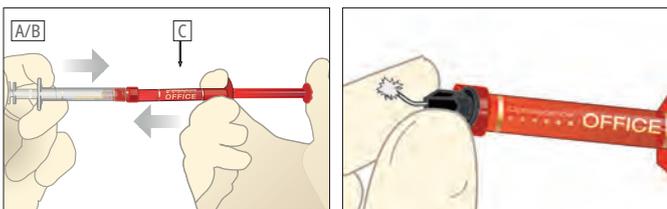

3. Appuyer pour faire revenir complètement le piston transparent dans la seringue violette (C). Pour bien mélanger l'activateur avec le gel éclaircissant, enfoncer les pistons alternativement et sans arrêt avec les pouces. Mélanger rapidement au moins 50 fois (25 fois de chaque côté).

4. Faire passer tout le gel mélangé dans la seringue VIOLETTE. Séparer les deux seringues puis fixer l'embout Micro 20 ga FX™ sur la seringue violette. Vérifier l'écoulement sur une gaze de coton ou un bloc de malaxage avant l'application intra-orale. Si une résistance est rencontrée, changer l'embout et vérifier de nouveau l'écoulement.

RÉFRIGÉRER



- 4740 – Opalescence Office 6 % Intro Kit**
4 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Office/Activateur
2 seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam Green
2 adaptateurs Luer Vacuum Ultradent
2 IsoBlocks, 2 teintiers
2 embouts SST
20 embouts Black Mini

RÉFRIGÉRER



- 4757 – Opalescence Office 6 % Kit Patient**
2 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Office/Activateur
1 seringue de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam Green
1 IsoBlock, 1 teintier
10 embouts Black Mini

RÉFRIGÉRER



- 4759 – Opalescence Office 6 % Mini Kit**
2 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Office/Activateur
1 teintier
5 embouts Black Mini



Éclaircissement professionnel Prêt à Porter


Opalescence Go™ 6%

GOUTTIÈRES D'ÉCLAIRCISSEMENT PRÉCHARGÉES
DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE



- Éclaircissement dentaire cosmétique dans des gouttières préchargées
- Le matériau de gouttière unique UltraFit™ offre un ajustement confortable et s'adapte au sourire de chaque patient
- Comme la gouttière recouvre l'arcade dentaire dans son intégralité, le gel est en contact avec plus de dents postérieures
- Le gel d'éclaircissement Opalescence Go a été formulé pour le confort du patient
- Pratiques, les gouttières préchargées peuvent être portées dès la sortie de l'emballage
- La quantité optimale de gel permet un nettoyage facile après l'éclaircissement
- Temps de port : 60 à 90 minutes par gouttière
- Le gel d'éclaircissement dentaire Opalescence Go contient du PF (nitrate de potassium et fluorure)
- Délicieux parfums menthe et pastèque

Le système d'éclaircissement à domicile Opalescence Go est recommandé pour les patients souhaitant un éclaircissement professionnel à domicile ou comme alternative aux produits d'éclaircissement vendus en magasin. Sans prise d'empreinte, sans moulage et sans délais de laboratoire, les gouttières d'éclaircissement Opalescence Go constituent également une solution de complément après un éclaircissement en cabinet.

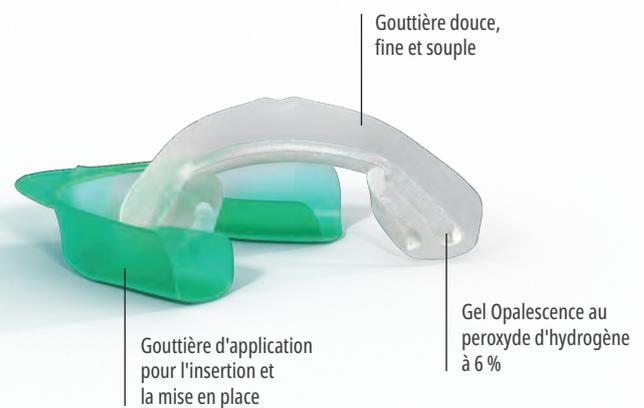

1. realityesthetics.com.



INSTRUCTIONS POUR LE PATIENT



1. Sortir le produit de son emballage.
« U » – Gouttière d'éclaircissement pour arcade supérieure
« L » – Gouttière d'éclaircissement pour arcade inférieure



2. Placer la gouttière pour arcade supérieure sur les dents.



3. Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.



4. Retirer la gouttière extérieure colorée et laisser la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter la procédure avec la gouttière pour arcade inférieure.



5. Une fois écoulé le temps de port indiqué, retirer les gouttières d'éclaircissement et se brosser les dents.

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Kits Patient



Parfum	6%
Menthe	4634
Pastèque	3592

Chaque kit contient 10 blisters avec 1 gouttière pour l'arcade supérieure et 1 pour l'arcade inférieure
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Kits Patient Boîte de 6



Parfum	6%
Menthe	4639
Pastèque	3593

10 gouttières pour arcade supérieure et 10 gouttières pour arcade inférieure dans chaque kit
1 dentifrice Opalescence de 20 ml (28 g)

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Mini Kits



Parfum	6%
Menthe	4644
Pastèque	3599

Chaque kit contient 4 blisters avec 1 gouttière pour l'arcade supérieure et 1 pour l'arcade inférieure

RÉFRIGÉRER

Opalescence Go Mini Kits Boîte de 12



Parfum	6%
Menthe	4649
Pastèque	3600

4 gouttières pour arcade supérieure et 4 gouttières pour arcade inférieure dans chaque kit



Plaques Sof-Tray™ standard

PLAQUES POUR LE THERMOFORMAGE
DE GOUTIÈRES



Les plaques de 0,9 mm d'épaisseur conviennent pour la majorité des gouttières d'éclaircissement, celles de 1,5 mm ou 2,0 mm pour les cas de bruxisme.



Utiliser le thermoformeur pour chauffer la plaque pour gouttière Sof-Tray™ standard jusqu'à ce qu'elle s'affaisse de 5 à 15 mm pour la version 0,9 mm, et de 25 mm pour les plaques de 1,5 mm et 2,0 mm. Abaisser le plastique sur le modèle. Laisser refroidir puis retirer le modèle du thermoformeur.

226 – Plaques Sof-Tray standard 25 unités
0,9 mm – 127 x 127 mm

Épaisseur 0,9 mm

227 – Plaques Sof-Tray moyennes 20 unités
1,5 mm – 127 x 127 mm

Épaisseur 1,5 mm

284 – Plaques Sof-Tray épaisses 20 unités
2,0 mm – 127 x 127 mm

Épaisseur 2,0 mm

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les plaques Sof-Tray, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisées pour créer des gouttières d'éclaircissement. Elles ne sont pas remboursées. Classe I, certifiées TUV Nord, Ultradent Inc.

Ciseaux crantés Ultradent™ Ultra-Trim

- Pour la découpe précise du bord autour des papilles interdentaires
- À ressort pour ménager les doigts
- Bonne prise du matériau des gouttières
- En acier inoxydable robuste



605 – Ciseaux crantés Ultradent Ultra-Trim 1 unité

Étuis à gouttières Opalescence™



- Pour la protection des gouttières lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Boîtier plat qui se glisse dans toutes les poches
- Dimensions intérieures : 7,5 x 7 x 1,5 cm

707 – Assortiment d'étuis à gouttière 20 unités
6 bleu, 7 vert, 7 couleur pastèque



Ultradent™ LC Block-Out Resin

RÉSINE PHOTOPOLYMÉRISABLE
POUR RÉSERVOIRS



Black Mini™ Tip

- Viscosité pour une application adaptée
- Couleur bleue pour une bonne visibilité pendant l'application
- Résine à usages multiples

Ultradent LC Block-Out Resin permet de créer des réservoirs pour gouttières d'éclaircissement. Elle est également utile pour d'autres procédures de laboratoire comme la réparation de modèles de coulée. La résine Ultradent LC Block-Out Resin peut être appliquée avec l'embout Black Mini. Elle doit être photopolymérisée et n'est pas destinée à un usage intra-oral.

UTILISATION



Appliquer environ 0,5 mm d'Ultradent LC Block-Out Resin sur les surfaces vestibulaires, à une distance d'environ 1,5 mm du feston gingival, pour ménager des réservoirs d'éclaircissement, puis photopolymériser. Ne pas appliquer sur les bords incisifs ni sur les surfaces occlusales.



La résine Ultradent LC Block-Out Resin est un matériau dur, résistant et prêt à l'emploi pour l'obturation des contre-dépouilles sur les modèles de coulée et le comblement des espaces vides.

« Ultradent LC Block-Out Resin est la résine pour réservoirs originale à usage extra-oral et reste la meilleure. » —REALITY RATINGS

1. realityesthetics.com.



240 – Ultradent LC Block-Out Resin Kit
4 seringues de 1,2 ml (1,38 g) d'Ultradent LC Block-Out Resin
20 embouts Black Mini Tips



242 – Ultradent LC Block-Out Resin Kit économique
20 seringues de 1,2 ml (1,38 g) d'Ultradent LC Block-Out Resin
20 embouts Black Mini Tips



241 – Ultradent LC Block-Out Resin Recharge
4 seringues de 1,2 ml (1,38 g) d'Ultradent LC Block-Out Resin




Pour réservoirs
d'éclaircissement.



Également pour gouttières
parodontales.



Éclaircissement – MÉDICAL

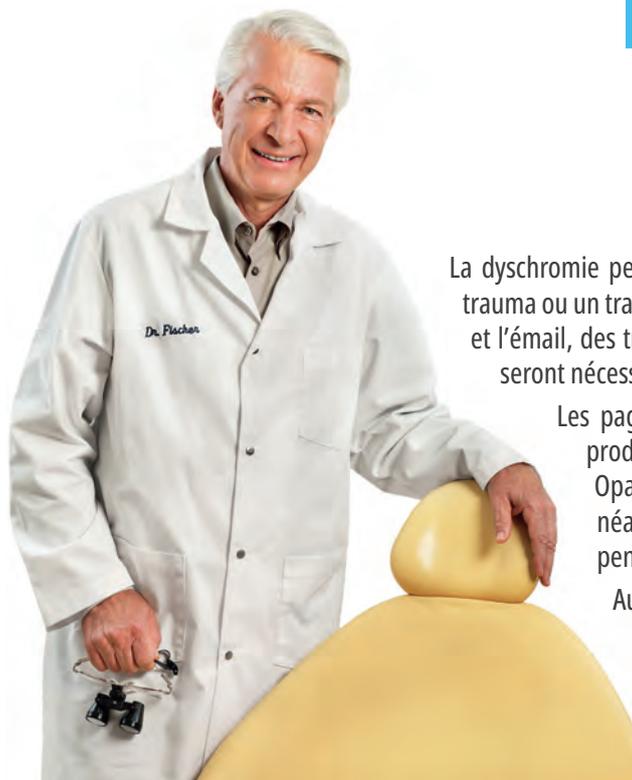

Dr Dan Fischer
Fondateur, Ultradent Products, Inc.

La dyschromie peut avoir de nombreuses causes. Si les taches sont dues à une maladie, un trauma ou un traitement médical et ont migré de l'intérieur de la dent pour pénétrer la dentine et l'émail, des traitements médicaux spéciaux – ainsi que des produits médicaux spéciaux – seront nécessaires pour éclaircir cette dent.

Les pages suivantes décrivent les produits destinés à l'éclaircissement médical – produits aux substances très actives et à la composition améliorée. Par exemple, Opalescence Boost est un gel contenant 40 % de peroxyde d'hydrogène. Il a néanmoins un pH neutre et contient du PF pour préserver la santé de l'émail pendant l'éclaircissement.

Aucune lampe n'est nécessaire dans la mesure où il est activé chimiquement. Opalescence Endo est utilisé dans d'autres cas médicaux particuliers. Tous ces matériaux sont appréciables entre les mains d'un dentiste qui pourra traiter presque toutes les dyschromies, même les plus difficiles, au moyen d'une technique très peu invasive. Il n'est plus besoin de restaurations, facettes ou couronnes pour traiter les dyschromies dentaires.

NOM DU PRODUIT	INDICATIONS	SUBSTANCE ACTIVE	Concentrations de peroxyde d'hydrogène par rapport au peroxyde de carbamide
Opalescence™ Endo	MÉDICAL, TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE Technique Walking Bleach Application intracoronaire au fauteuil pour dents dépulpées	Peroxyde d'hydrogène à 35 %	35 % PH
Opalescence™ Boost™ 40 %	MÉDICAL, TRAITEMENT EFFECTUÉ PAR UN DENTISTE Éclaircissement au cabinet, application directe au fau- teuil par voie interne	Peroxyde d'hydrogène à 40 %	40 % PH



Les dispositifs médicaux pour l'éclaircissement des dents ne sont pas disponibles dans certains pays de la communauté européenne. Veuillez demander conseil à votre fournisseur dentaire.

Remarque : ne pas utiliser sur les dents ayant subi un trauma, en présence de signes de résorption cervicale ou après plusieurs tentatives d'éclaircissement.



Opalescence™ Endo

TECHNIQUE « WALKING BLEACH » POUR DENTS DÉPULPÉES – PEROXYDE D'HYDROGÈNE À 35 %



Black Mini™ Tip

- Éclaircissement dentaire médical
- Peroxyde d'hydrogène à 35 %
- Application à l'intérieur de la chambre pulpaire
- 1 à 5 jour(s) de traitement

Le gel d'éclaircissement pour dents dépulpées Opalescence Endo a été spécifiquement formulé pour l'éclaircissement des dents dépulpées ayant subi un traitement endodontique avec la technique de « walking bleach ».

AVANT ET APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr Rich Tuttle.



Avant.



Après.



Avant.



Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.



Avant.



Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Arno Schoeler.



Avant.



Après.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Opalescence Endo, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le traitement des dyschromies d'origine médicale sur une ou plusieurs dent(s) par voie interne et n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

RÉFRIGÉRER



1270 – Opalescence Endo Kit

2 seringues de 1,2 ml (1,45 g) d'Opalescence Endo
20 embouts Black Mini Tips

RÉFRIGÉRER



1323 – Opalescence Endo Mini Recharge

2 seringues de 1,2 ml (1,45 g) d'Opalescence Endo



J-Temp™

RÉSINE PROVISOIRE
PHOTOPOLYMÉRISABLE




RESTAURATION TEMPORAIRE: TECHNIQUE D'ÉCLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE



1. Évaluer, préparer et sceller la chambre pulpaire conformément au mode d'emploi.



2. Appliquer le gel d'éclaircissement dans la chambre pulpaire en laissant un espace de 3 à 5 mm pour la résine provisoire J-Temp (aucune barrière n'est nécessaire entre le gel d'éclaircissement et la résine provisoire J-Temp).

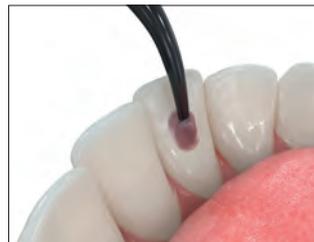

3. Appliquer la résine provisoire J-Temp par couches successives de 2–3 mm.



4. Photopolymériser après chaque couche.



5. Il est possible de retirer et d'appliquer de nouveau la résine provisoire J-Temp lors de chaque séance d'éclaircissement supplémentaire.



Résine provisoire
photopolymérisable,
4 indications en 1,
voir page 132.

REMARQUE: Veiller à ne pas déplacer le gel d'éclaircissement vers les bords car cela pourrait compromettre l'obturation provisoire.

1. realityesthetics.com.



Opalescence™ Boost™

ÉCLAIRCISSEMENT EN CABINET
PEROXYDE D'HYDROGÈNE À 40 %



Black Mini™ Tip

- Éclaircissement sur dent(s) - non vitale(s) par voie interne
- AUCUNE LAMPE NÉCESSAIRE
- Réfrigération inutile
- Gel à base d'hydrogène de peroxyde à 40 %
- Deux à trois applications de 20 minutes pour un temps de traitement total de 40 à 60 minutes, dans la limite de 3 applications par consultation
- Mélange au fauteuil de seringue à seringue
- Le gel d'éclaircissement dentaire Opalescence Boost contient du PF (nitrate de potassium et fluorure)

L'agent d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost (pour les traitements médicaux) étant activé chimiquement, aucune lampe n'est nécessaire pour l'éclaircissement. En fait, certaines recherches montrent que l'utilisation d'une lampe pour l'éclaircissement peut être nocive pour les lèvres et les gencives¹. Le mélange en seringues active le produit juste avant son application. Le peroxyde d'hydrogène à 40 % activé est facilement exprimé de la seringue et appliqué sur les dents pour l'éclaircissement.

L'éclaircissement avec Opalescence Boost est une méthode alternative, conservatrice, pour le traitement des dyschromies internes (par rapport aux couronnes, facettes, etc.) dues à une maladie, un trauma ou un traitement médical. Les facteurs à l'origine de certaines dyschromies peuvent en effet être congénitaux, systémiques, métaboliques, pharmacologiques, traumatiques ou iatrogènes (fluorose dentaire, jaunisse, prise de tétracycline ou de minocycline pour adulte, porphyrie, blessure et érythroblastose du nouveau-né par exemple). L'éclaircissement en cabinet avec Opalescence Boost permet au dentiste de traiter les dyschromies de manière très ciblée et très efficace.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Opalescence Boost, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement est utilisé pour le traitement des dyschromies d'origine médicale sur une ou plusieurs dent(s) et n'est pas remboursé, Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.


INSTRUCTIONS DE MÉLANGE



1. S'assurer que les seringues sont fermement assemblées. Enfoncer le petit piston transparent (A) dans la petite seringue transparente du milieu (B) pour casser la membrane interne et mélanger l'agent d'éclaircissement et l'activateur. Appuyer sur le piston de la seringue rouge pour l'enfoncer dans la seringue transparente plus large.



2. Faire passer le contenu de la seringue transparente dans la seringue rouge. Bien mélanger le contenu en le faisant passer rapidement d'un côté puis de l'autre, au moins 50 fois (25 fois de chaque côté).

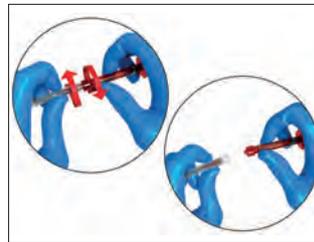

3. Placer tout le gel mélangé dans la seringue ROUGE et séparer les deux seringues.



4. Fixer l'embout Black Mini™ sur la seringue rouge. Vérifier l'écoulement sur de la gaze de coton ou sur un bloc de malaxage avant l'application intra-orale. En cas de résistance, remplacer l'embout et vérifier de nouveau l'écoulement.

1. realityesthetics.com. 2. Bruzell EM, Johnsen B, Aalerud, TN, Dahl JE, Christensen T. In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching. *Photochem Photobiol Sci.* 2009;8(3) 377-85.

Remarque importante : Une fois mélangé, le gel Opalescence™ Boost™ se conserve 10 jours au réfrigérateur. Avant de jeter les seringues, aspirer l'eau dans la seringue et vider le liquide dans le tuyau d'évacuation. Faire cela deux fois avant de jeter la seringue. S'assurer que toute gaze utilisée est rincée à l'eau.

AVERTISSEMENT : Il est impératif que le praticien, l'assistant(e) et le/la patient(e) portent des lunettes de protection avec écrans latéraux pendant le mélange et l'application du gel d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost.



4750 – Opalescence Boost PF 40 % Intro Kit

- 4 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Boost/Activator
- 2 seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam Green
- 2 adaptateurs d'aspiration Luer Vacuum Ultradent
- 2 teintiers
- 2 cales IsoBlock
- 2 embouts SST
- 20 embouts Black Mini Tips



4751 – Opalescence Boost 40 % Patient Kit

- 2 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Boost/Activator
- 1 seringue de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam Green
- 1 teintier
- 1 cale IsoBlock
- 10 embouts Black Mini Tips



4754 – Opalescence Boost 40 % Recharge économique

- 20 seringues de 1,2 ml (1,49 g) d'Opalescence Boost/Activator



Voir pages 104-105.

VALOX™ X

LA LAMPE À POLYMÉRISER REVISITÉE



SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D'INFORMATIONS OU RENDEZ-VOUS SUR ULTRADENT.EU/VALOX-EU



VOYEZ LA COULEUR



La barrière à base de résine OpalDam Green permet un recouvrement efficace des tissus buccaux.

OpalDam™ et OpalDam™ Green

BARRIÈRES PHOTOPOLYMÉRISABLES
À BASE DE RÉSINE



Black Mini™ Tip



Micro 20 ga Tip

- Protège les tissus mous grâce à une excellente étanchéité
- S'élimine facilement
- Application directe

La barrière à base de résine photopolymérisable OpalDam est à base de méthacrylate et à adhésion passive pour l'isolation des tissus adjacents aux dents en cours d'éclaircissement. Il est recommandé de l'utiliser lors de l'éclaircissement de dents unitaires pour protéger les dents adjacentes. La barrière à base de résine OpalDam contient des particules réfléchives pour minimiser les sensibilités tissulaires liées à la chaleur produite lors de la polymérisation. La barrière à base de résine OpalDam Green constitue, à tous les coups, une protection sûre.

MODE D'EMPLOI



1. Appliquer une couche d'OpalDam de 4 à 6 mm de largeur sur la gencive. Obtenir les espaces interproximaux. Recouvrir environ 2-3 mm d'émail sec avec de la résine. Appliquer la résine sur une dent au-delà de la dernière dent à éclaircir. Photopolymériser pendant 20 secondes avec un mouvement de balayage.

2. Retirer la résine polymérisée rapidement et aisément en un seul morceau ou en plusieurs gros morceaux. Vérifier l'absence de résidu de résine dans les espaces interproximaux. Produit conçu pour un retrait aisé des embrasures et contre-dépouilles.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. OpalDam et OpalDam Green, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour l'isolation des tissus adjacents aux dents en cours d'éclaircissement. Non remboursé. Classe I certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.



324 – OpalDam Kit

4 seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam
10 embouts Black Mini Tips
10 embouts Micro 20 ga



325 – OpalDam Recharge 4 unités
326 – OpalDam Recharge économique 20 unités
Seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam



1824 – OpalDam Green Kit

4 seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam Green
10 embouts Black Mini Tips
10 embouts Micro 20 ga



1825 – OpalDam Green en seringue 4 unités
1826 – OpalDam Green en seringue 20 unités
Seringues de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam

Outils marketing pour votre cabinet

Posters, brochures avec consentements éclairés, flyers, instructions patients et videos pour votre salle d'attente.

Vidéo Salle d'attente Opalescence™



Posters Opalescence™
297 x 420 mm 1 pièce



1007528



1007529



1007530

Brochure dentiste Opalescence™ :
Le guide des traitements avec consentement éclairé. 30 pièces



10444

Flyers patients Opalescence™ :
Informations sur l'éclaircissement dentaire et protocoles. 30 pièces



68296



68297

Demandez notre guide pour choisir vos outils de communication dédiés à l'éclaircissement.
Gratuits sur demande au 0800 00 81 50 ou france@ultradent.com



Opalustre™ et OpalCups™

PÂTE DE MICRO-ABRASION CHIMIQUE ET MÉCANIQUE



White Mac™ Tip



Cupules d'application à pinceau OpalCups

Cupules de finition OpalCups

- Élimination définitive des imperfections amélares superficielles
- Traitement mini-invasif définitif
- Faible concentration d'acide chlorhydrique à 6,6 %
- Microparticules de carbure de silice pour une abrasion mécanique en douceur
- Cupules OpalCups pour minimiser les projections

La pâte Opalustre à base d'acide chlorhydrique à 6,6 % contient des microparticules de carbure de silicium pour traiter les imperfections superficielles par une abrasion mécanique et une action chimique non agressives. Les cupules OpalCups sont des cupules de polissage dotées d'un pinceau à utiliser avec la technique de micro-abrasion avec la pâte Opalustre pour faciliter une action plus abrasive tout en minimisant les projections. Les cupules de finition OpalCups servent au micro-polissage avec la pâte Opalustre de la surface amélaire fraîchement traitée.

Utiliser la pâte Opalustre et les cupules OpalCups pour éliminer les taches disgracieuses de décalcification amélaire de moins de 0,2 mm de profondeur. Opalustre permet de traiter la fluorose légère ainsi que les taches sur la couche superficielle de l'émail².

Nous recommandons d'utiliser les produits d'éclaircissement dentaire Opalescence avant tout traitement avec une pâte de micro-abrasion Opalustre car cette procédure peut parfois être évitée. Il convient en outre d'avoir à l'esprit que les dérivés réactifs de l'oxygène devant se dissiper avant le collage, il est nécessaire d'attendre 7 à 10 jours avant toute procédure de collage³⁻⁵ après un traitement d'éclaircissement dentaire.

AVANT ET APRÈS



Avec l'aimable autorisation du Dr. Bahmat-Agrawal.

Après seulement quelques applications de la pâte Opalustre™, élimination ou atténuation significative de la dyschromie légère due à la fluorose. Appliquer avec une cupule au pinceau à poils durs et un contre-angle réducteur 10:1 en appliquant une forte pression.




Avec l'aimable autorisation du Dr. Rich Tuttle.

Décalcification amélaire corrigée après une application de la pâte Opalustre™ à l'aide de cupules d'application à pinceau OpalCups et d'un contre-angle réducteur 10:1 en appliquant une forte pression.




Avec l'aimable autorisation du Dr. Jaleena Jessop.

Après seulement quelques applications de la pâte Opalustre™, élimination ou atténuation significative de la décalcification légère à modérée.

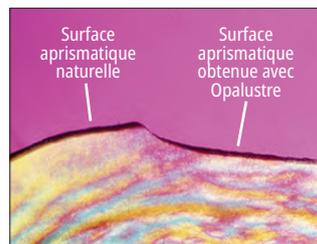

Avec l'aimable autorisation du Dr. Renato Herman Sundfeld.

La micro-abrasion chimique et mécanique produit une surface à l'aspect naturel.

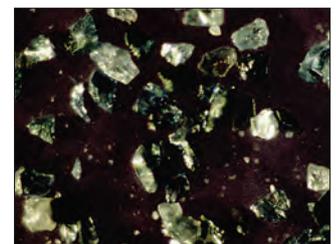

Microparticules de carbure de silice contenues dans la pâte Opalustre.

1. realityesthetics.com. 2. Celik EU, et al. Clinical performance of a combined approach for the esthetic management of fluorosed teeth: three-year results. *Niger J Clin Pract.* 2017;20(8):943-951. 3. Da Silva Machado J, Cândido MS, Sundfeld RH, De Alexandre RS, Cardoso JD, Sundfeld ML. The influence of time interval between bleaching and enamel bonding. *J Esthet Restor Dent.* 2007;19(2):111-119. doi:10.1111/j.1708-8240.2007.00077.x. 4. Spyrides GM, Perdigão J, Pagani C, Araújo MA, Spyrides SM. Effect of whitening agents on dentin bonding. *J Esthet Dent.* 2000;12(5):264-270. doi:10.1111/j.1708-8240.2000.tb00233. 5. Unlu N, Cobankara FK, Ozer F. Effect of elapsed time following bleaching on the shear bond strength of composite resin to enamel. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater.* 2008 Feb;84(2):363-368.




MODE D'EMPLOI – DIGUE EN CAOUTCHOUC

Avec l'aimable autorisation du Dr Ted Croll.



1. Avant.

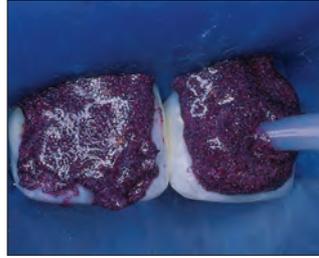

2. Après mise en place de la digue, appliquer la pâte Opalustre sur l'émail décoloré avec la seringue.



3. Utiliser la cupule à pinceau OpalCups™ pour frotter, en appliquant une moyenne à forte pression, la pâte Opalustre sur la surface de la dent. Aspirer la pâte des dents puis rincer, évaluer et répéter la procédure le cas échéant. Achever le traitement par un polissage avec la cupule de finition OpalCups™.



4. Après la micro-abrasion amélaire et 21 jours d'éclaircissement dentaire avec le gel Opalescence™.



5554 – Opalustre Kit

2 seringues de 1,2 ml (1,87 g) d'Opalustre
5 cupules d'application à pinceau et 5 cupules de finition OpalCups
10 embouts White Mac Tips



555 – Opalustre Recharge

4 seringues de 1,2 ml (1,87 g)



5800 – Cupules d'application à pinceau OpalCups 20 unités



5799 – Cupules de finition OpalCups 20 unités

MODE D'EMPLOI – OPALDAM

Avec l'aimable autorisation du Dr Ted Croll.



1. Isoler les dents tachetées avec la barrière à base de résine OpalDam. Appliquer la pâte Opalustre directement avec la seringue et un embout White Mac™.



2. Presser la cupule en basse vitesse sur la surface.



3. Éliminer la pâte Opalustre à la seringue air/eau. Veiller à aspirer avec soin. Vérifier ensuite s'il est indiqué de renouveler le traitement. Poursuivre avec la cupule de finition OpalCups.



4. Résultat du traitement avec la pâte Opalustre. En haut : avant. En bas : après.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Opalustre* destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est une pâte de micro-abrasion pour éliminer les taches par voie chimique. Non remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Les cupules d'application et de finition OpalCups* destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, permettent d'éliminer les taches par voie chimique. Non remboursé. Classe IIa, certifié TUV Rheinland.



UltraEZ™

GEL DE DÉSENSIBILISATION
AVEC NITRATE DE POTASSIUM ET FLUORURE



- Agit immédiatement
- Traite l'hypersensibilité
- Gel sans parfum disponible en seringues ou gouttières prêtes à porter

UltraEZ est un gel de désensibilisation à libération prolongée à base de nitrate de potassium à 3 % contenant du fluorure (NaF neutre à 0,25 %). Sa formule à libération prolongée traite les sensibilités liées à l'abrasion par la brosse à dents, aux variations thermiques et chimiques, à l'éclaircissement dentaire et aux dénudations radiculaires.



1008 – UltraEZ Recharge 4 unités

1007 – UltraEZ Econo Recharge économique 20 unités
Seringues de 1,2 ml (1,48 g) d'UltraEZ



Avec la gouttière UltraFit™

5743 – Mini-assortiment de gouttières
UltraEZ 4 unités

4 gouttières pour arcade supérieure et 4 gouttières pour arcade inférieure



Avec la gouttière UltraFit™

5721 – Assortiment de gouttières
UltraEZ 10 unités

10 gouttières pour arcade supérieure et 10 gouttières pour arcade inférieure



DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. UltraEZ, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le traitement des hypersensibilités et n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

Umbrella™

ÉCARTE-LANGUE, -LÈVRES ET -JOUES

- Aide naturellement et en douceur le patient à garder la bouche ouverte sans étirer ni tirer sur les lèvres
- Un système innovant d'écartement de la langue permet de maintenir cette dernière derrière le protège-langue, la tenant en retrait de la zone de travail
- Grâce aux languettes à la forme et à la position anatomiques, les praticiens peuvent poser une main sur la bouche du patient sans causer d'inconfort

Écarte-langue, lèvres et joues, page 37.



KleerView™

ÉCARTE-JOUES ET – LÈVRES

Les écarte-joues/lèvres sont parfaits pour l'éclaircissement en cabinet, le collage, les restaurations et la photographie clinique.



1821 – KleerView 1 unité

IsoBlock™

CALE-BOUCHE



- Développé pour le confort des patients
- Appui bilatéral et retenue de la langue

Ces cale-bouche IsoBlock jetables facilitent le relâchement des lèvres et des joues, permettant ainsi d'accéder sans gêne aux surfaces faciales et vestibulaires pour l'éclaircissement en cabinet, les restaurations de Classe V, les facettes, le scellement, etc.



331 – IsoBlock 10 unités

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. KleerView and IsoBlock, ÉCARTE-JOUES ET – LÈVRES sont destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement. Ils ne sont pas remboursés. Classe I, auto-certifiés Ultradent Inc.

PROPHYLAXIE



45 ANS
1978-2023

ANGELA WELLS – Cecret Lake

Sealant pour puits & sillons
Agent siccatif
Vernis au fluorure de sodium
Vernis de désensibilisation dentinaire
Dentifrices d'éclaircissement



UltraSeal XT™ hydro™

SEALANT HYDROPHILE POUR PUITS ET SILLONS



Inspiral™ Brush Tip

- Hydrophile avant polymérisation, il devient hydrophobe après polymérisation et a des propriétés autoadhésives
- Fluorescent sous lumière noire pour s'assurer que le sealant est toujours en place
- Résine chargée – 53 %
- Thixotrope, fluidité et viscosité optimales²
- Deux teintes : Opaque White et Natural

UltraSeal XT hydro est un sealant composite hydrophile pour puits et sillons photopolymérisable et radio-opaque qui contient du fluorure. Résine chargée à 53 % et présentant une rétraction à la polymérisation inférieure à celle des produits concurrents, ce produit est plus solide et résistant à l'usure³. Utilisé avec l'embout Inspiral™ Brush Tip, la nature thixotrope du sealant UltraSeal XT hydro fait qu'il se fluidifie à mesure qu'il s'écoule de l'embout – ce qui lui permet de pénétrer profondément dans les puits et sillons. Lorsque la résine cesse de s'écouler, la fluidification cesse et la mise en place est achevée⁴ – cela l'empêche de couler avant d'être photopolymérisée. La formulation hydrophile perfectionnée agit lorsque toute l'humidité visible a été éliminée. Le sealant UltraSeal XT hydro est plus indulgent pour l'humidité au fond des puits et sillons.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. UltraSeal XT Hydro, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le comblement des sillons. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

AVANT ET APRÈS


Avec l'aimable autorisation du Dr. Jaleena Jessop.



Avant.



Après.

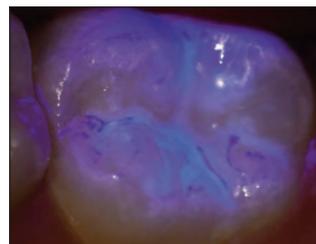

Une fois le sealant appliqué, il est souvent difficile d'en vérifier les limites et l'étanchéité. Le sealant UltraSeal XT™ hydro résout ce problème grâce à sa fluorescence. Entièrement visible sous une lumière noire, la fluorescence du produit permet de vérifier l'étanchéité au moment de son application et à chacune des consultations suivantes.


QUATRE ÉTAPES SIMPLES



1. Mordancer pendant 30 secondes sur l'émail non fraisé et pendant 15 secondes sur l'émail fraisé. Rincer.



2. Éliminer l'humidité visible.

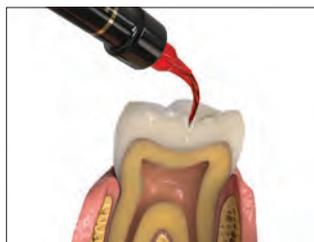

3. Appliquer le sealant UltraSeal XT hydro.



4. Polymériser pendant 3 secondes avec la lampe à LED VALO™ en mode Xtra puissance ou pendant 10 secondes en mode Puissance standard.

1. realityesthetics.com 2. Données internes 3. Données internes, tests selon les procédures internes 4. Données internes.



ÉTANCHÉITÉ MARGINALE ET MICRO-INFILTRATIONS

Sealant UltraSeal XT hydro




Absence de micro-infiltrations.



Limites étanches.


Sealant hydrophile concurrent

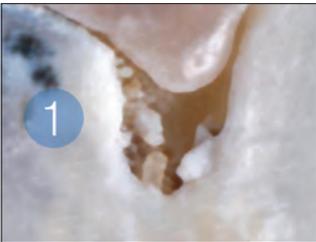


Micro-infiltration.



Décollement des bords.

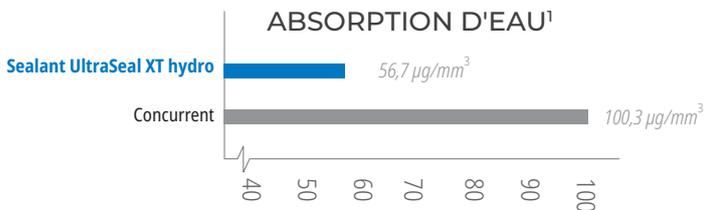

L'absorption d'eau équilibrée laisse de la marge dans les environnements humides sans dégradation.

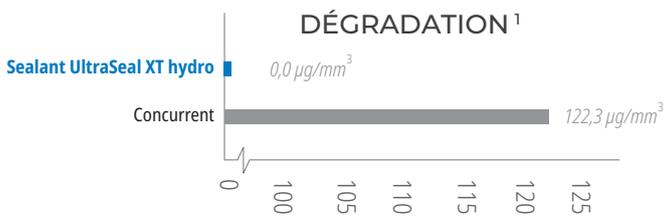

Aucune dégradation grâce à l'absorption d'eau équilibrée.

1. Données internes, tests selon les procédures internes.



UltraSeal XT hydro Kits

Teinte	Kit
Opaque White	3532
Natural	3533

- 1 seringue de 1,2 ml (2,04 g) d'UltraSeal XT hydro
- 1 seringue de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
- 20 embouts Blue Micro Tips
- 20 embouts Inspirial Brush Tips



UltraSeal XT hydro Recharges

Teinte	4 unités	20 unités
Opaque White	3534	3536
Natural	3535	—

Seringues de 1,2 ml (2,04 g)



3551 - Porte-clé lumière noire 1 unité



UltraSeal XT™ plus


SEALANT HYDROPHOBE POUR PUITS ET SILLONS



Inspirational™ Brush Tip

- Les sealants à base de résine ont des taux de rétention élevés²
- Application directe dans les zones difficiles d'accès
- Application sans formation de gouttes
- Pénètre dans les puits et sillons les plus profonds³
- Thixotrope, fluidité et viscosité optimales⁴
- Quatre teintes : Opaque White, Clear, A1 et A2

UltraSeal XT plus est un sealant composite hydrophobe pour puits et sillons, photopolymérisable et radio-opaque qui contient du fluorure. Résine chargée à 58 % et présentant une rétraction à la polymérisation inférieure à celle des produits concurrents, ce produit est plus solide et résistant à l'usure⁵. Utilisé avec l'embout Inspirational™ Brush Tip, la nature thixotrope du sealant UltraSeal XT plus fait qu'il se fluidifie à mesure qu'il s'écoule de l'embout, ce qui lui permet de pénétrer profondément dans les puits et sillons. Lorsque la résine cesse de s'écouler, la fluidification cesse et la mise en place est achevée⁶ – cela l'empêche de couler avant d'être photopolymérisée. L'association de l'agent siccatif PrimaDry™ et du sealant UltraSeal XT plus permet la pénétration complète dans les puits et les sillons en éliminant l'humidité à l'origine de l'échec possible des sealants hydrophobes.

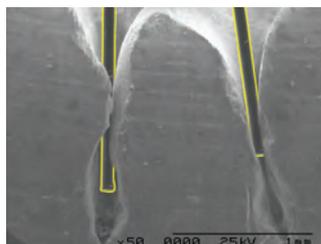

Avec ses fibres ajustables et son canal hélicoïdal, l'embout Inspirational™ Brush a été développé pour une application optimale des sealants UltraSeal XT.
Les clichés d'une fibre et de la dent (à droite) ont été pris avec le même grossissement puis superposés.

* Évaluation Reality. Reality. Reality Publishing Company 1998–2017. 1. realityesthetics.com. 2. Alirezaei M, Bagherian A, Sarraf Shirazi A. Glass ionomer cements as fissure sealing materials: yes or no?: A systematic review and meta-analysis. *J Am Dent Assoc.* 2018; 149(7):640.649.e9. doi:10.1016/j.adaj.2018.02.001 3. Données internes. 4. Données internes. 5. Données internes, tests selon les procédures internes. 6. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *UltraSeal XT PLUS*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le comblement des sillons. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

AVANT ET APRÈS



Avant.



Après application le sealant UltraSeal XT plus.



Avant.



Après application le sealant UltraSeal XT plus.


CINQ ÉTAPES SIMPLES




1. Mordancer pendant 30 secondes sur l'émail non fraisé et pendant 15 secondes sur l'émail fraisé. Rincer.



2. Éliminer l'humidité visible. L'agent siccatif PrimaDry™ desséchera les surfaces.

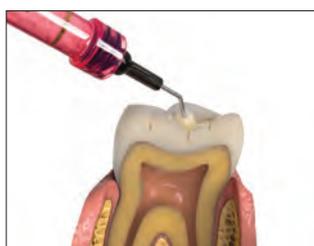

3. Appliquer l'agent PrimaDry pendant 5 secondes avec l'embout Black Micro™ FX™, puis sécher à l'air comprimé.

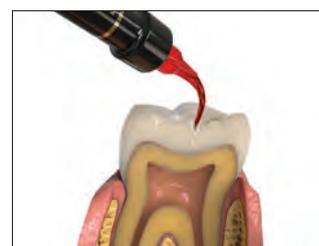

4. Appliquer le sealant UltraSeal XT plus.




5. Polymériser pendant 3 secondes avec la lampe VALO™ en mode Xtra puissance ou pendant 10 secondes en mode puissance standard.




COMPARAISON DES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES*

RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT¹

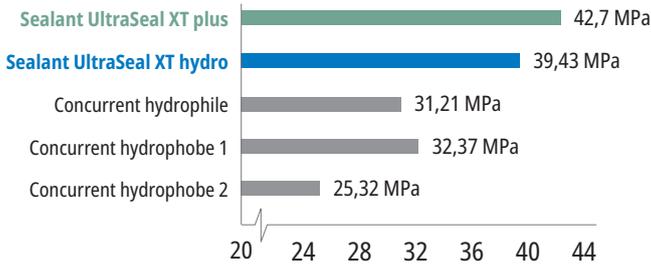


Une résistance au cisaillement élevée est essentielle pour retenir le sealant dans des conditions d'utilisation normales.

DURETÉ¹

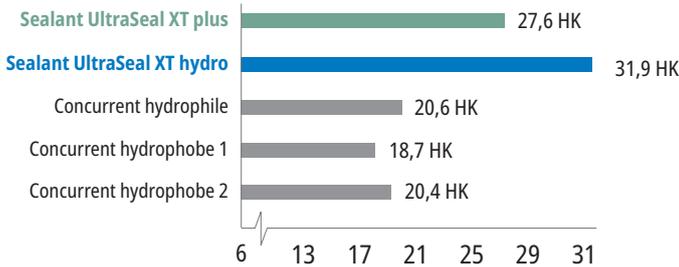

Une dureté élevée indique un sealant résistant et durable qui ne cassera pas ni ne s'usera.

RÉTRACTION¹

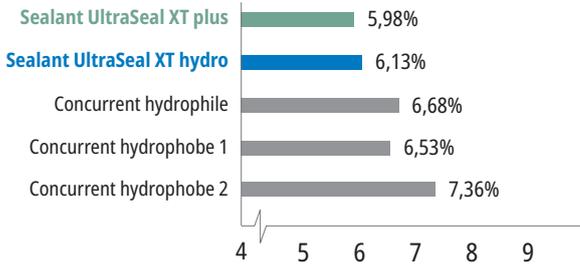

Une faible rétraction réduit le risque d'espaces marginaux qui peuvent entraîner des micro-infiltrations.

1. Données internes, tests selon les procédures internes.



UltraSeal XT plus Kits

Teinte	Kit
Opaque White	725
Clear	563
A1	1286
A2	733

- 1 seringue de 1,2 ml (2,04 g) d'UltraSeal XT plus
- 1 seringue de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
- 2 seringues de 1,2 ml (0,95 g) de PrimaDry
- 10 embouts Blue Micro Tips
- 10 embouts Black Micro FX Tips
- 20 embouts Inspirai Brush Tips



UltraSeal XT plus Recharges

Teinte	4 unités	20 unités
Opaque White	726	727
Clear	565	—
A1	1289	—
A2	734	—

Seringues de 1,2 ml (2,04 g)

PrimaDry™
AGENT SICCATIF



- À utiliser avec le sealant pour puits et sillons UltraSeal XT plus
- Réduction des micro-infiltrations dans les sealants hydrophobes

L'agent siccatif PrimaDry est idéal pour le séchage des puits et des sillons et avant l'application des sealants hydrophobes. Il est composé à 99 % de solvants organiques et 1 % de primer. C'est pourquoi l'agent siccatif PrimaDry évapore rapidement l'humidité présente dans les puits et sillons après le rinçage et le séchage de l'agent de mordantage à la seringue air/eau. Le film de primer ultrafin permet au sealant UltraSeal XT™ plus de pénétrer parfaitement dans tous les puits et sillons. Il ne doit pas être utilisé sur la dentine.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. PrimaDry destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.



Black Micro™ FX™ Tip



RÉFRIGÉRER

716 – PrimaDry en seringue Recharge
4 seringues de 1,2 ml (0,95 g)

717 – PrimaDry en seringue Recharge économique
20 seringues de 1,2 ml (0,95 g)



Enamelast™ VERNIS FLUORÉ

PLUS QU'UN GOÛT EXTRA !



Sans parfum



Cool Mint



Caramel



Orange Cream



Bubble Gum



Walterberry

- Formule brevetée favorisant l'adhésion pour une meilleure rétention
- Libération et absorption du fluorure²
- Texture lisse, non granuleuse
- Pratiquement invisible
- Sans fruits à coque et sans gluten

Le vernis fluoré Enamelast est un fluorure de sodium à 5 % édulcoré au xylitol dans une matrice à base de résine. Sa formule unique comporte un agent breveté favorisant l'adhésion pour une meilleure rétention, tout en conférant une libération et une absorption supérieures du fluorure². Disponible en seringues en parfum **Walterberry™** et en unidoses en parfums **Walterberry, Orange Cream, Cool Mint, Bubble Gum** et **Caramel**, ainsi que **sans parfum**.

Le vernis fluoré Enamelast entraîne une obstruction mécanique des tubuli dentinaires dans le cadre du traitement de l'hypersensibilité des dents. L'AAPD recommande d'utiliser un vernis fluoré comme complément prophylactique pour réduire le risque de caries³. L'application de vernis fluoré pour la prévention des caries est également recommandée par l'American Dental Association (ADA)⁴.


AVANT ET APRÈS



Avant le vernis fluoré Enamelast.




Immédiatement après l'application du vernis fluoré Enamelast.

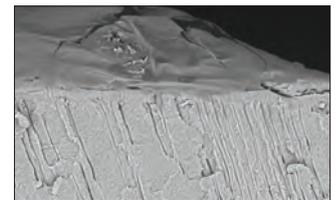


Le vernis Enamelast entraîne une obstruction mécanique des tubuli dentinaires dans le cadre du traitement de l'hypersensibilité des dents. Il peut donc être utilisé avant ou après l'éclaircissement afin de soulager l'inconfort des patients dans la région cervicale.

ABSORPTION DU FLUOR ($\mu\text{g F/cm}^3$)⁵

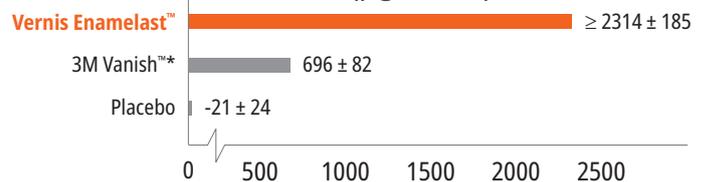

LIBÉRATION DE FLUOR⁶

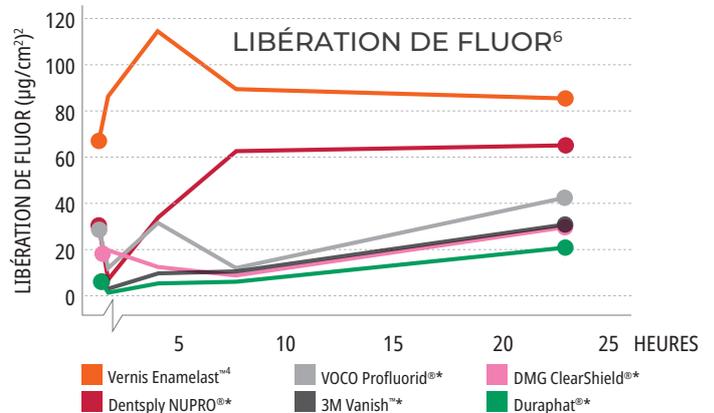

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com 2. Schemehorn BR. Sound enamel fluoride uptake from a fluoride varnish. 2013. Données internes. 3. American Academy of Pediatric Dentistry. Déclaration de principes sur l'utilisation du fluor. Adoptée en 1967. Réaffirmée en 1977. Révisée en 2018. Consultable sur http://www.aapd.org/media/Polices_Guidelines/P_FluorideUse.pdf. 4. American Dental Association Council on Scientific Affairs. Professionally applied topical fluoride: evidence-based clinical recommendations. *J Am Dent Assoc.* 2006;137(8):1151-9. 5. Schemehorn BR. Sound enamel fluoride uptake from a fluoride varnish. 2013. Données internes. 6. Données internes. 7. Résultats de test reposant sur le parfum Walterberry.



4521 – Enamelast Walterberry Kit seringue

2 seringues de 1,2 ml (1,23 g)
4 embouts SoftEZ Tips



4523 – Enamelast Walterberry Kit Seringue économique

20 seringues de 1,2 ml (1,23 g)

Enamelast en unidose 0,4 ml (0,41 g)

Parfum	50 unités	200 unités
Walterberry	4518	4528
Orange Cream	4344	4343
Cool Mint	4353	4352
Bubble Gum	4363	4362
Caramel	4819	4822
Sans parfum	5188	5187
50 de chaque – W, OC, CM, BG		4368
50 de chaque – W, CM, BG, C		4821



Ultradent™ Universal Dentin Sealant

POUR L'HYPERSENSIBILITÉ
RADICULAIRE TRANSITOIRE




Black Mini™ Brush Tip

- Brossette et sécher
- « Boîte à outils » de l'hygiéniste dentaire
- Après un détartrage et un surfaçage radiculaire
- Occlusion provisoire des tubuli

Ultradent Universal Dentin Sealant est une résine biocompatible non polymérisable au poids moléculaire élevé dans un solvant organique volatil.

À utiliser pour recouvrir des racines sensibles pour sceller les tubuli dentinaires et réduire l'inconfort consécutif à un surfaçage radiculaire ou un détartrage.

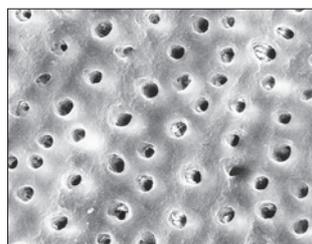

Ultradent Universal Dentin Sealant recouvre la dentine d'une couche de protection étanche. Les deux surfaces ont été préparées avec de l'acide phosphorique pendant 20 secondes. L'image obtenue avec un microscope à balayage électronique (à droite) représente une surface qui a été préalablement recouverte avec Ultradent Universal Dentin Sealant¹.



265 – Universal Dentin Sealant Kit

4 seringues de 1,2 ml (1,08 g)
20 embouts Black Mini Brush Tips



266 – Universal Dentin Sealant Recharge

4 seringues de 1,2 ml (1,08 g)

Remarque: Ultradent Universal Dentin Sealant N'est PAS un adhésif. Pour les produits adhésifs inégalés, voir page 60. Utiliser Ultra-Blend™ plus si un fond de cavité ou une couche de base est nécessaire, voir page 66.

1. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Ultradent™ Universal Dentin Sealant, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour l'hypersensibilité radiculaire transitoire. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Le vernis fluoré Enamelast, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour la prévention des caries. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



AVANT ET APRÈS



Des résultats en à peine une semaine¹

Opalescence™ Dentifrice éclaircissant

ORIGINAL & SPÉCIAL DENTS SENSIBLES



- Des résultats en à peine une semaine¹
- Éclaircissement des dents démontré en quatre semaines¹
- Contient de la silice hydratée au pouvoir antitache démontré¹
- Doux pour les gencives¹
- Utilisation quotidienne sans danger sur le long terme
- Contient du fluorure de sodium pour favoriser la prévention des caries et renforcer l'émail²
- Absorption du fluor exceptionnelle³
- 78 RDA⁴
- Formule sans triclosane et sans TiO₂
- Végétalien – aucun produit d'origine animale n'est utilisé

Opalescence™ est le leader dans le domaine de l'éclaircissement dentaire. Le dentifrice éclaircissant Opalescence⁵, développé par un dentiste, fait partie de cette famille de produits. Ce dentifrice élimine activement les taches superficielles mais reste suffisamment doux pour un usage quotidien grâce à son mélange unique de silice.

- Trois variétés de menthe exotique sont mélangées pour obtenir un parfum frais
- Édulcoré avec du xylitol qui peut réduire le risque de carie dentaire
- Notre formulation Spécial dents sensibles offre tous les avantages de la formulation originale en termes d'éclaircissement mais contient, en plus, du nitrate de potassium à 5 %



20 ml (28 g)	24 unités
Original	402
Dents sensibles	3472



100 ml (133 g)	12 unités
Original	401
Dents sensibles	3470

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. **1.** Çakmakçıoğlu O, Yılmaz P, Topbaşı BF. Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes: A pilot study. *OHDMBMC*. 2009; 8(4):613. **2.** Sivapriya E, Sridevi K, Periasamy R, Lakshminarayanan L, Pradeepkumar AR. Remineralization ability of sodium fluoride on the microhardness of enamel, dentin, and dentinoenamel junction: An in vitro study. *J Conserv Dent*. 2017;20(2):100-104. doi:10.4103/JCD.JCD_353_16 **3.** Schemehorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Données internes. **4.** Attin, T. Assessment of relative dentin abrasion (RDA) of two toothpastes from Ultradent Products, Inc., Universitat Zurich: Zurich, Switzerland. 2021. Données internes. **5.** Ce dentifrice ne contient pas de peroxyde.

PRÉPARATION



45 ANS
1978-2023

TAYLON ASHBY – Lake Powell

Révéléateur de caries
Écarte-langue, -lèvres et -joues
Digues en caoutchouc
Protège-dent interproximal
Comblement des contre-dépouilles
Système de matrices sectionnelles
Matrice et porte-matrice à usage unique



Sable™ Seek™ et Seek™

RÉVÉLATEURS DE CARIES



Black Mini™ Brush Tip

- Coloration de la dentine cariée et déminéralisée
- Application précise et sans pertes
- Disponibles en vert foncé pour une application près de la pulpe

Le révélateur de caries Sable Seek contient des colorants alimentaires et le révélateur de caries Seek contient des colorants dans une base de glycol. Tous deux sont utilisés pour colorer la dentine cariée et déminéralisée.

Les révélateurs de caries Seek et Sable Seek colorent la dentine cariée et déminéralisée et peuvent être très utiles dans les zones difficiles à visualiser telles que les contre-dépouilles des préparations, la dentine sombre, les zones situées le long de la jonction AD, etc. Le révélateur de caries Sable Seek vert facilite la visualisation des caries profondes et aide à prévenir les expositions pulpaire.

PROCÉDURE



1. Appliquer le révélateur Sable Seek avec l'embout Black Mini Brush Tip.



2. Rincer à la seringue air/eau et sous aspiration. La dentine cariée est facilement identifiable.



3. Éliminer la dentine cariée (de couleur vert-noir) avec une fraise boule à vitesse lente ou un excavateur. Pour contrôler la surexcavation près de la pulpe, éliminer les derniers résidus de tissus cariés avec un excavateur manuel.



4. Appliquer de nouveau. Rincer et vérifier l'absence de tissus cariés.



233 – Sable Seek Kit
4 seringues de 1,2 ml (1,22 g)
20 embouts Black Mini Brush Tips



234 – Sable Seek Recharge
4 seringues de 1,2 ml (1,22 g)



1805 – Sable Seek Recharge économique
20 seringues de 1,2 ml (1,22 g)



209 – Seek Kit
4 seringues de 1,2 ml (1,25 g)
20 embouts Black Mini Brush Tips



210 – Seek Recharge
4 seringues de 1,2 ml (1,25 g)



1804 – Seek Recharge économique
20 seringues de 1,2 ml (1,25 g)

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Seek & Sable Seek*, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour révéler la dentine déminéralisée dans les zones peu visibles et ne sont pas remboursés. Classe IIa, certifiés TÜV Nord, Ultradent Inc.



Umbrella™

ÉCARTE-LANGUE, LÈVRES ET JOUES



- Développé pour vous permettre d'obtenir une zone de traitement dégagée tout en favorisant le confort du patient
- Facile à mettre en place
- Usage unique
- Aide naturellement et en douceur le patient à garder la bouche ouverte sans étirer ni tirer sur les lèvres
- Un système innovant d'écartement de la langue permet de maintenir cette dernière derrière le protège-langue, la tenant en retrait de la zone de travail
- Grâce aux languettes à la forme et à la position anatomiques, les praticiens peuvent poser une main sur la bouche du patient sans causer d'inconfort
- Assure confort et soulagement pour les personnes sujettes aux réactions nauséuses – ne provoque pas le réflexe pharyngé chez la plupart des patients
- Peut être maintenu en place pendant la vérification de l'occlusion

L'écarteur Umbrella s'utilise pour différentes procédures qui nécessitent un accès dégagé sans impact sur le confort du patient par exemple : éclaircissement en cabinet, radios, empreintes, enregistrements de l'occlusion, interventions chirurgicales et plus.

PROCÉDURE



1. La préparation pour l'insertion se fait en appuyant simplement sur les languettes de l'écarteur Umbrella pour les rapprocher l'une de l'autre, en veillant à ce que les flèches situées dans leur partie supérieure pointent vers le haut.



NE placez PAS l'écarteur à l'envers.



2. Demandez au patient de poser la pointe de sa langue sur le palais.



3. Choisissez un côté de la bouche pour commencer, puis insérez confortablement l'autre côté de l'écarteur contre la joue.



4. Utilisez les languettes pour centrer l'écarteur dans la bouche du patient.



5. Vérifiez que la langue du patient est placée confortablement derrière le protège-langue pour garantir un accès facile.



NE placez PAS le protège-langue sur la langue du patient.

COMMENT SAVOIR QUELLE TAILLE UTILISER ?

- Si vous utilisez un porte-empreinte de taille XS, S ou M pour le patient, utilisez l'écarteur de taille moyenne (medium).
- Si vous utilisez un porte-empreinte de taille L ou XL pour le patient, utilisez l'écarteur de grande taille (large).
- En cas de doute, privilégiez la grande taille.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écarteur Umbrella, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour faciliter l'accès, il n'est pas remboursé. Classe I, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.

4870 – Écarteur Umbrella **Medium 5 unités**
 4871 – Écarteur Umbrella **Medium 20 unités**
 5162 – Écarteur Umbrella **Medium 40 unités**

5256 – Écarteur Umbrella **Large 5 unités**
 5257 – Écarteur Umbrella **Large 20 unités**
 5258 – Écarteur Umbrella **Large 40 unités**



DermaDam™

DIGUE EN CAOUTCHOUC



- Faible risque d'allergies cutanées
- Solide et résistant à la déchirure
- Sans poudre pour limiter les réactions allergiques

La digue en caoutchouc DermaDam est en latex pur et sans poudre pour limiter le risque de réactions au latex. Un processus de qualité garantit une faible teneur en protéines de surface.



311 – DermaDam **Medium 0,20 mm 36 unités**
 314 – DermaDam **Heavy 0,25 mm 36 unités**
 15 cm x 15 cm

DermaDam™ Synthétique

DIGUE DENTAIRE



La digue dentaire DermaDam Synthétique n'est pas en latex de caoutchouc naturel mais elle a été conçue pour être aussi souple et durable que les digues fabriquées avec ce matériau.

Aucune protéine sensibilisante



299 – DermaDam **Medium Synthétique 0,20 mm 20 unités**
 330 – DermaDam **Medium Synthétique 0,20 mm 60 unités**
 15 cm x 15 cm

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *DermaDam*, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée comme digue. Elle n'est pas remboursée. Classe I, certifiée Pro-Options AB, Sweden.

InterGuard™

DISPOSITIF DE PROTECTION INTERPROXIMALE



Le dispositif de protection interproximale InterGuard réduit le risque de lésion iatrogène en protégeant les dents adjacentes²⁻³. Les deux extrémités en spire laissent les angles de transition dégagés et n'entravent pas l'accès. Le dispositif de protection interproximale InterGuard en acier inoxydable de 0,1016 mm d'épaisseur est utilisé pour les préparations tunnel et la protection des dents adjacentes lors de l'abrasion par jet.



Orienter les spires vers la dent à préparer. Passer du fil dentaire dans l'orifice et le fixer, comme illustré, pour éviter que le patient n'avale le dispositif InterGuard.



3097 – InterGuard Kit
 5 InterGuard de 4,0 mm et 5 InterGuard de 5,5 mm

InterGuard Recharges

Taille	10 unités	50 unités
4,0 mm	4016	4011
5,5 mm	4017	4012



1. realityesthetics.com. 2. Lenters M, van Amerongen WE, Mandari GJ. Iatrogenic damage to the adjacent surfaces of primary molars, in three different ways of cavity preparation. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2006;1(1):6-10. 3. de la Peña VA, García RP, García RP. Sectional matrix : Step-by-step directions for their clinical use. *Br Dent J.* 2016;220(1):11-14.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *InterGuard*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les préparations tunnel et la protection des dents adjacentes. Il n'est pas remboursé. Classe I, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.



OraSeal™

COMBLEMENT DES CONTRE-DÉPOUILLES



- Adhère en présence d'eau et de salive
- Protection étanche contre l'exposition des gencives au peroxyde ou à l'acide fluorhydrique
- Idéal pour le comblement des espaces non voulus pour la prise d'empreinte
- Adhère efficacement sur les digues en caoutchouc humides, les tissus, les dents et le métal
- Le matériau OraSeal Putty présente une consistance plus ferme que celle du matériau Caulking, ce que certains praticiens préfèrent

Utiliser le matériau OraSeal Caulking lorsqu'il est difficile d'obtenir une étanchéité satisfaisante en présence de dents ou de racines fragilisées. Il peut également servir à réparer les défauts d'étanchéité des digues en caoutchouc. Cette pâte assure l'étanchéité de la digue en caoutchouc lors de la réparation de céramique, protégeant ainsi les gencives de l'acide fluorhydrique. À appliquer dans les contre-dépouilles et sous les barres pour implants, les attachements de précision, etc. pour empêcher les résines autopolymérisables ou le matériau à empreinte de se coincer dans les espaces vides. Comblez les embrasures gingivales des gouttières et des bridges pour faciliter le nettoyage du ciment définitif. Utilisé également pour combler les trous de vis sur les empreintes implantaire avant la prise d'empreinte.



Le matériau OraSeal Caulking permet de corriger les défauts d'étanchéité même si la digue est submergée. L'appliquer sur le pourtour de l'orifice, puis recouvrir l'orifice jusqu'à ce que la fuite soit calfatée.

PROCÉDURE



Appliquer le matériau OraSeal Caulking avec l'embout d'application Black Mini™ ou White Mac pour éviter tout défaut d'étanchéité de la digue en caoutchouc pendant le traitement². Modeler avec un doigt ganté mouillé, un coton mouillé ou un instrument. Il est ensuite possible de procéder au traitement dans un environnement propre et sec.

UTILISATION



Garantir l'étanchéité de la digue en caoutchouc en cas d'utilisation d'un peroxyde puissant pour l'éclaircissement des dents vitales ou d'un acide fluorhydrique pour le mordantage de la céramique.



Comblez les contre-dépouilles sous et autour du clip de prothèse implantoportée. L'élément souple du clip est recouvert de pâte de comblement pour une adaptation à la courbure du clip pendant l'insertion et le retrait.



Contrôle de l'humidité lors du collage de brackets orthodontiques à la mandibule. Appliquer la pâte de calfatage ou de comblement pour éviter l'infiltration de salive dans les embrasures et la contamination de la zone en question.



Comblez les contre-dépouilles larges pour un retrait aisé et sans déformation du matériau à empreinte.



Utiliser OraSeal sous les prothèses partielles fixes ou les barres pour prothèses sur implants avant de réaliser l'empreinte.



Utiliser OraSeal pour le comblement avant l'ancrage des éléments de rétention, clips, etc., avec de la résine autopolymérisable.



352 – OraSeal Kit

- 2 seringues de 1,2 ml (1,28 g) d'OraSeal Caulking
- 2 seringues de 1,2 ml (1,44 g) d'OraSeal Putty
- 4 embouts Black Mini Tips
- 20 embouts White Mac Tips



OraSeal Recharges

Seringue de 1,2 ml	4 unités	20 unités
Caulking (1,28 g)	351	354
Putty (1,44 g)	353	355

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. OraSeal destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.

1. realityesthetics.com. 2. Cohen S, Burns RC. Pathways of the Pulp. 7th ed. St. Louis, MO: Mosby-Year Book; 1998:123-124.



Halo™

SYSTÈME DE MATRICES SECTIONNELLES



Une séparation maximale des dents est obtenue grâce à la force de l'anneau en nitinol et au coinçage actif assuré par les coins. Ce système de séparation idéal vous permet de réaliser facilement une restauration unitaire comme des restaurations qui se touchent. La conception à bec unique de l'anneau Halo permet d'adapter parfaitement la bande à la préparation, du bord gingival à la crête marginale, et de conserver sa forme même en cas de préparation étendue, ce qui contribue à obtenir des restaurations à la forme anatomique. Si les contacts sont parfaits et si les bandes bien ajustées ont une courbure anatomique, vous observerez une réduction du temps consacré à la mise en forme et à la finition. C'est exactement ce que permet le système Halo pour toutes les restaurations.



De beaux résultats en moins de temps

Le système de matrices sectionnelles Halo, facile à utiliser, vous permet de créer en moins de temps de belles restaurations composites aux contours anatomiques.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Halo, système de matrices, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.



4831 – Halo Bandes originales avec jeu d'instruments

2 anneaux universels de chaque taille
25 matrices originales de chaque taille : 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm
25 coins de chaque taille *Small*, *Medium* et *Large*
1 carrousel Halo
1 paire de brucelles
1 pince



4832 – Système de matrices sectionnelles Halo Matrices originales

2 anneaux universels
25 matrices originales de chaque taille: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm
25 coins de chaque taille *Small*, *Medium* et *Large*
1 présentoir Halo

4835 – Système de matrices sectionnelles Halo Matrices originales Mini Kit

2 anneaux universels
5 matrices originales de chaque taille: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm
5 coins de chaque taille *Small*, *Medium* et *Large*
1 présentoir Halo

4833 – Système de matrices sectionnelles Halo Matrices rigides anti-adhésives

2 anneaux universels
20 matrices rigides antiadhésives de chaque taille: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm
25 coins de chaque taille *Small*, *Medium* et *Large*
1 présentoir Halo

4834 – Système de matrices sectionnelles Halo Matrices rigides


2 anneaux universels
25 matrices rigides de chaque taille: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm et 7,5 mm
25 coins de chaque taille: *Small*, *Medium* et *Large*
1 présentoir Halo



POURQUOI CHOISIR UNE MATRICE SECTIONNELLE ?



- Gros piège à nourriture au-dessus
- Échec de la restauration de l'anatomie proximale
- Contact étroit au niveau de la crête marginale
- Risque de fracture, d'interférence occlusale, de caries récurrentes et de maladie parodontale

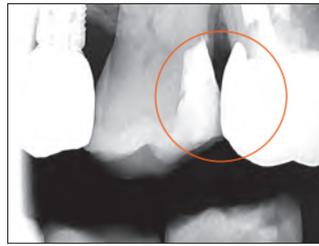

- Système convivial
- Contours naturels
- Points de contact étroits, anatomiquement corrects, avec contour à la bonne hauteur

CAS CLINIQUE DISTO-OCCLUSAL



1. Préop.



2. Préparation avec le système Halo.



3. Postop.

Avec l'aimable autorisation du Dr James Wright.

CAS CLINIQUE DISTO-OCCLUSAL



1. Préop.



2. Préparation avec le système Halo.




3. Postop.

Avec l'aimable autorisation du Dr Brett Richins.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE



1. Choisir la matrice adaptée à la hauteur occluso-gingivale nécessaire. Avec des brucelles, saisir la languette de la matrice et la plier selon les besoins avant de la placer en position interproximale, la surface concave face à la dent à restaurer.

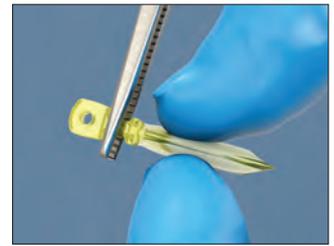

2. Choisir le coin qui adapte au mieux la matrice à la partie gingivale de la préparation. Saisir le coin avec une précelle.



3. Une légère pression du doigt sur la matrice peut être nécessaire pour empêcher son délogement lors de la mise en place du coin.



4. Le cas échéant, il est possible d'utiliser un coin supplémentaire pour une meilleure adaptation à la surface gingivale de la cavité.



5. Placer avec précaution l'anneau Halo avec la pince adaptée.



6. L'anneau doit être placé aussi bas que possible, ses extrémités dentées plaçant le coin à cheval sur la dent.



7. Vérifier le positionnement de la matrice, du coin et de l'anneau pour s'assurer que la matrice est bien adaptée aux bords des surfaces de la cavité et en contact étroit avec la dent adjacente.



Matrices Halo™

MATRICES



- Forme anatomique pour des contacts parfaits
- La courbe au niveau de la crête marginale crée une embrasure occlusale parfaite, réduisant ainsi le temps de finition¹
- Trous pour brucelles pour une mise en place aisée
- Languette souple pour une mise en place et un retrait faciles avec une meilleure visibilité
- Code couleur selon la taille en option pour faciliter l'identification (épaisseur du revêtement en Téflon™ : 0,013 mm)
- Les bandes originales permettent une adaptabilité et un brunissage supérieurs, tandis que les bandes rigides résistent à la déformation et sont parfaites pour les espaces interproximaux étroits
- Les bandes originales et rigides sont en acier inoxydable extra-fin de 0,038 mm

Originale	50 unités	100 unités
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457



Rigide	50 unités	100 unités
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—



Rigide antiadhésive	50 unités	100 unités
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—



Brucelles Halo™

BRUCELLES À ACTION TRANSVERSALE

- Maintien passif des coins et des matrices
- Mise en place et retrait plus faciles des matrices Halo
- Extrémité sphérique pour le brunissage
- Action transversale
- Solidarisation mécanique pour une bonne prise en main et une manipulation en toute sécurité



5048 – Brucelles 1 unité

Anneaux en nitinol Halo™

ANNEAUX UNIVERSELS



- Le nitinol super-élastique maintient la force pendant les procédures et réduit la fatigue cyclique
- Les anneaux peuvent être utilisés plus de 1000 fois
- Les dents en nylon armé de verre ne casseront pas facilement, ne se plieront pas dans la préparation et ne produiront pas de restaurations aux contours insuffisants
- Les contours de l'anneau maintiennent la bande dans une forme naturelle et anatomique, contribuant ainsi à l'élimination des éclats et à la réduction du travail de finition nécessaire¹
- Ce modèle empilable permet d'utiliser les anneaux pour les restaurations MOD et autres restaurations de classe II
- Ces anneaux assurent une séparation idéale pour les restaurations qui se touchent

Taille	1 unité	2 unités
Universelle	5008	5009



Halo™

COIN



- Le coin rigide assure un coinçage actif pour une meilleure séparation tout en étant moins traumatique pour les papilles
- Leur forme creuse permet une mise en place aisée et un empilement des coins lorsqu'il en faut plusieurs
- Des couleurs faciles à distinguer aident à identifier la taille des coins
- Centre pliable pour une adaptation anatomique de la bande

Taille	100 unités
Small	5042
Medium	5043
Large	5044



Pince Halo™

PINCE POUR LA MISE EN PLACE DES ANNEAUX

La fonction de verrouillage et les bras angulés antidérapants de la pince Halo garantissent une stabilité maximale de l'anneau pendant sa mise en place en direction mésiale tout autant que distale.



5047 – Pince Halo 1 unité

1. Données internes. 2. Données internes.



Omni-Matrix™ Sectional

MATRICES SECTIONNELLES ET ANNEAUX




- Création de restaurations selon l'anatomie naturelle
- Bandes fines et souples s'adaptant facilement à toutes les surfaces
- Pas besoin de pinces spéciales pour matrices
- Un anneau pour toutes les formes et tailles de dents
- Anneaux superposables

Les bandes Omni-Matrix Sectional suivent l'anatomie naturelle de la dent tandis que les bras des anneaux assurent le contact avec la dent. La courbure cervicale de la matrice empêche le bord de celle-ci d'accrocher le bord gingival lors de la mise en place. Les anneaux se superposent facilement, ce qui permet de maintenir en même temps les deux côtés de la dent dans une matrice. L'anneau se place aisément avec une pince à digue standard ou avec une pince pour matrices sectionnelles. Les matrices peuvent être utilisées avec des porte-matrices de toute marque.

MODE D'EMPLOI



1. Placer les matrices puis bloquer avec des coins.

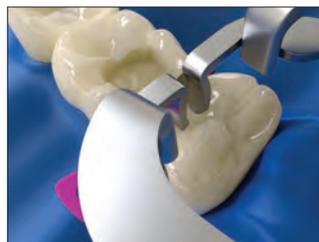

2. Mettre l'anneau en place.




3. Commencer la restauration.



Option : empiler plusieurs anneaux.

RAYON CONSTANT CONTRE DOUBLE COURBURE

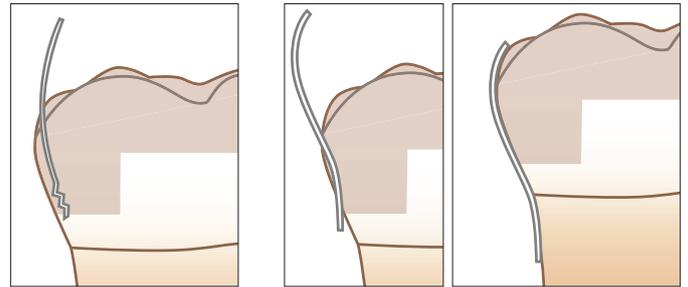

Les matrices sectionnelles classiques accrochent souvent les bords gingivaux. Cela complique la mise en place de la matrice et entraîne souvent sa déformation.

Omni-Matrix Sectional a été conçue sans perdre de vue le contour naturel de la dent, ce qui a permis de supprimer les problèmes habituellement rencontrés avec les matrices classiques.



318 – Omni-Matrix Sectional Kit

4 anneaux de matrice

40 bandes standard, 40 bandes à extension cervicale standard, 40 bandes grand modèle, 40 bandes à extension cervicale grand modèle



317 – Anneaux Omni-Matrix Sectional

4 anneaux de matrice



Taille des bandes	40 unités
Nature	304
Extension cervicale standard	305





Taille des bandes	40 unités
Large	309
Extension cervicale grand modèle	316

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Omni-Matrix Sectional, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.




Omni-Matrix™

MATRICE ET PORTE-MATRICE À USAGE UNIQUE

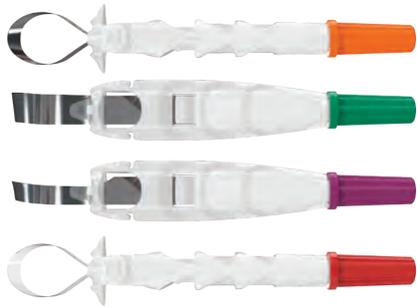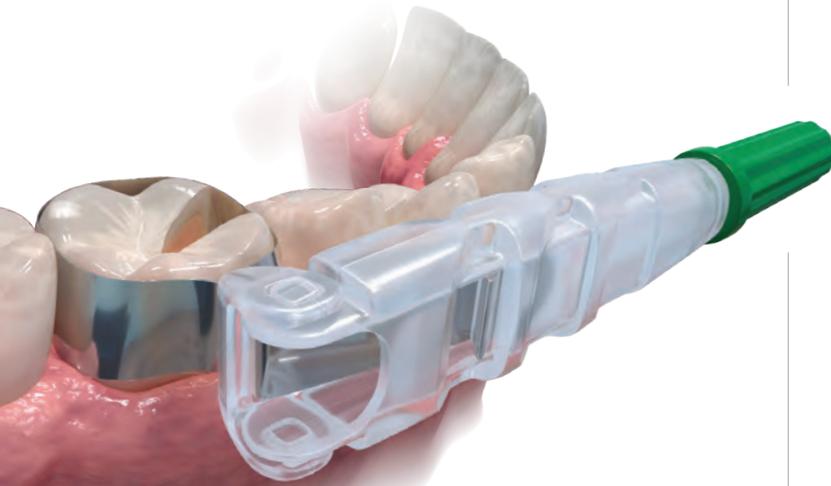


- Forme innovante pour la visibilité pendant la procédure et le confort du patient²
- Acier inoxydable polissable ultra-fin pour une adaptation aux préparations³
- Modèles uniques avec et sans ailettes pour satisfaire les besoins de chaque situation
- Usage unique pour gagner du temps et faire des économies

La matrice avec porte-matrice intégré à usage unique Omni-Matrix est une matrice circonférentielle supérieure. Il s'agit d'un outil de restauration simple conçu pour personnaliser à la perfection toute préparation. La circonférence de la bande s'ajuste facilement en faisant simplement tourner le manche, et la tête pivotante lui permet d'accéder à tous les quadrants de la bouche. Une fois la restauration terminée, la bande Omni-Matrix se retire facilement sans endommager la restauration.

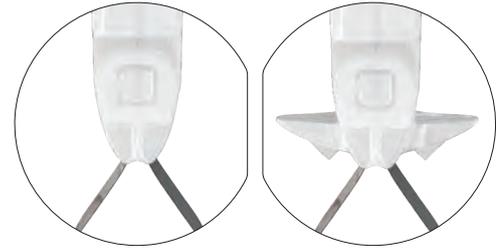


SANS AILETTES

AVEC AILETTES

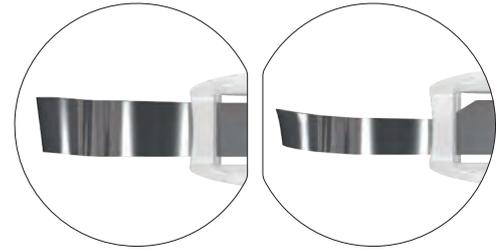

UNIVERSELLE

FINE

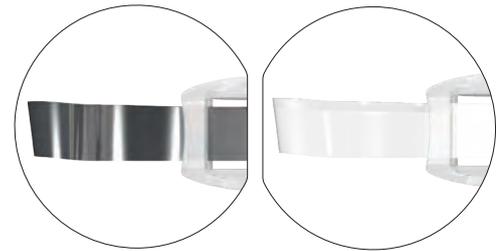

ACIER INOXYDABLE

PET


Acier inoxydable	Sans ailettes 48 unités	Avec ailettes 48 unités
6,5 mm – 0,025 mm	7701	8801
6,5 mm – 0,038 mm	7702	8802
5,2 mm – 0,038 mm	7704	8804

PET	Sans ailettes 48 unités	Avec ailettes 48 unités
6,5 mm – 0,064 mm	7703	8803

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Omni-Matrix* destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.

1. realityesthetics.com. 2. Données internes. 3. Données internes.

TISSUE MANAGEMENT

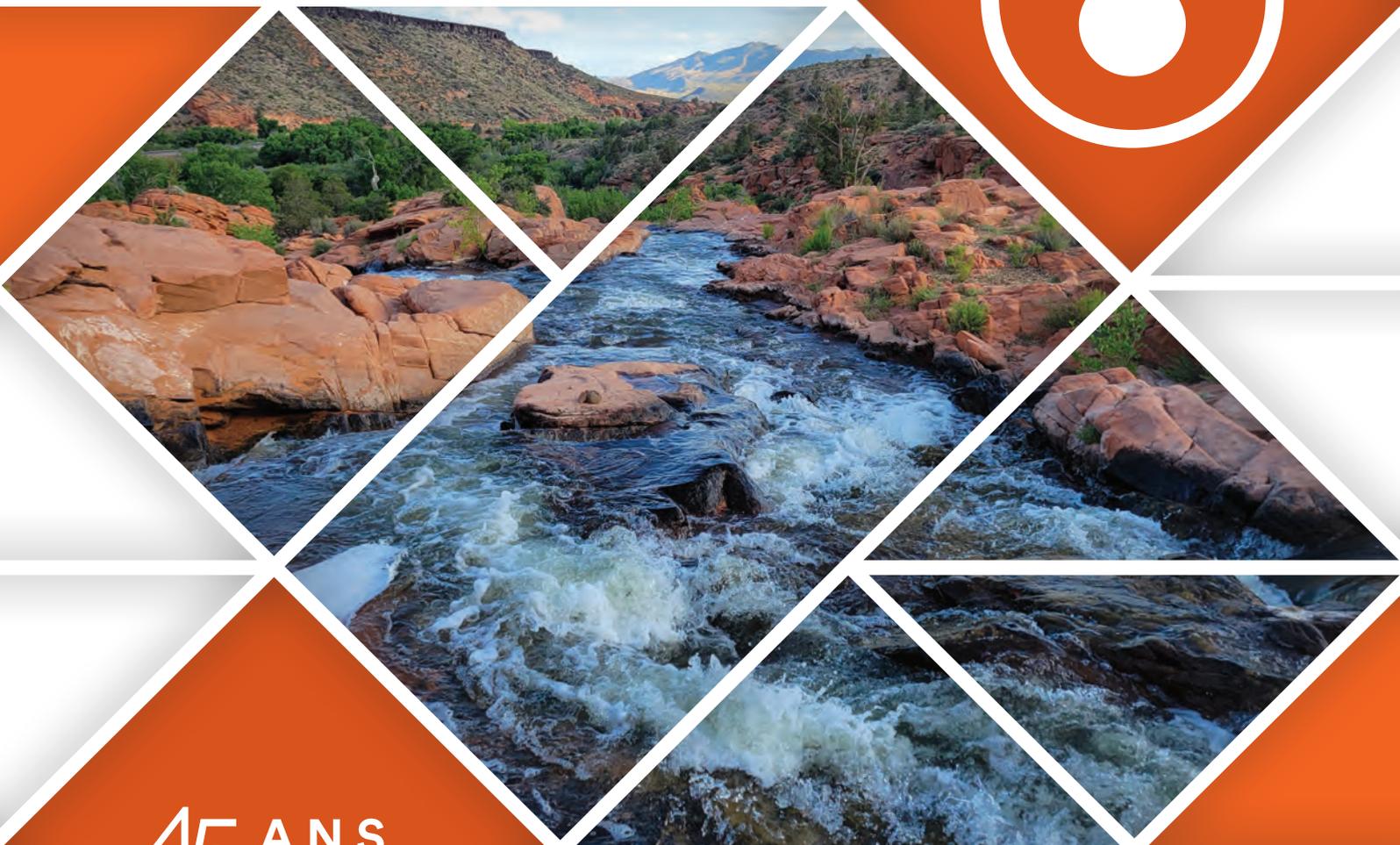

45 ANS
1978-2023

JOHN NESBIT – Gunlock Falls

Sulfate de fer
Chlorure d'alumine
Solution à base de sulfate de fer et de subsulfate de fer
Solution détachante
Fil de rétraction tricoté
Instruments d'insertion



POUR UNE HÉMOSTASE PROFONDE



Tissue Management

La gestion des tissus commence par une hémostase rapide et profonde. Nous proposons depuis plus de 40 ans une gamme de solutions complète pour contrôler les saignements et les fluides sulculaires.

POUR L'HÉMOSTASE ET LE CONTRÔLE DES FLUIDES SULCULAIRES



Réduction du risque de contamination croisée et de la nécessité de stériliser grâce au chargement de la seringue unidose directement à partir de la seringue IndiSpense™.




Frotter fermement la solution hémostatique Viscosrat™, Astringedent™ ou Astringedent™ X sur les tissus hémorragiques pour obtenir l'hémostase.

SULFATE DE FER – HÉMOSTASE ACTIVE



1. Avec l'embout Dento-Infusor™, frotter fermement la solution hémostatique contre les tissus hémorragiques jusqu'à l'arrêt du saignement.

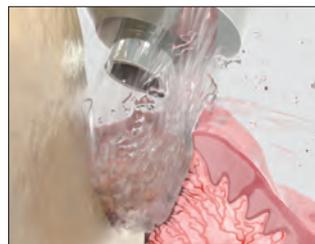

2. Appliquer un jet puissant de seringue air-eau pour éliminer les caillots résiduels et s'assurer qu'une hémostase profonde a été obtenue. Répéter la procédure si le saignement persiste.



3. Une fois l'hémostase totale obtenue, le fil Ultrapak™ tricoté, mis en place avec l'insert-fils Ultrapak™, permet d'obtenir une excellente rétraction.



POUR LE COLLAGE INDIRECT (SCHELLEMENT) RESTAURATION PROVISOIRE DÉPOSÉE



1. Tissu bien cicatrisé 2 semaines après l'intervention.

CONTAMINATION



2. Les fluides sulculaires et le sang sont des contaminants en matière de collage.

SCHELLEMENT/ SÉCHAGE



3. Les solutions hémostatiques telles que celles à base de sulfate de fer et de chlorure d'alumine réduiront ou contribueront à supprimer la perméabilité de l'épithélium - le rendant ainsi imperméable aux fluides sulculaires.

RINÇAGE / SÉCHAGE



4. Mordancer pendant 2 à 3 secondes, puis laver/sécher et poursuivre avec la procédure de collage/scellement.

MISE EN PLACE DE LA PROTHÈSE



5. Coller/sceller la couronne définitive.

POUR LE COLLAGE DIRECT DÉFAUTS MICROSCOPIQUES

Avec l'aimable autorisation du Dr Dan Fischer.



1. Infiltrations sous un composite récemment collé.

COLORATION



2. Au retrait d'une partie du composite, l'étendue des infiltrations apparaît plus nettement. Il y a eu une contamination qui a par conséquent fragilisé le scellement. La solution hémostatique, le sang, le fluide sulculaire, la salive et les sous-produits des bactéries anaérobies peuvent être des sources de contamination. Un retraitement est nécessaire.

ISOLATION



3. Isoler les tissus avec le fil de rétraction Ultrapak™ imbibé de solution hémostatique. Poursuivre avec la procédure de collage.

RESTAURATION



4. Restauration réparée.

CONTRÔLE

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.



1. Pour les restaurations, la solution hémostatique Astringent™ et le fil de rétraction Ultrapak sont parfaits pour contrôler les fluides sanguin et sulculaire et peuvent en outre protéger le tissu contre les fraises. Utiliser une seringue air/eau pour éliminer l'excès de solution hémostatique.

COLLAGE



2. Restauration réussie.

RÉTRACTION POUR FACETTES INDIRECTES



1. L'insertion du fil Ultrapak entraîne rapidement la rétraction des tissus et améliore l'accès pour le scellement de facette indirect.

Remarque : il est impératif de contrôler parfaitement les fluides sulculaires si le collage et le scellement ont lieu près du sulcus¹.

¹ Bailey JH, Fischer DE. Procedural hemostasis and sulcular fluid control : a prerequisite in modern dentistry. *Pract Periodontics Aesthet Dent.* 1995;7(4):65-75 ; quiz 76.



POUR LA PRISE D'EMPREINTE

Un astringent est une substance qui supprime la perméabilité de l'épithélium aux fluides tissulaires. Il en résulte un champ. Une empreinte garantissant des couronnes, des facettes et des bridges ajustés nécessite une détermination précise des limites de la préparation. Cela ne peut être garanti que par une hémostase et une rétraction gingivale fiables.

SAIGNEMENT



1. Préparation sous-gingivale avec saignement sulculaire.

HÉMOSTASE



2. Frotter fermement la solution hémostatique Astringedent™ X contre les tissus hémorragiques avec l'embout Metal Dento-Infusor™.

NETTOYAGE/ VÉRIFICATION



3. Appliquer un fort jet de seringue air/eau pour éliminer les caillots résiduels et s'assurer de la qualité de l'hémostase obtenue.

RÉTRACTION



4. Imbiber le fil Ultrapak™ tricoté de solution hémostatique Astringedent™ X, le mettre en place et le laisser pendant 5 minutes.

SÉCHAGE/ VÉRIFICATION



5. Retirer le fil de rétraction tricoté Ultrapak, rincer ensuite abondamment à la seringue air-eau puis sécher.

PRISE D'EMPREINTE



6. Appliquer le matériau à empreinte

RÉSULTAT




7. Des empreintes de qualité.

« En dentisterie, de nombreux produits et de nombreuses procédures dépendent de la technique utilisée – le conditionnement tissulaire en fait tout particulièrement partie. Bien réalisé, il est exceptionnel ! Les résultats sont visibles presque immédiatement. Mal réalisé, le saignement continue et d'affreux caillots se forment partout. »

– DR DAN FISCHER, DDS


POUR LA PULPOTOMIE VITALE SUR DENTS DE LAIT – APPLICATION ÉLARGIE

HÉMOSTASE

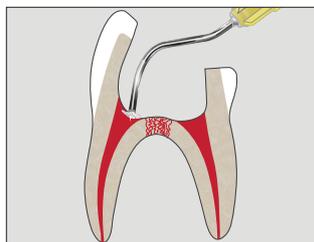


1. Contrôler le saignement. Utiliser l'embout Dento-Infusor avec la solution hémostatique ViscoStat ou Astringedent™1. Utiliser de l'eau stérilisée pour cette procédure.

PROTECTION

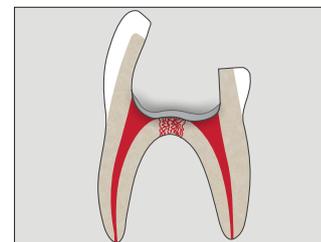


2. Appliquer une fine couche de ciment de réparation MTAFlow™ White sur l'entrée canalair.

BARRIÈRE

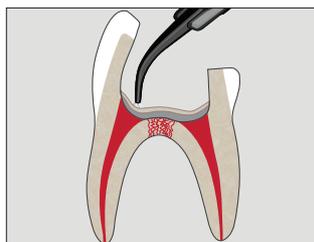


3. Appliquer une fine couche de fond de cavité Ultra-Blend™ plus.

MORDANCER

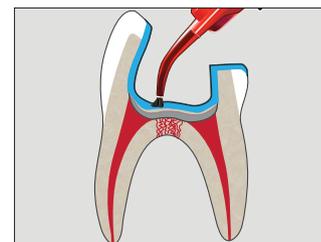


4. Appliquer le gel à base d'acide phosphorique Ultra-Etch™ ou le primer Peak™ SE.

COLLAGE

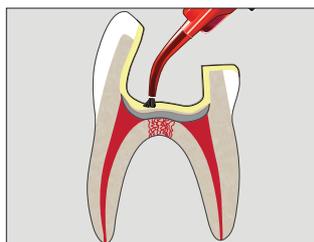

5. Appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond.

RESTAURER

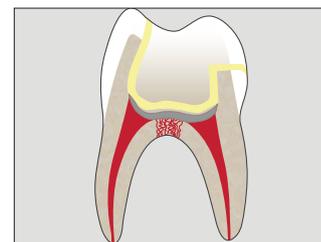


6. Utiliser le matériau de restauration de son choix pour la restauration définitive.


1. Fei AL, Udin RD, Johnson R. A clinical study of ferric sulfate as a pulpotomy agent in primary teeth. *Pediatr Dent.* 1991;13(6):327-32.




POUR LES CAS DIFFICILES

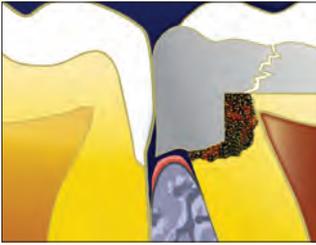


1. Amalgame ancien fracturé. Le patient a mastiqué pendant des mois sur les fragments, ce qui a entraîné une inflammation de la gencive.

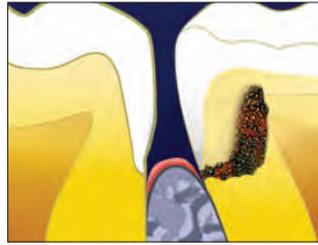

2. Extraire l'amalgame ancien. Conserver la carie pour l'instant comme une barrière au cas où la pulpe serait exposée.

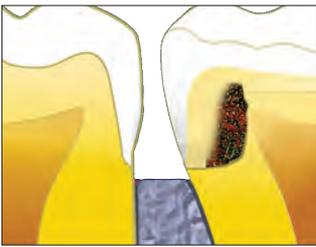

3. Mettre à nu le bord gingival de la restauration avant la mise en place d'une digue en caoutchouc. Passer, si nécessaire, directement à l'étape 4 pour améliorer la visibilité.

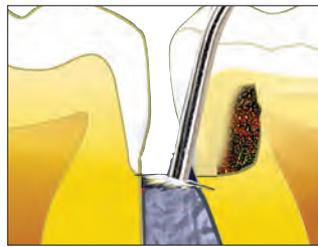

4. Si nécessaire, assurer une hémostase profonde en appliquant la solution hémostatique ViscoStat™ ou Astringedent™ X avec le pinceau de l'embout Metal Dento-Infusor™.



5. Mettre la digue en place et éliminer le tissu carieux résiduel. Traiter, si nécessaire, l'exposition pulpaire. Mordancer et coller avec l'adhésif Peak™ Universal Bond.



6. NE PAS positionner la matrice interdentaire avant d'avoir appliqué la première couche de composite.



7. Insérer tout d'abord la bande matrice pour créer une barrière gingivale, puis mordancer et coller, et enfin appliquer la première couche du composite.



8. Positionner la bande matrice interdentaire après la première couche. Desserrer la bande matrice pour assurer un bon contact interproximal. Placer une couche initiale avec le composite fluide PermaFlo™, puis remplir la cavité avec l'un de nos composites.



Dento-Infusor™ Tip



Il est indispensable d'utiliser l'embout adéquat pour obtenir une hémostase profonde et contrôler les fluides sulculaires.

Les solutions hémostatiques ne sont efficaces que si elles sont correctement appliquées. Les embouts Dento-Infusor permettent d'appliquer les solutions hémostatiques dans les capillaires ouverts. L'extrémité en fibres fait pénétrer la solution hémostatique dans les capillaires par frottement et déloge le caillot. Il en résulte une préparation propre et sèche, idéale pour la prise d'empreintes.

Avec l'aimable autorisation du Dr. Jaleena Jessop.



Le saignement doit impérativement être contrôlé avant de démarrer toute procédure de collage direct.



Une fois l'hémostase profonde obtenue, la préparation est prête pour la restauration.

L'embout Metal Dento-Infusor est, en règle générale, l'embout le plus utilisé avec les solutions hémostatiques ViscoStat™, ViscoStat™ Clear, Astringedent™ et Astringedent™ X. Il peut être utilisé avec suffisamment de pression pour injecter la solution hémostatique dans les capillaires. Si le praticien ne souhaite contrôler que les fluides sulculaires, l'extrémité plus souple de l'embout en plastique Blue Mini™ Dento-Infusor™ sera plus douce pour l'épithélium nouvellement cicatrisé au moment du collage des restaurations définitives sous-gingivales.

Les deux types d'embouts permettent d'appliquer par frottement les solutions hémostatiques dans les tissus de manière ciblée et dosée, ce qui n'est pas possible avec d'autres instruments tels que les boulettes de coton, les micro-applicateurs et les brochettes spéciales.



L'embout permet d'injecter la solution hémostatique à base de sulfate ferrique dans les capillaires pour former une sorte de bouchon, puis d'éliminer le caillot.




L'extrémité ouatée de la brochette évasée de l'embout Metal Dento-Infusor™ permet d'obturer provisoirement l'extrémité des capillaires avec la solution hémostatique en provoquant un gonflement du collagène présent à l'intérieur.

Dento-Infusor Tips, voir page 135.



ViscoStat™

SULFATE DE FER À 20%

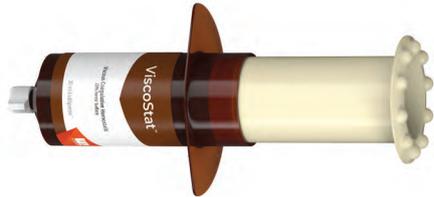

Metal Dento-Infusor™ Tip avec raccord Comfort Hub™



- Assure une hémostase profonde
- Arrête le saignement modéré
- Ne ralentit pas la cicatrisation du tissu dur ou mou
- Pas de contamination par les fluides sulculaires

La solution hémostatique ViscoStat est un agent hémostatique à base de sulfate ferrique à 20 % contenant des agents liants inertes dans une solution aqueuse visqueuse. Elle contient de la silice pyrogénée pour limiter l'activité acide, ce qui la rend douce pour les tissus durs et mous.

La solution hémostatique ViscoStat est indiquée dans différentes procédures dentaires et de chirurgie orale pour arrêter le saignement capillaire de surface. Ces procédures incluent, entre autres, les prothèses fixes, la dentisterie restauratrice, le traitement parodontal. La solution hémostatique ViscoStat est également recommandée pour les obturations à rétro, les canines incluses, les gingivectomies et comme « fixateur » pour les pulpotomies.

Astuce : éviter les infiltrations dues à la contamination par les fluides sulculaires au cours des procédures de collage direct. Imbiber un fil de rétraction Ultrapak™ tricoté de solution hémostatique et isoler les tissus. Rincer ensuite abondamment à la seringue air/eau.

Remarque : ne pas utiliser de préparations à l'adrénaline avec les produits à base de sulfate de fer (ViscoStat, Astringedent, Astringedent X) qui produiraient un précipité bleu/noir.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. ViscoStat, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le traitement des hémostases. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



647 – ViscoStat Dento-Infusor en seringue IndiSpense™ Kit

1 seringue IndiSpense de 30 ml (36,69 g)
20 embouts Metal Dento-Infusor avec raccord Comfort Hub™
20 seringues vides de 1,2 ml



645 – ViscoStat en seringue IndiSpense 1 unité

1 seringue de 30 ml (36,69 g)

Lettres d'information électroniques d'Ultradent

Abonnez-vous gratuitement aux lettres d'information électroniques d'Ultradent pour recevoir les actualités sur les produits, les événements et plus encore.



Scannez le code QR pour vous inscrire dès aujourd'hui !



ViscoStat™ Clear

CHLORURE D'ALUMINE À 25%



Metal Dento-Infusor™ Tip avec raccord Comfort Hub™

- Ne décolore pas la gencive
- Arrête le saignement mineur
- Rinçage facile
- Gel visqueux
- N'interfère pas avec les collages²

L'agent hémostatique ViscoStat Clear se présente sous forme de gel à base de chlorure d'alumine à 25 % dans une solution aqueuse visqueuse. Sa formule à base de silice douce pour les tissus arrête les saignements mineurs. Cela prévient la formation de caillots et empêche les résidus d'adhérer à la préparation, ce qui est particulièrement important dans la région esthétique. Le gel hémostatique ViscoStat Clear ne colorera pas les tissus durs et mous.

Le gel hémostatique ViscoStat Clear est conçu pour la rétraction sulculaire avant la prise d'empreinte ainsi que le contrôle des saignements et des fluides sulculaires en dentisterie restauratrice et opératoire. Il est destiné à une utilisation avec le fil de rétraction Ultrapak et l'embout Dento-Infusor. Ce gel facilite l'insertion du fil dans le sulcus.

6409 – ViscoStat Clear Dento-Infusor en seringue Kit

4 seringues de 1,2 ml (1,42 g)
20 embouts Metal Dento-Infusor avec raccord Comfort Hub™



6407 – ViscoStat Clear Dento-Infusor en seringue IndiSpense™ Kit

1 seringue IndiSpense de 30 ml (38,52 g)
20 embouts Metal Dento-Infusor avec raccord Comfort Hub™
20 seringues vides de 1,2 ml



6408 – ViscoStat Clear en seringue IndiSpense 1 unité

1 seringue de 30 ml (38,52 g)

1. realityesthetics.com. 2. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. ViscoStat Clear, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le traitement des hémostases. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.

PROCÉDURE



1. Préparation sous-gingivale et saignement du sulcus.



2. Frotter fermement le gel hémostatique contre les tissus hémorragiques avec l'embout Dento-Infusor. Le gel transparent assure une bonne visibilité et un rinçage rapide.



3. Placer le fil Ultrapak™ imbibé dans le sillon. Le laisser 5 minutes.



4. Retirer le fil de rétraction. Rincer abondamment à la seringue air/eau. Sécher à l'air comprimé. Le cas échéant, appliquer de nouveau le gel hémostatique par frottement sur le sulcus. Attendre 1 minute. Facilite un contrôle supérieur dans la région esthétique sans coloration gingivale.



5. Restauration achevée 2 semaines postop.





Astringedent™

SULFATE DE FER À 15,5%



- La solution hémostatique « classique »
- Arrête le saignement en quelques secondes
- Pas de contamination par les fluides sulculaires
- Limite les renouvellements de prise d'empreinte

La solution hémostatique Astringedent est une solution aqueuse à base de sulfate ferrique à 15,5 % au pH d'environ 1,0.

« Fortement recommandée comme moyen simple et efficace pour le contrôle des saignements, la gestion des tissus et les pulpotomies. Notée ++++ ». ² La solution hémostatique Astringedent est tout à fait indiquée dans différentes procédures dentaires et de chirurgie orale pour arrêter le saignement. La solution hémostatique Astringedent peut également être utilisée pour éviter les défauts microscopiques dus à la contamination par les fluides sulculaires au cours des procédures de collage direct.

Classée dans la catégorie des produits « IRREMPLAÇABLES » par un important institut de recherche indépendant².

Remarque : les solutions hémostatiques ViscoStat™ et Astringedent doivent être utilisées avec un embout Metal Dento-Infusor™. L'embout en plastique Blue Mini™ Dento-Infusor™ est à privilégier en présence d'un épithélium récemment cicatrisé dans la mesure où l'extrémité plus souple est légèrement moins agressive.



111 – Astringedent en flacon 1 unité
686 – Astringedent en seringue IndiSpense™ 1 unité
30 ml (34,41 g)

1. realityesthetics.com. 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Astringedent/Astringedent X, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour le traitement des hémostases. Ils ne sont pas remboursés. Classe IIa, certifiés TÜV Nord, Ultradent Inc.

Astringedent™ X

SOLUTION À BASE DE SULFATE DE FER ET DE SUBSULFATE DE FER À 12,7%



- La solution hémostatique incontournable pour les praticiens dans toutes les situations
- La solution hémostatique la plus rapide et la plus puissante d'Ultradent¹
- Arrête le saignement mineur à majeur

La solution hémostatique Astringedent X est une solution aqueuse ferrique à 12,7 % qui agit rapidement pour arrêter les saignements compliqués. Elle contient des proportions équivalentes de sulfate ferrique et de subsulfate ferrique. Remarque : la solution hémostatique Astringedent X diluée n'est pas l'équivalent de ViscoStat ni des solutions hémostatiques Astringedent.

Elle est à utiliser lorsqu'une solution hémostatique plus puissante est nécessaire pour obtenir une hémostase de qualité (par exemple dans les cas d'hémorragies problématiques difficiles à stopper).

Avec l'aimable autorisation du Dr Bruce LeBlanc.



La solution hémostatique Astringedent X et l'embout Metal Dento-Infusor facilitent l'obtention d'une hémostase profonde, même dans les cas difficiles.



112 – Astringedent X en flacon 1 unité
690 – Astringedent X en seringue IndiSpense™ 1 unité
30 ml (40,71 g)

1. Données internes.



Ultrapak™

FIL DE RÉTRACTION TRICOTÉ



- Fil de rétraction tricoté
- Assure une rétraction des tissus et des limites définies pour la prise d'empreinte
- Se comprime lors de l'insertion puis se dilate


Le fil de rétraction Ultrapak est constitué à 100 % de coton qui a été tricoté en des milliers de boucles minuscules formant une longue chaîne. Une fois l'hémostase obtenue, ce fil tricoté exerce, après son insertion, une légère pression continue vers l'extérieur à mesure que les boucles cherchent à s'ouvrir. La rétraction des tissus est obtenue en 5 minutes.

Le fil de rétraction Ultrapak peut également être utilisé pour appliquer les solutions à base de sulfate de fer sous les gencives pour le contrôle des fluides sulculaires. Le fil de rétraction Ultrapak a été conçu pour améliorer les techniques de prise en charge des tissus employant les solutions hémostatiques ViscoStat™ et Astringedent™. Les techniques classiques reposant sur l'alun, le chlorure d'alumine, etc., sont également améliorées avec les fils de rétraction tricotés Ultrapak.

Classée dans la catégorie des produits « IRREMPLAÇABLES » par un important institut de recherche indépendant².

COMPARAISON DU FIL ULTRAPAK AVEC LES PRODUITS CONCURRENTS EN MATIÈRE D'ABSORPTION

Pouvoir absorbant du fil de rétraction Ultrapak™ tricoté par rapport aux principaux fils concurrents*.

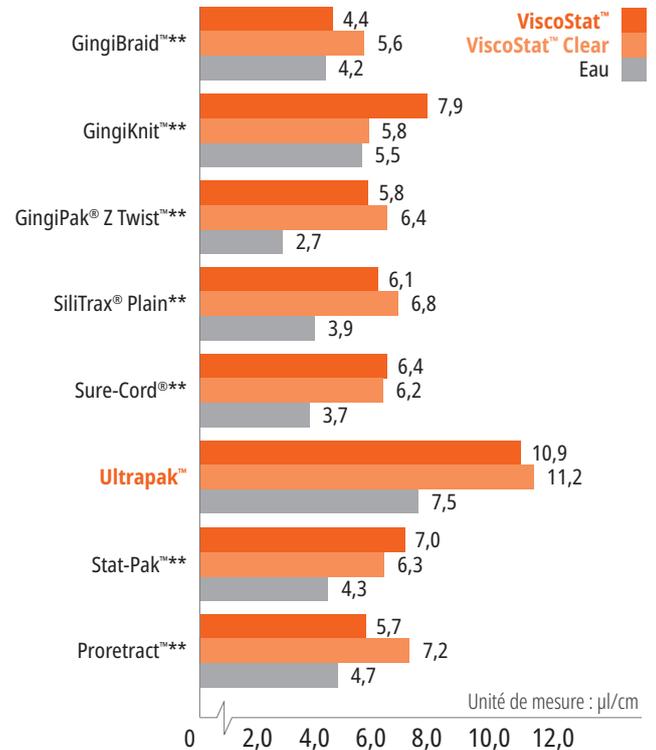

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Ultrapak, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour la rétraction rapide des tissus avant la prise d'empreinte. Il n'est pas remboursé. Classe 1, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.

* Données internes. ** Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.



TECHNIQUE D'INSERTION PRÉALABLE À LA PRÉPARATION

Utiliser un fil suffisamment épais pour une compression ferme dans le sulcus de manière à garantir le bon maintien du fil de rétraction au cours de la préparation.

PRÉ-INSERTION



1. Mettre en place un fil de rétraction Ultrapak™ tricôté imbibé de solution hémostatique d'une taille qui semble légèrement plus grande pour garantir sa rétention. Le Packer Ultrapak™ mince met rapidement le fil en place. La conception unique du fil de rétraction tricôté (boucles formant une longue chaîne) facilite l'insertion et le maintient à l'endroit souhaité.

PRÉPARATION



2. Préparer la limite en sous-gingival en éliminant la partie supérieure du fil qui ne s'entortillera pas autour de la fraise diamantée. Retirer les résidus de fil avec une sonde dentaire ou un autre instrument. Le saignement est mineur, si saignement il y a. Une petite partie de la dent non fraisée au-dessus de l'attache gingivale est préservée pour la prise d'empreinte. Si une rétraction supplémentaire est nécessaire, insérer de nouveau un fil de la taille appropriée. Rincer, sécher à l'air comprimé et prendre l'empreinte.


POUR LES PRISES D'EMPREINTES NUMÉRIQUES – HÉMOSTASE COMPLÈTE

HÉMOSTASE



1. Notamment dans le cas d'une prise d'empreinte numérique, l'hémostase totale est essentielle pour l'ajustement marginal optimal de toute restauration.

CHAMP PROPRE

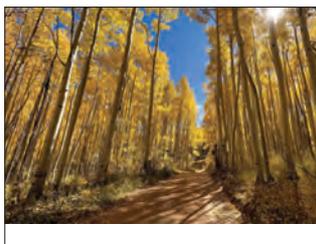

2. Une fois l'hémostase obtenue et le tissu rétracté, la préparation est prête pour la prise d'empreinte numérique.

TECHNIQUE « DOUBLE FIL »

Une rétraction adéquate des tissus et un contrôle suffisant de l'humidité sont les deux paramètres qui rendent le plus souvent difficile l'obtention d'empreintes de qualité. La technique double fil associée à des solutions hémostatiques peut être une option pour atténuer ces difficultés.

PREMIER FIL



1. Une fois l'hémostase obtenue, insérer délicatement un seul fil – par exemple le fil de rétraction Ultrapak™ tricôté taille 0, 00 ou 000 – au fond du sillon. Utiliser les Packers Ultrapak du Dr Fischer pour insérer les fils correctement et efficacement.

DEUXIÈME FIL




2. Insérer un deuxième fil plus épais imbibé de solution hémostatique pour étirer le tissu latéralement.

RINCER/SÉCHER



3. Bien rincer la zone, sécher légèrement et prendre l'empreinte.

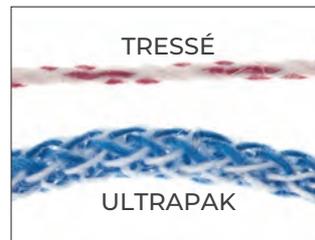

Le fil de rétraction tricôté Ultrapak étant composé de milliers de boucles minuscules entrecroisées, il se comprime et se détend plus facilement que les autres fils de rétraction. Les fibres en coton à 100 % assurent une absorption élevée¹ des agents hémostatiques et des fluides sulculaires.



Le fil de rétraction Ultrapak se comprime lors de son insertion, puis se dilate pour une rétraction optimale des tissus.



Imbibé de solution hémostatique, le fil de rétraction Ultrapak contrôle les saignements et les fluides sulculaires dans les préparations sous-gingivales ou à proximité des gencives.



Le modèle Ultrapak CleanCut est doté d'une lame située dans le couvercle pour une grande efficacité de coupe. Un orifice de distribution spécial empêche le fil de tomber dans le flacon.

1. Données internes.



Chaque flacon contient
244 cm de fil de rétraction.

COMPARAISON DES FILS DE RÉTRACTION

	TAILLE 000 – 0,889 mm
	TAILLE 00 – 1,041 mm
	TAILLE 0 – 1,143 mm
	TAILLE 1 – 1,245 mm
	TAILLE 2 – 1,422 mm
	TAILLE 3 – 1,6 mm

9330 – Ultrapak Kit

1 bobine de chaque taille : 00, 0, 1 et 2
1 support Ultrapak



TAILLE 000 – 0,889 mm

- Premier fil dans la technique « double fil »
- Dents antérieures



9331 – Ultrapak taille 000 1 unité



TAILLE 00 – 1,041 mm

- Préparation et scellement des facettes
- Traitements de restauration en présence de tissus minces fragiles



9332 – Ultrapak taille 00 1 unité



TAILLE 0 – 1,143 mm

- Dents antérieures de l'arcade inférieure
- Obturations profondes à proximité de la papille
- Restaurations de classes III, IV et V
- Deuxième fil dans la technique « double fil »



9333 – Ultrapak taille 0 1 unité



TAILLE 1 – 1,245 mm

- Les fils de rétraction non imprégnés de tailles 1 et 2 sont particulièrement efficaces pour le contrôle et/ou la rétraction des tissus lorsqu'ils sont imbibés de solution hémostatique coagulante avant et/ou après les préparations coronaires
- Fil protecteur lors de la préparation préalable sur dents antérieures



9334 – Ultrapak taille 1 1 unité



TAILLE 2 – 1,422 mm

- Utilisé comme deuxième fil dans la technique « double fil »
- Fil protecteur lors de la préparation préalable



9335 – Ultrapak taille 2 1 unité



TAILLE 3 – 1,6 mm

- Zones à tissus gingivaux assez épais nécessitant une force importante
- Deuxième fil dans la technique « double fil »



9336 – Ultrapak taille 3 1 unité



Remarque : Ne pas utiliser de préparations à l'adrénaline avec les solutions à base de sulfate de fer, y compris les solutions hémostatiques ViscoStat, Astringent et Astringent X, qui produiraient un précipité bleu/noir.



Packers insert-fils Ultrapak™ du Dr Fischer

INSTRUMENTS ULTRA-FINS, À EXTRÉMITÉS CRANTÉES

Ces insert-fils de rétraction facilitent l'insertion du fil de rétraction tricoté Ultrapak™. Leurs bords minces et leurs stries fines pénètrent dans le fil de rétraction et l'empêchent de glisser, réduisant ainsi le risque de lésion de l'attache épithéliale.

Tête inclinée à 45° : insert-fils le plus populaire avec des têtes inclinées à 45° et à trois côtés. L'insertion circulaire autour de la préparation est possible sans avoir besoin de tourner l'instrument de proche en proche. Utiliser le petit modèle sur les dents antérieures mandibulaires et sur les incisives latérales maxillaires.

TÊTE INCLINÉE À 90° ET PARALLÈLE PAR RAPPORT AU MANCHE : identique à l'insert-fils avec tête inclinée à 45°, sauf que l'une des têtes est alignée sur le manche et que l'autre forme un angle droit par rapport au manche.

- 171 – Insert-fils, petit modèle – **tête inclinée à 45° 1 unité**
- 170 – Insert-fils, standard – **tête inclinée à 45° 1 unité**
- 174 – Insert-fils, petit modèle – **tête inclinée à 90° 1 unité**
- 172 – Insert-fils, standard – **tête inclinée à 90° 1 unité**

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les *insert-fils*, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour insérer et comprimer les fils de rétraction. Ils ne pas remboursés. Classe I, certifiés TÜV Nord, Ultradent Inc.



MORDANÇAGE ET ADHÉSIFS



45 ANS
1978-2023

MELISSA AXEN – La Sal

Système automordançant (« sans rinçage »)
Système de mordançage total (« mordançage et rinçage »)
Gel d'acide phosphorique
Primer automordançant
Adhésifs
Adhésif photopolymérisable
Primer pour zircone/métal
Mordançage de la porcelaine
Gel d'acide fluorhydrique
Solution de silane
Fond de cavité à base d'hydroxyde de calcium



Ultra-Etch™

GEL DE MORDANÇAGE AVEC RINÇAGE



Blue Micro™ Tip



Inspirational™ Brush Tip



- Autorégulation sur la dentine²
- Pénètre dans les sillons les plus fins et ne coule pas sur une surface verticale³
- Mise en place précise
- Mordançage et rinçage
- Rinçage facile – ne laisse aucun résidu


La solution de mordançage Ultra-Etch à base d'acide phosphorique à 35% présente la viscosité idéale qui facilite son application précise pour un contrôle supérieur. Elle autorégule sa profondeur de mordançage (profondeur moyenne de 1,9 µm pour un temps de mordançage de 15 secondes)², créant ainsi une zone où les adhésifs peuvent pénétrer pour une force d'adhésion supérieure. Des études montrent que la composition chimique à autorégulation unique du gel de mordançage Ultra-Etch sur la dentine crée une surface optimale pour la pénétration des adhésifs⁴. Malgré sa viscosité, le gel de mordançage Ultra-Etch pénètre dans les sillons des faces occlusales ou les anfractuosités verticales grâce à ses propriétés physiques et chimiques qui favorisent l'action capillaire. Sa viscosité idéale permet le maintien d'une couche qui est suffisamment épaisse pour ne pas sécher prématurément.

Le gel de mordançage Ultra-Etch est indiqué en application sur la dentine et sur l'émail pour obtenir des surfaces de collage optimales. Le gel de mordançage Ultra-Etch peut être utilisé pendant 5 secondes pour éliminer les sels produits par le mordançage de la céramique.

Remarque : ne pas utiliser de gel de mordançage à base d'acide phosphorique sur les métaux ou la zircone car cela réduirait la force d'adhésion.



L'expérience clinique et des évaluations au MEB démontrent que 15 secondes de mordançage donnent un résultat optimal aussi bien sur la dentine que sur l'émail fraisé⁴.

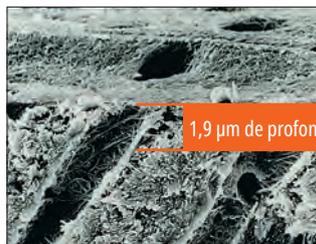

1,9 µm de profondeur

Il a été prouvé que l'acide phosphorique présent dans les gels de mordançage Ultra-Etch autorégule sa profondeur de déminéralisation dentinaire². Les acides atteignant des profondeurs plus importantes vont au-delà du seuil optimal et augmentent les risques de pénétration insuffisante de la résine⁴.



163 – Ultra-Etch Kit
4 seringues de 1,2 ml (1,58 g)
20 embouts Blue Micro Tips

167 – Ultra-Etch Kit économique
20 seringues de 1,2 ml (1,58 g)
40 embouts Blue Micro Tips



383 – Ultra-Etch Kit IndiSpense™ et seringues vides
1 seringue IndiSpense de 30 ml (39,60 g)
20 seringues vides de 1,2 ml
20 embouts Blue Micro Tips



164 – Ultra-Etch en seringue 4 unités
168 – Ultra-Etch en seringue 20 unités
1407 – Ultra-Etch en seringue 50 unités
Seringues de 1,2 ml (1,58 g)



685 – Ultra-Etch en seringue IndiSpense 1 unité
Seringue de 30 ml (39,60 g)



129 – Seringue vide pour Ultra-Etch 20 unités
Seringues vides de 1,2 ml

1. realitysthetics.com. 2. Perdigão J, Lopes M. The effect of etching time on dentin demineralization. *Quintessence Int.* 2001;32(1). 3. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A field emission SEM study of dentin etched with different phosphoric acid compositions and/or concentrations. Katholieke Universiteit Leuven : Leuven, Belgium ; 1994. 4. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997. 5. Syrop J. Tried & True Products : Ultra-Etch. Dental Product Shopper. 2008;2(6):76-77.

1. realitysthetics.com. 2. Perdigão J, Lopes M. The effect of etching time on dentin demineralization. *Quintessence Int.* 2001;32(1). 3. Données internes. 4. Perdigão J, Lambrechts P, Van Meerbeek B, Vanherle G. A field emission SEM study of dentin etched with different phosphoric acid compositions and/or concentrations. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven, Belgium; 1994. Données internes. 5. "Can't Live Without" Clinical Research Associates Newsletter, Volume 21, Issue 7, July 1997.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. UltraEtch, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les techniques du mordançage. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc

Peak™ SE Primer

PRIMER AUTOMORDANÇANT SANS RINÇAGE



Black Mini™ Brush Tip

- Meilleures valeurs d'adhésion lorsqu'il est associé à l'adhésif Peak Universal Bond selon un institut indépendant à but non lucratif consacré à l'évaluation de produits et la formation dentaire²
- Produit frais et stable
- Technique d'application mono-couche simple
- Application précise
- Pas de rinçage nécessaire

Peak SE Primer est un primer automordançant mélangé et appliqué avec la seringue unique JetMix™. La technologie JetMix sépare des quantités précises d'acide puissant (pH 1,2) et de primer optimisé pour éviter l'hydrolyse et la dégradation observées avec les autres agents automordançants. Les composants restent séparés jusqu'à leur activation par le praticien. La composition chimique mixte est stable et permet une utilisation pendant 120 jours. Peak SE Primer est utilisé avant l'adhésif Peak Universal Bond pour obtenir des valeurs d'adhésion inégales.

Idéal pour tous les collages par photopolymérisation, le système adhésif automordançant Peak peut également être utilisé pour le scellement immédiat de la dentine avant la prise d'empreinte et la restauration provisoire dans le but de limiter les sensibilités postopératoire et post-scellement.

POUR COLLAGE INDIRECT




1. Appliquer Peak SE Primer par frottement sur la préparation pendant 20 secondes.



2. Étaler/sécher pendant 3 secondes.



3. Appliquer une dose d'adhésif Peak Universal Bond et frotter pendant 10 secondes sur la dentine.

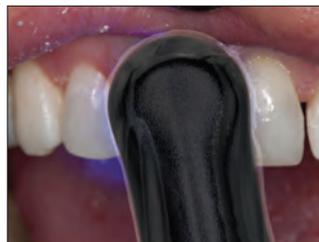

4. Étaler/sécher pendant 10 secondes puis photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Peak SE, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les techniques de collage. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

Valeurs d'adhésion élevées sur la dentine et l'émail³


COMPARAISON DE 3 SYSTÈMES ADHÉSIFS AUTOMORDANÇANTS, UNIVERSITY OF IOWA COLLEGE OF DENTISTRY⁴



Émail traité avec Peak SE Primer vu au microscope à balayage électronique. À noter : l'aspect de trou de serrure des bâtonnets de l'émail mordancé.



Émail traité avec Clearfil® SE Bond vu au microscope à balayage électronique.

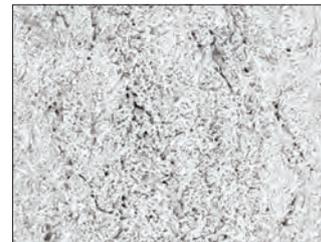

Émail traité avec Adper® Prompt L-Pop vu au microscope à balayage électronique.

RÉFRIGÉRER



5135 – Peak SE Primer Recharge 4 unités
Seringues de 1,0 ml (1,19 g)

RÉFRIGÉRER



4554 – Peak™ Universal Bond Kit Self-Etch de seringues
1 seringue de 1,2 ml (1,35 g) de Peak Universal Bond
1 seringue de 1,0 ml (1,19 g) de Peak SE Primer
20 embouts Black Mini Brush Tips
20 embouts Inspiral Brush Tips

RÉFRIGÉRER



4541 – Peak Universal Bond Kit Self-Etch en flacon
1 flacon de 4 ml (4,5 g) de Peak Universal Bond
4 seringues de 1,0 ml (1,19 g) de Peak SE Primer
40 embouts Black Mini Brush Tips
50 godets de mélange
50 brochettes Micro Applicator

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityratings.com 2. Clinicians Report, Volume 5, Numéro 8, août 2012 3. Données internes. 4. Vargas M. Ultramorphological evaluation of the resin-dentin-enamel interface produced by three proprietary self-etching adhesive systems. 2007. Données internes.



Peak™ Universal Bond ADHÉSIF PHOTOPOLYMÉRISABLE




Embout Inspirational™ Brush Tip



- Mélange de monomères de phosphate Dymetech™ d'Ultradent pour une résistance et une polyvalence supérieures
- Contient de la chlorhexidine à 0,2% pour contribuer à assurer des forces d'adhésion durables²
- Adhère à tous les substrats dentaires
- Idéal pour le collage direct et indirect, ainsi que pour les procédures avec tenons et moignons
- Convient aussi bien pour les techniques en automordançage qu'en mordançage total
- Disponible en seringue ou en flacon

La formule polyvalente de l'adhésif Peak Universal Bond est idéale pour le collage direct et indirect, y compris dans les procédures avec tenons et moignons. Chargé à 7,5 % et contenant un mélange de monomère de phosphate de synthèse sur demande, sa viscosité est optimisée pour une épaisseur de film minime et une résistance supérieure. Ce produit contient un solvant à base d'alcool éthylique et permet la polymérisation avec toutes les lampes à polymériser, y compris les lampes LED.

COMPARAISON DES FORCES D'ADHÉSION³

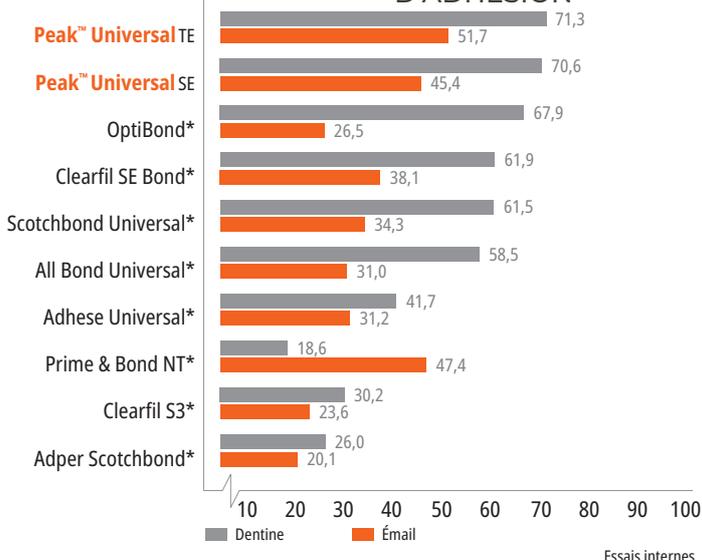

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Peak Universal Bond*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les techniques de collage. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

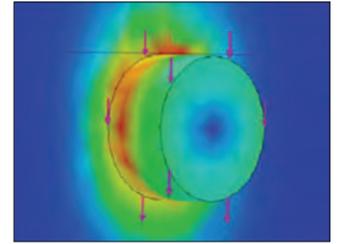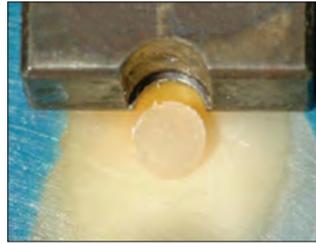

La méthode d'évaluation de la résistance au cisaillement utilisée par Ultradent est devenue une nouvelle norme ISO. De nombreux centres de recherche utilisent aujourd'hui cette méthode pour calculer précisément les forces d'adhésion.

RÉFRIGÉRER



4551 – Peak Universal Bond Kit Total-Etch de seringues

- 1 seringue de 1,2 ml (1,35 g) de Peak Universal Bond
- 1 seringue de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
- 20 embouts Blue Micro Tips
- 20 embouts Inspirational Brush Tips

RÉFRIGÉRER



4542 – Peak Universal Bond Kit Total-Etch en flacon

- 1 flacon de 4 ml (4,5 g) de Peak Universal Bond
- 4 seringues de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
- 40 embouts Blue Micro Tips
- 50 godets de mélange
- 50 brossettes Micro Applicator

RÉFRIGÉRER



4553 – Peak Universal Bond en seringue Recharge 4 unités

4552 – Peak Universal Bond en seringue Recharge

- économique 20 unités
- Seringues de 1,2 ml (1,35 g)

RÉFRIGÉRER

4543 – Peak Universal Bond 1 flacon

- Flacon de 4 ml (4,5 g)



4545 – Godets de mélange 100 unités



* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityratings.com 2. Breschi L, Maravic T, Comba A, et al. Chlorhexidine preserves the hybrid layer in vitro after 10-years aging. *Dent Mater.* 2020;36(5):672-680. doi:10.1016/j.dental.2020.03.009 3. Données internes.

PQ1™

ADHÉSIF MONOCOMPOSANT




Inspiral™ Brush Tip

- Forces d'adhésion élevées² sur la dentine
- Pour le collage direct
- Application facile
- Composants radio-opaques
- Polymérisable avec toutes les lampes à polymériser à usage dentaire

La résine PQ1 est un adhésif monocomposant, photopolymérisable conditionné en seringue avec solvant à base d'alcool éthylique. Cet adhésif est chargé à 40 % et radio-opaque.

Grâce à sa formulation unique brevetée, PQ1 adhère à la dentine/l'émail, aux métaux coulés, à la céramique, à la zircone, à l'amalgame et aux composites. L'adhésif PQ1 s'utilise aussi dans les procédures indirectes lorsque la photopolymérisation est possible.

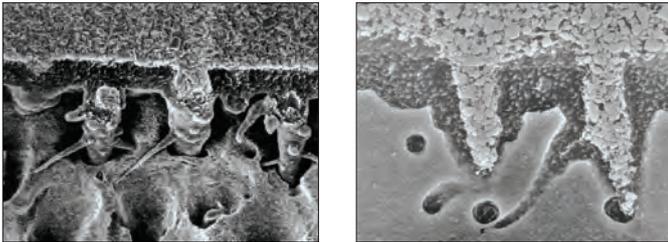

Remarque : pénétration des charges pour l'adhésion.

RÉFRIGÉRER



615 – Kit d'introduction PQ1 en seringue

2 seringues de 1,2 ml (1,67 g) de PQ1
2 seringues de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
20 embouts Blue Micro Tips
40 embouts Inspiral Brush Tips

RÉFRIGÉRER



641 – PQ1 en seringue Recharge 4 unités

641 – PQ1 en seringue Recharge économique 20 unités
Seringues de 1,2 ml (1,67 g)

1. realityesthetics.com. 2. Comparaison de la résistance au cisaillement avec PQ1 immédiatement sur la dentine. 2001. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. PQ1, destiné à une utilisation en cabinet dentaire uniquement, est un adhésif utilisé pour les techniques de collage. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

Peak™-ZM

PRIMER POUR ZIRCONÉ/MÉTAL



Black Mini™ Brush Tip

- Mélange de monomères de phosphate, incluant le monomère MDR.
- Disponible en seringue ou en flacon
- Adhésion sur les restaurations en zircone, alumine et métal.
- Amélioration significative des forces d'adhésion sur les résines¹

Le primer Peak-ZM Zircone/Métal a été développé pour assurer une adhésion entre la surface en zircone ou métal et le matériau de scellement. Grâce à sa formulation contenant le monomère MDP, le primer Peak-ZM multiplie par 5 les forces d'adhésion par rapport à l'utilisation d'une résine seule². Avec Peak-ZM, vous pouvez faire confiance à vos restaurations en zircone comme à celles en métal

Remarque : ne pas utiliser avec le VIMR ni le VI.

RÉFRIGÉRER



2464 – Peak-ZM Zirconia Primer Kit

2 seringues de 1,2 ml (0,79 g) de Peak-ZM
20 embouts Black Mini Brush Tips

RÉFRIGÉRER



2463 – Peak-ZM Zirconia Primer en flacon 1 unité

Flacon de 4 ml (3,2 g)

1. Données internes. 2. Données internes.


DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Peak-ZM, destiné à une utilisation en cabinet dentaire uniquement, est un primer utilisé pour les techniques de collage. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



PRIMER POUR ZIRCONE/MÉTAL PEAK-ZM GUIDE TECHNIQUE




1. Nettoyer, rincer et sécher la préparation. Vérifier l'ajustement de la prothèse en zircone ou en métal.

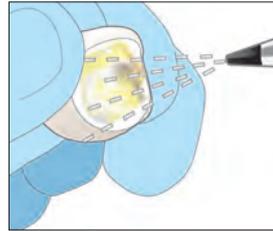

2. Sabler l'intrados avec de l'AlO₂ 50 μm à 3,4-5,5 bars (50-80 psi). La surface doit perdre son éclat uniformément. Nettoyer à l'air comprimé et mettre de côté.

Remarque : la contamination de l'intrados de la prothèse se traduira par une diminution de la force d'adhésion. Cette zone doit rester propre et exempte de gel de mordançage à l'acide phosphorique et de salive.

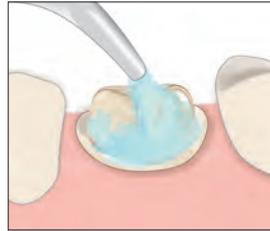


3. Nettoyer la surface de la dent avec un abrasif exempt à la fois d'huile et de fluorure.



4. Appliquer un abrasif par frottement avec une brosse intracronaire pour nettoyer et éliminer tout ciment résiduel. Rincer puis sécher à l'air comprimé.

CHOISIR

TECHNIQUE DE MORDANÇAGE TOTAL

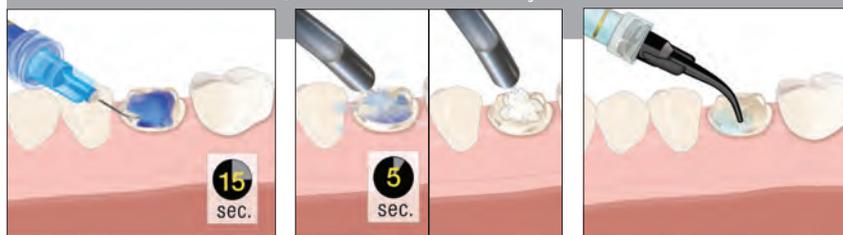

5. Appliquer le gel de mordançage Ultra-Etch™ pendant 15 secondes. Rincer pendant 5 secondes, sécher légèrement de manière à laisser une certaine humidité.

Recommandation : Appliquer une solution antibactérienne sur la préparation, puis aspirer l'excès de solution.


OU

TECHNIQUE D'AUTOMORDANÇAGE



5a. Appliquer le primer Peak™ SE Primer avec l'embout Black Mini™ Brush pendant 20 secondes.

Recommandation : Appliquer une solution antibactérienne sur la préparation, puis aspirer l'excès de solution.

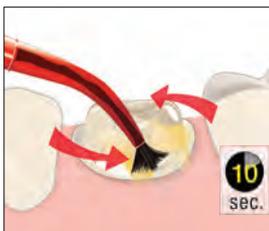


6. Appliquer une dose d'adhésif Peak™ Universal Bond par frottement pendant 10 secondes.



7. Étaler fortement à l'air comprimé et sous aspiration.




8. Photopolymériser l'adhésif Peak Universal Bond pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard.

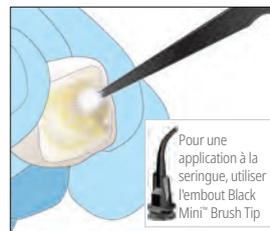

9. Appliquer le primer Peak™-ZM sur la prothèse sablée au jet abrasif pendant 3 secondes, puis étaler/sécher à pression maximale.

Remarque : ne pas utiliser un primer pour zircone en cas de scellement avec un ciment à base de verre ionomère ou de verre ionomère modifié par adjonction de résine.

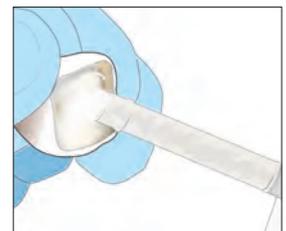

10. Appliquer une fine couche de ciment à base de résine (résine PermaFlo™ DC) sur la prothèse et la loger fermement en place. Polymériser en suivant les instructions. Éliminer le ciment en excès.

TRANSCEND™

UNIVERSAL COMPOSITE

Restaurations avec UNE SEULE TEINTE

Le composite universel Transcend permet une correspondance des teintes sans précédent avec une seule teinte Universal Body, grâce à sa technologie brevetée Resin Particle Match™ qui élimine la nécessité d'une teinte bloquante ou d'un opaquer.



La dyschromie profonde liée à l'amalgame représente l'une des situations de restauration les plus difficiles pour les praticiens. Dans ce cas, le composite Transcend teinte Universal Body a été utilisé seul pour remplacer l'amalgame, sans nécessité d'une teinte bloquante. À noter, l'excellente harmonie des teintes de l'arête oblique préservée.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur Transcend Universal Composite ou rendez-vous sur ultradent.eu/transcend



Voir pages 68-69.



Ultradent™ Porcelain Etch et Silane

90 secondes Etch – 60 secondes Silane



Inspiral™ Brush Tip




Black Mini™ Brush Tip

- Permet d'obtenir des forces d'adhésion élevées sur céramique²
- Silane est une solution monocomposant
- Pour les restaurations feldspathiques et en disilicate de lithium (IPS e.max®*)

Ultradent Porcelain Etch est un gel d'acide fluorhydrique visqueux tamponné à 9 %. Silane est une solution monocomposant.

Porcelain Etch est conçu pour le mordançage intra- et extra-oral de la céramique. Il s'utilise pour le mordançage préalable des restaurations indirectes telles que les facettes, les inlays, etc. Après le mordançage de la céramique, éliminer les résidus avec le gel de mordançage Ultra-Etch™ pendant 5 secondes puis rincer abondamment avant d'appliquer Silane. Des études ont montré que la solution Silane permet d'obtenir, lorsqu'elle est associée à Porcelain Etch et à un adhésif de qualité, des forces d'adhésion supérieures à celles d'autres adhésifs pour céramique².

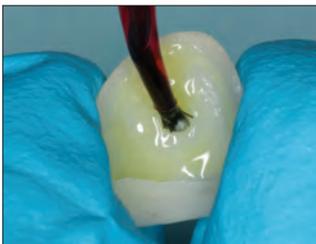

1. Mordançer la surface de collage en céramique avec Porcelain Etch pendant 90 secondes, puis rincer et sécher.




2. Appliquer le gel de mordançage Ultra-Etch™ pendant cinq secondes pour éliminer les sels de silice et les débris résultant du mordançage à l'acide fluorhydrique.




3. Appliquer une dose de Silane sur l'intrados de la prothèse pendant 60 secondes, puis sécher et mettre de côté. Ne pas rincer. La prothèse est à présent prête pour le scellement.


Avec l'aimable autorisation du Dr. Cornelis Pameijer.

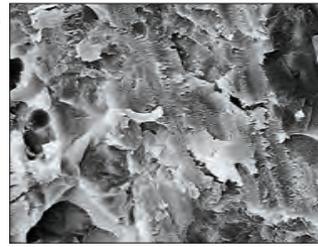


1. Surface de céramique fraîsée.

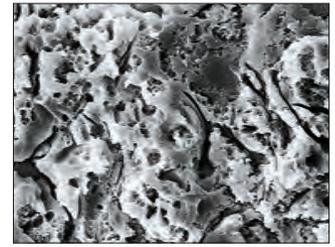


2. Môme surface après 90 secondes de mordançage avec Ultradent Porcelain Etch.

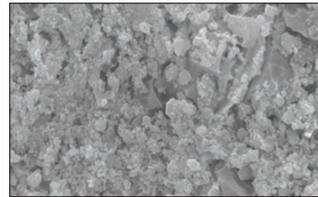

Résidus de sels de silice sur la céramique après mordançage à l'acide fluorhydrique pendant 90 secondes avec Ultradent Porcelain Etch.

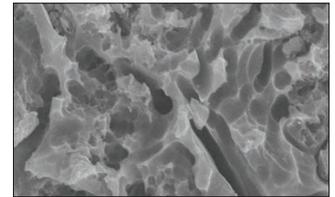

Utiliser le gel de mordançage Ultra-Etch pendant 5 secondes puis rincer pour éliminer les résidus et obtenir une surface propre pour le collage.

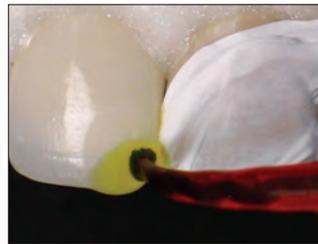

1. Appliquer Porcelain Etch avec l'embout Inspiral Brush sur la céramique préparée.



2. Après l'élimination des sels de silice avec Ultra-Etch, appliquer et sécher Ultradent™ Silane, puis appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond.



405 – Kit Porcelain Etch

- 2 seringues de 1,2 ml (1,33 g) de Porcelain Etch
- 2 seringues de 1,2 ml (0,96 g) de Silane
- 20 embouts Black Mini Brush Tips
- 20 embouts Inspiral Brush Tips



406 – Porcelain Etch en seringue 2 unités

407 – Porcelain Etch en seringue 4 unités

Seringues de 1,2 ml (1,33 g)



410 – Silane en seringue 2 unités

Seringues de 1,2 ml (0,96 g)

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Pameijer CH, Louw NP, Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. *J Amer Dent Assoc.* 1996;127(2):203-9.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Porcelain Etch, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est conçu pour le mordançage intra- et extra-oral de la céramique. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



Ultradent™ Porcelain Repair Kit

GEL DE MORDANÇAGE, SILANE, ADHÉSIF
ET COMPOSITE FLUIDE



- Comprend tous les produits nécessaires avant la mise en place du composite
- Permet d'obtenir les forces d'adhésion les plus élevées sur céramique²
- Réparations rapides et faciles sans mélange

Les procédures de réparation de la céramique se vulgarisent. Il est plus économique et moins invasif de réparer un éclat sur une restauration en céramique que de la remplacer. Le coffret de réparation Porcelain Repair Kit d'Ultradent comprend tous les produits et embouts nécessaires pour les réparations composite sur céramique, céramique sur métal et céramique sur céramique.

Jugé excellent par un important institut de recherche indépendant³.



1108 – Ultradent Porcelain Repair Kit – seringue

- 1 seringue de 1,2 ml (2,30 g) de PermaFlo Dentin Opaquer
- 1 seringue de 1,2 ml (1,58 g) d'Ultra-Etch
- 1 seringue de 1,2 ml (1,34 g) d'OpalDam
- 1 seringue de 1,2 ml (1,35 g) de Peak Universal Bond
- 1 seringue de 1,2 ml (1,33 g) de Porcelain Etch
- 1 seringue de 1,2 ml (0,96 g) d'Ultradent Silane
- 20 embouts Black Mini Brush
- 20 embouts Blue Micro
- 20 embouts Micro 20 ga
- 20 embouts Inspirational Brush

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Porcelain Repair Kit, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est conçu pour le mordançage intra- et extra-oral de la céramique. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

1. realityesthetics.com. 2. Pameijer CH, Fischer D. Repairing fractured porcelain : how surface preparation affects shear force resistance. J Amer Dent Assoc. 1996 ; 127(2):203-9. 3. Clinical Research Associates Newsletter, Volume 24, Issue 11, November 2000.

RÉPARATION DE CÉRAMIQUE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Remarque : ces instructions succinctes ont uniquement pour but de fournir un aperçu de la méthode. Elles ne doivent en aucun cas remplacer les instructions fournies avec les différents produits. Prière de lire attentivement avant emploi les instructions et avertissements fournis dans les notices accompagnant les différents produits.

Placer, si nécessaire, une digue en caoutchouc et/ou recouvrir les dents et gencives environnantes avec la barrière à base de résine photopolymérisable OpalDam™ à l'aide d'un embout Black Mini™. Photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard.



↓
Dépolir par microsablage les surfaces de céramique et/ou de métal à réparer à l'aide d'un système de micro-abrasion contenant des particules d'oxyde d'alumine de 50 µm pendant au moins 60 secondes. On peut aussi utiliser une fraise diamantée (procédure toutefois moins efficace).

↓
Option : Appliquer Porcelain Etch avec un embout Inspirational™ Brush sur la surface de céramique fracturée.



↓
Mordancer la surface pendant 90 secondes, puis aspirer le gel et rincer avec précaution au spray d'eau.

↓
Option : Appliquer le gel de mordançage Ultra-Etch™ pendant 5 secondes pour éliminer les sels de silice.



↓
Rincer et bien sécher à l'air comprimé la surface fracturée.

↓
Appliquer Silane sur la surface de céramique fracturée avec un embout Black Mini Brush™.



↓
Laisser évaporer pendant 1 minute, puis finir de sécher avec un jet d'air comprimé doux.

↓
Appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond avec un embout Inspirational Brush sur les surfaces fracturées. Étaler doucement mais soigneusement à l'air comprimé. NE PAS frotter.



↓
Photopolymériser l'adhésif Peak Universal Bond pendant 10 secondes avec une lampe à polymériser à LED VALO.



↓
Recouvrir le métal apparent d'une fine couche de composite PermaFlo™ Dentin Opaquer avec un embout Micro 20 ga, puis photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard. Si une autre lampe à polymériser est utilisée, polymériser en suivant les instructions du fabricant.



↓
Pour réparer la fracture, la recouvrir par stratification de composite photopolymérisable.



↓
Réaliser la finition et le lustrage de la réparation.



Ultra-Blend™ plus

FOND DE CAVITÉ DENTINE ET BASE PROTECTRICE




Black Micro™ Tip

Black Mini™ Tip

- Fond de cavité bioactif¹ et matériau pour coiffage pulpaire
- Libération de calcium supérieure²
- Photopolymérisable
- Conditionnement en seringue pour une application précise
- Pas de mélange à réaliser
- Ne se dissout pas avec le temps
- Radio-opaque
- Hautement chargé
- Pour couvrir le ciment MTAFlow et coiffer la pulpe avant la restauration

Le fond de cavité Ultra-Blend plus est un matériau photo-actif radio-opaque contenant de l'hydroxyde de calcium dans une matrice de diméthacrylate d'uréthane (UDMA). Pour le coiffage pulpaire et ne se dissout pas avec le temps. Le fond de cavité Ultra-Blend plus est hautement chargé pour un retrait minimal.

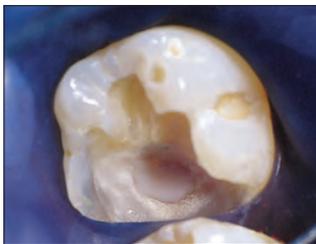


Fond de cavité Ultra-Blend plus pour coiffage pulpaire.


DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Ultra-Blend Plus destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

1. Pameijer CH, Stanley HR. The disastrous effects of the "total etch" technique in vital pulp capping in primates. *Am J of Dent.* 1998;11:45-54. 2. Données internes.

MATÉRIAU PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR COIFFAGE PULPAIRE

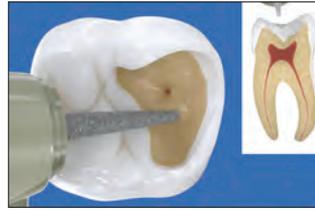

1. Petite exposition – Le fond de cavité Ultra-Blend plus s'utilise pour les zones proches de la pulpe (rose) et les petites expositions pulpaire non hyperhémiques. Pour une exposition plus importante et/ou une hyperémie pulpaire, il convient d'envisager un traitement endodontique.

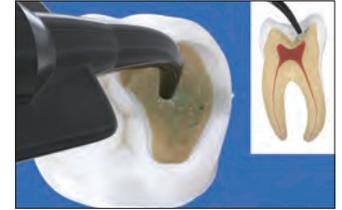


2. Solution antibactérienne – Appliquer une solution antibactérienne avec l'embout en plastique Blue Mini™ Dento-Infusor™ ou l'embout brosette Black Mini™ pendant 60 secondes. Ne pas frotter. Sécher à l'air comprimé.



3. Ciment MTAFlow™ – Facultatif : si l'exposition est plus large qu'un trou d'épingle, appliquer le ciment MTAFlow™ par-dessus et légèrement autour de l'exposition pulpaire. Éliminer le matériau en excès avec une boulette de coton sèche.



4. Ultra-Blend plus liner – Appliquer le fond de cavité Ultra-Blend plus avec l'embout Black Micro™ dans le but de sécher la dentine pour le coiffage pulpaire direct ou indirect, puis photopolymériser. Recouvrir le minimum de dentine pour en garder le maximum pour l'adhésif.

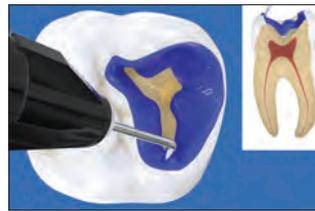

5. Agent de mordantage Ultra-Etch – Appliquer la solution de mordantage à base d'acide phosphorique à 35 % Ultra-Etch™ pendant 15 secondes. Aspirer, rincer et sécher mais en veillant à laisser une certaine humidité. REMARQUE : Le cas échéant, appliquer une solution antibactérienne avant le collage, puis appliquer de nouveau pendant 60 secondes. Sécher jusqu'à ce que la dentine soit légèrement humide, puis passer à l'agent adhésif.



6. Adhésif dentinaire/adhésif Peak Universal Bond – Appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond avec l'embout Inspirall™ Brush, par brosse sur l'émail et frottement sur la dentine pendant 10 secondes. Étaler à l'air comprimé à pression moyenne pendant 10 secondes puis photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard. Restaurer avec un composite de qualité.



415 – Ultra-Blend plus Kit de seringues

- 2 seringues de 1,2 ml (1,64 g) de Dentin
- 2 seringues de 1,2 ml (1,64 g) d'Opaque White
- 20 embouts Black Micro Tips
- 20 embouts Black Mini Tips



- 416 – Ultra-Blend plus Dentin en seringue 4 unités
 - 417 – Ultra-Blend plus Opaque White en seringue 4 unités
- Seringues de 1,2 ml (1,64 g)

RESTAURATION



45 ANS
1978-2023

ANNA GRAY – Lake Blanche

Universal Composite
Composite fluide
Composite Wetting Resin
Système de gabarits pour composites directs



Transcend™ COMPOSITE UNIVERSEL




- La teinte Universal Body se fond magnifiquement dans presque toutes les teintes dentaires
- Aucune teinte bloquante nécessaire
- Technologie exclusive Resin Particle Match™
- La teinte Universal Body continue de correspondre à la structure dentaire environnante même après un éclaircissement¹
- Excellentes propriétés mécaniques et optiques
- Consistance idéale, facile à sculpter¹
- Haute polissabilité¹
- Teintes supplémentaires Enamel (émail) et Dentin (dentine) pour les cas situés dans la région antérieure esthétiquement plus exigeants
- Fluorescence identique à celle de la dent naturelle¹

RESIN PARTICLE MATCH

Le composite Transcend vous permet d'achever les restaurations avec une seule teinte. Grâce à la technologie Resin Particle Match d'Ultradent, les indices de réfraction de la résine et des particules fonctionnent ensemble pour permettre au composite Transcend de se fondre dans la teinte des dents environnantes. Cela signifie que vous pouvez utiliser la teinte Universal Body du composite Transcend presque partout dans la bouche en ayant l'assurance qu'il aura un aspect naturel et esthétique, même dans le cas de restaurations étendues. Le composite Transcend se caractérise en outre par des propriétés idéales pour sa manipulation et sa mise en forme².

RESTAURATIONS AVEC UNE TEINTE

AVANT ET APRÈS

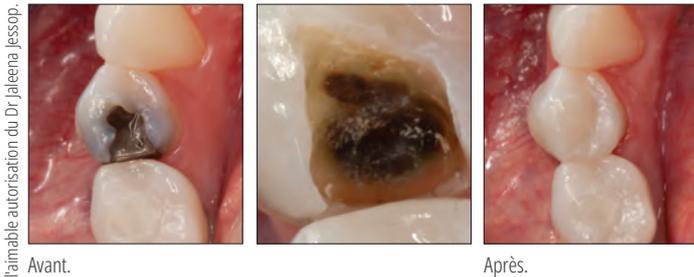

Avant.

Après.



Avant.

Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.

Avec l'aimable autorisation du Dr Yo-Han Choi.



Avant.



Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Rafael Beolchi.



Avant.



Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Gary Findley.



Avant.



Après.

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.



Avant.



Après.

EN HARMONIE PERMANENTE AVEC LA STRUCTURE DENTAIRE ENVIRONNANTE



Il est possible qu'aucune nouvelle restauration composite ne soit nécessaire une fois le traitement d'éclaircissement terminé sur les dents préalablement restaurées avec le composite Transcend dans la mesure où sa teinte peut s'adapter d'elle-même pour toujours correspondre aux propriétés optiques des dents environnantes à mesure que les dents s'éclaircissent³.

DISPOSITIF MEDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Transcend, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les restaurations antérieures et postérieures. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

1. Données internes. 2. Données internes. 3. Données internes.



nouveau

PRÉSENTATION TECHNIQUE¹

	TRANSCEND UB
Résistance à la compression	450,7 MPa
Dureté	60,3 HK
Résistance à la flexion	156,17 MPa
Module d'élasticité en flexion	11,85 GPa
Rétraction de polymérisation	1,60 %
Brillant initial	93,5 UB
Brillant final	91,2 UB
Profondeur de polymérisation	2,85 mm
Radio-opacité	3,2 mm-Al
% de charge en volume	60-61 %
% de charge en poids	79 %

TEINTE UNIVERSAL BODY



4733 – Transcend Seringue UB 1 unité

1 seringue de 4 g en teinte Universal Body

4734 – Transcend Seringue UB 4 unités

4 seringues de 4 g en teinte Universal Body



4757 – Transcend Unidoses UB 1 unité

10 unidoses de 0,2 g en teinte Universal Body

4817 – Transcend Unidoses UB 4 unités

40 unidoses de 0,2 g en teinte Universal Body

Associez Composite Wetting Resin à n'importe quel composite d'Ultradent pour améliorer le glissement de l'instrument sur le composite pendant l'application et la mise en forme.



3059 – Composite Wetting Resin Seringue 2 unités

2 seringues de 1,2 ml (1,85 g)

TEINTES SUPPLÉMENTAIRES



Transcend Seringue 4 g

Dentine	1 unité	Émail	1 unité
A1D	4727	Enamel Neutral	4731
A2D	4728	Enamel White	4732
A3D	4729		
B1D	4730		

1 seringue de 4 g



Transcend Unidoses 0,2 g

Dentine	1 unité	Émail	1 unité
A1D	4744	Enamel Neutral	4748
A2D	4745	Enamel White	4749
A3D	4746		
B1D	4747		

10 unidoses de 0,2 g



4726 – Transcend Kit d'introduction Seringues

1 seringue de 4 g de chaque teinte :
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB



4814 – Transcend Kit d'introduction Unidoses

10 unidoses de 0,2 g de chaque teinte :
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB

1. Données internes.



Mosaic™

COMPOSITE UNIVERSEL




- Consistance lisse et souple
- Sculptable et ne colle pas aux instruments
- Ne s'écoule ni ne s'affaisse après sa mise en forme
- Permet un temps de travail suffisant sous lumière ambiante


Le composite Mosaic peut être utilisé quels que soient les objectifs de restauration, basiques et complexes. Sa formule nanohybride est composée de céramique de verre de zircone-silice et de silice de 20 nanomètres. La charge est de 68 % en volume pour les teintes dentine et 56 % pour les teintes émail.

Le composite Mosaic est utilisé pour les restaurations directes et indirectes (inlays, onlays et facettes) dans les régions antérieure et postérieure.

VINGT TEINTES INTUITIVES POSSIBLES DONNENT DES RÉSULTATS PRÉDICTIBLES À L'ASPECT NATUREL.

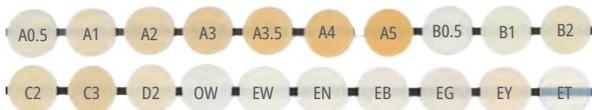


	A0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5 B0.5, B1, B2, C2, C3, D2	DENTINE
	Enamel Blush Enamel Neutral Enamel Yellow Enamel Gray Enamel White	ÉMAIL
	Enamel Trans	TRANSLUCIDE
	Opaque White	OPAQUE

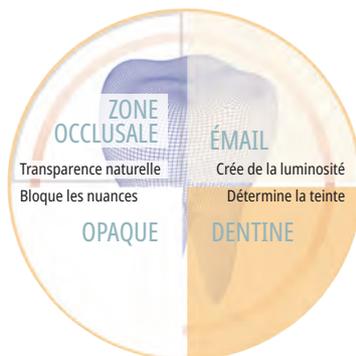

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Mosaic*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour la restauration sur dents naturelles. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

PARFAITEMENT SCULPTABLE

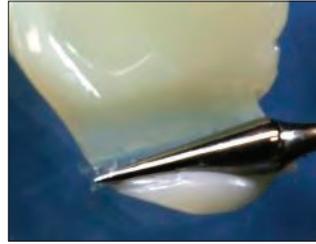

AVANT ET APRÈS



Avec l'aimable autorisation du Dr. Rafael Beolchi.

Restauration esthétique avec les teintes composites Mosaic : A4, A3, A2 et A1 de la partie cervicale à la partie incisale. Enamel White et Opaque White sur le bord incisif. La teinte universelle convient pour les restaurations des classes I à V, tant dans la région antérieure que postérieure.

PROCÉDURE



Avec l'aimable autorisation du Dr. Gaetano Paolone.

1. Restauration de classe II, vue préopératoire.

2. Préparation avec mise en place de la matrice.



3. Crête marginale réalisée avec la teinte Enamel Neutral.

4. Teinte dentine A5 utilisée pour la couche initiale.



5. Teinte Enamel Neutral utilisée pour la couche finale.

Restauration de classe II avec le système adhésif Peak™ Universal Bond et les teintes composites Mosaic A5 et Enamel Neutral.



PRÉSENTATION TECHNIQUE²

	TEINTES DENTINE	TEINTES ÉMAIL
Rétraction	2,6 %	3,7 %
Contrainte due à la rétraction	3,9 MPa	6,1 MPa
Résistance à la compression	486,4 MPa	447,6 MPa
Dureté	66,9 HK	65,4 HK
Résistance à la flexion	166,1 MPa	176,7 MPa
Module d'élasticité en flexion	17,3 GPa	11,7 GPa
Absorption d'eau	≤ 40 µg/mm ³	≤ 40 µg/mm ³
Hydrosolubilité	≤ 7,5 µg/mm ³	≤ 7,5 µg/mm ³
Radio-opacité	≥ 2 mm Al (200 %)	≥ 2 mm Al (200 %)
Temps de travail (lumière ambiante)	4 min	4 min
Profondeur de polymérisation	2 mm	2 mm
% d'obturation en volume	68 %	56 %

Des performances équilibrées garantissent durabilité fonctionnelle et longévité esthétique.




4803 – Teintier Mosaic – 20 teintes
A0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B0.5, B1, B2, C2, C3, D2, EY, EB, EG, EN, EW, OW, ET

Mosaic™ en seringue de 4 g

Dentine	1 unité	Émail	1 unité
A0.5	4760	Enamel Yellow	4773
A1	4761	Enamel Blush	4774
A2	4762	Enamel Gray	4775
A3	4763	Enamel Neutral	4776
A3.5	4764	Enamel White	4777
A4	4765	Enamel Trans	4779
A5	4766	Opaque White	4778
B0.5	4767		
B1	4768		
B2	4769		
C2	4770		
C3	4771		
D2	4772		



x 1

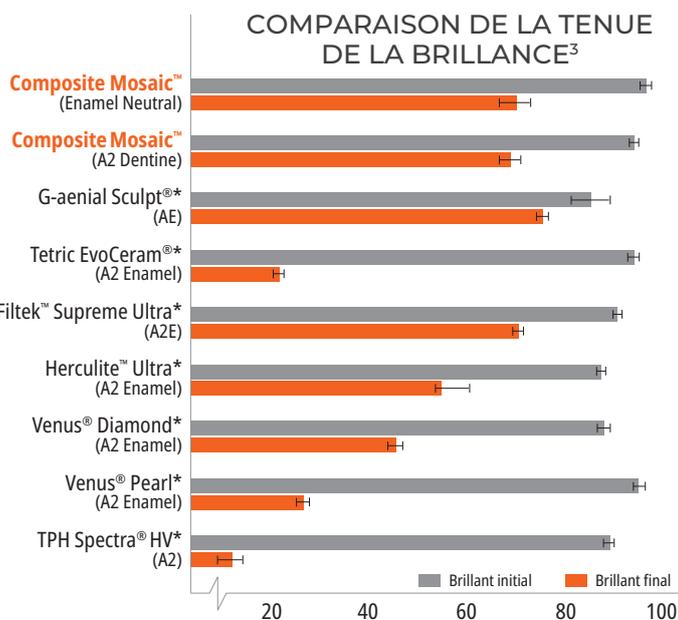


Mosaic™ en capsule unidose de 0,2 g

Dentine	10 unités	Émail	10 unités
A0.5	4799	Enamel Yellow	4792
A1	4780	Enamel Blush	4793
A2	4781	Enamel Gray	4794
A3	4782	Enamel Neutral	4795
A3.5	4783	Enamel White	4796
A4	4784	Enamel Trans	4798
A5	4785	Opaque White	4797
B0.5	4786		
B1	4787		
B2	4788		
C2	4789		
C3	4790		
D2	4791		




x 10

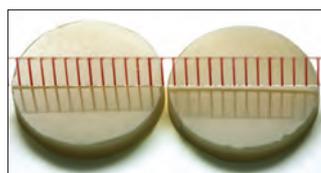

Composite Mosaic poli avant brossage

Composite Mosaic après 10 000 cycles de brossage

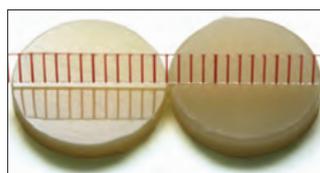

Composite concurrent poli avant brossage

Composite concurrent après 10 000 cycles de brossage

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realitysthetics.com 2. Données internes. 3. Données internes. Brillant final mesuré après 10 000 cycles de brossage en unités de brillance (UB).



PermaFlo™

COMPOSITE FLUIDE



Micro 20 ga Tip




Black Mini™ Tip

- Formule hautement chargée et fluide
- Radio - opaque²
- Formule à libération de fluor³
- Propriétés thixotropes
- Disponible en 8 teintes

Le composite fluide PermaFlo est à base de méthacrylate, photopolymérisable, radio-opaque et proposé en 8 teintes. Ses propriétés thixotropes lui confèrent une fluidité parfaite pour une meilleure adaptation.

Le composite PermaFlo est chargé à 67-68 % en poids et à 42-44 % en volume⁴, avec des particules mesurant 0,7 µm en moyenne⁴.

Utiliser le composite fluide PermaFlo pour les restaurations antérieures et postérieures de classes I, II, III, IV et V. Il est également possible de l'utiliser pour reconstituer la structure dentaire sous-gingivale absente avant le traitement endodontique (« Technique Donut »).

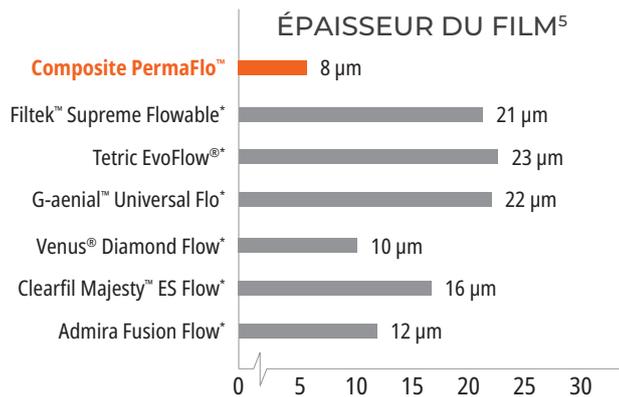

Le composite PermaFlo permet d'appliquer une couche très fine.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. PermaFlo, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour les restaurations antérieures et postérieures. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.


MICRO-RESTAURATION



1. Petite préparation de classe I traitée avec un adhésif dentinaire. Obturation de la restauration avec le composite fluide PermaFlo™ à l'aide de l'embout Micro 20 ga.




2. Le composite fluide permet une adaptation inégale grâce à un remplissage de la préparation depuis son plancher.

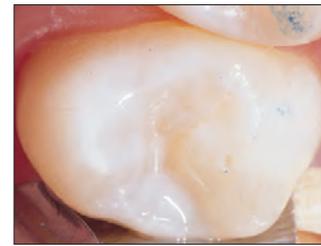

3. Résultat : restauration hybride de 0,7 µm radio-opaque.

AGENT MASQUANT

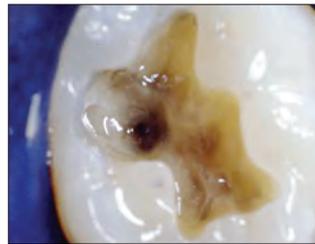

Le masquage initial des couleurs foncées avec le composite PermaFlo facilite l'obtention d'une esthétique parfaite en surface.

MASQUAGE DU MÉTAL




Appliquer une fine couche de PermaFlo Dentin Opaquer sur le métal visible, puis photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™ en mode Puissance standard.

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Données internes. 3. Données internes. 4. Données internes. 5. Données internes.



EXCELLENTE CAPACITÉ D'ADAPTATION DE LA COUCHE INITIALE

Avec l'aimable autorisation du Dr Howard Strassler.

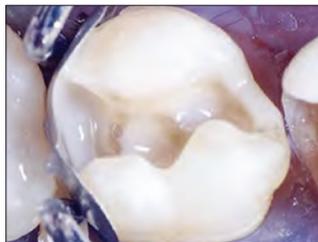

Appliquer, après l'adhésif, une fine couche de composite PermaFlo au niveau du bord gingival, des parois axiales de la boîte proximale et des angles internes de manière à garantir une bonne adaptation du composite.

RESTAURATIONS CHEZ L'ENFANT



1. Polycarie évolutive chez un enfant de 3 ans.



2. Elimination totale des tissus carieux à l'aide d'une fraise boule à faible vitesse. Faire une vérification avec le révélateur de caries Sable™ Seek™ pour s'assurer que toute la surface préparée est de la dentine minérale dure. Une bonne gestion des tissus est un impératif absolu ici ; mettre en place un fil Ultrapak™ imbibé de solution hémostatique pour commencer.



3. Mordancer les préparations et appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond. Photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO en mode Puissance standard. Appliquer une première couche fine de composite PermaFlo sur la couche d'adhésif avec l'embout Micro 20 ga. Photopolymériser.



4. Ajouter puis polymériser 1 ou 2 couche(s) supplémentaire(s). Finir rapidement les restaurations avec des fraises à finir et des cupules abrasives.



5. Un an plus tard.



RÉFRIGÉRER



PermaFlo Kit de seringues

Teinte	Kit	Teinte	Kit
A1	947	A4	954
A2	948	B1	956
A3	949	Translucents	612
A3.5	952	Dentin Opaquer	1005

2 seringues de 1,2 ml (2,30 g)
4 embouts Micro 20 ga

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent.



Composite Wetting Resin

RÉSINE DE MODELAGE



Inspiral™ Brush Tip

- Facilite l'adaptation des composites
- Humidifie le composite sec pendant le contourage
- Résine hydrophobe et sans solvant

Composite Wetting Resin est une résine fluide, chargée à 45 % et photopolymérisable.

Utiliser Composite Wetting Resin pour la stratification progressive des matériaux composites et lorsque la couche inhibée par l'oxygène a été éliminée ou abîmée (par exemple au rinçage de la surface suite à une contamination). Il est possible d'appliquer la résine de modelage Composite Wetting Resin sur la surface composite si celle-ci a séché pendant le contourage. Utiliser Composite Wetting Resin sur un instrument ou une brosse pour améliorer le brillant. Composite Wetting Resin facilite l'adaptation des restaurations en composite ainsi que la préparation.

RÉFRIGÉRER



3059 – Composite Wetting Resin Recharge
2 seringues de 1,2 ml (1,85 g)

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Le composite *Wetting Resin*, destiné à une utilisation en cabinet dentaire uniquement, est une résine fluide utilisée pour les techniques de stratification des matériaux composites. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



PermaFlo™ Pink

COMPOSITE



Micro 20 ga Tip

- Solution pour un substitut gingival esthétique

Le composite PermaFlo Pink est une alternative à la greffe gingivale qui n'est pas toujours possible. L'utiliser comme agent masquant dans les restaurations de classe V en cas d'exposition de la structure radiculaire. Il est également possible de l'utiliser pour masquer la récession gingivale.

AVANT ET APRÈS



Avec l'aimable autorisation du Dr. Anna Kylova.

1. Après la préparation de la dent et l'application de l'adhésif Peak™ Universal Bond, construire la restauration progressivement avec le composite PermaFlo Pink.

2. La restauration finale peut masquer les surfaces radiculaires exposées lorsque la greffe gingivale n'est pas possible.

RÉFRIGÉRER



963 – Kit PermaFlo Pink
2 seringues de 1,2 ml (2,30 g)
4 embouts Micro 20 ga

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *PermaFlo Pink*, destiné à une utilisation en cabinet dentaire uniquement, est un composite fluide utilisé pour réduire les sensibilités. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.





Uvener™ & Uvener™ Extra

SYSTÈMES DE GABARITS POUR COMPOSITES DIRECTS



- Des restaurations composites prédictibles, d'aspect naturel
- Prévention de la formation d'une couche inhibée par l'oxygène au cours de la polymérisation
- Passage de la lumière à travers le gabarit vers le composite
- Compatible avec tous les composites
- Dégagement de la résine composite polymérisée
- Ajustement ou polissage minime
- Application sur dent unitaire ou dents multiples
- Autoclavable et réutilisable

Le kit de gabarits Uvener original contient tout le nécessaire pour créer des restaurations esthétiques, tant à l'arcade supérieure qu'inférieure. Les gabarits contribuent à rendre les procédures peu invasives. Les gabarits constituent une trame vierge que le dentiste pourra personnaliser en adaptant les contours et l'anatomie aux besoins de chaque patient.

Les gabarits Uvener Extra ont été développés à partir de ce système et proposent une plus large gamme de tailles. Les gabarits Uvener Extra ont été réalisés à partir de scans de dents naturelles, avec des mamelons et d'autres contours de dents intégrés directement dans les gabarits. Le nouveau système des tailles supplémentaires pour plus de patients – dont les tailles Extra Large, Large, Medium et Square.

Les deux systèmes de gabarits Uvener peuvent être utilisés pour les maquettes, la correspondance des teintes, les restaurations provisoires et les facettes composites.

Avec l'aimable autorisation du Dr Hal Stewart.



La patiente souhaitait un traitement rapide, conservateur et abordable. Durée du traitement 1 heure et demie pour la restauration de 33 à 43 avec le composite Vit-l-escence™ PN et sans préparation. Légère irritation des tissus encore visible sur cette photo prise immédiatement en fin d'intervention après le retrait des fils de rétraction. Patiente extrêmement satisfaite.

Avec l'aimable autorisation du Dr Sigal Jacobson.



Jeune femme complexée par ses dents. Une couronne sur implant sur la 22 ne s'harmonisait pas avec les dents adjacentes. Le traitement a duré 45 minutes pour restaurer les dents 12, 11 et 21. Une préparation minimale a été nécessaire. La patiente est contente et satisfaite des résultats.

Avec l'aimable autorisation du Dr Rafael Beolchi.



Patient présentant un bruxisme sévère avec des restaurations composites en mauvais état, vieilles de plusieurs décennies. Après la dépose des anciens composites, et à l'aide d'un modèle en cire, les six dents antérieures supérieures ont été restaurées en une seule séance. Les teintes A3 et A2 du composite universel Mosaic™ ont été appliquées à main levée, et la teinte EW a été appliquée avec le système de gabarits Uvener Extra.

Avec l'aimable autorisation du Dr Susan McMahon.




Le patient présentait des dents antérieures mal alignées et une restauration composite ancienne sur l'incisive centrale gauche. Le patient souhaitait obtenir des dents antérieures mieux alignées et éclaircir son sourire. Le laser Gemini a été utilisé pour tracer le contour gingival, et les restaurations ont été réalisées avec la teinte EW du composite Mosaic et les gabarits Uvener Extra.

Chaque gabarit autoclavable et réutilisable est conçu pour reproduire l'anatomie de la dent selon les règles relatives à la ligne du sourire et à « l'harmonie des proportions ». Le système intègre le rapport hauteur-largeur, les contours, les embrasures et la ligne médiane centrale idéaux. Grâce à la précision du contour facial de la dent, le résultat final présente différentes épaisseurs de composite. Le composite sera plus fin vers le tiers incisif et les régions gingivales et plus épais vers le centre de la surface faciale. Cette épaisseur différenciée permet de créer différents effets et valeurs et une seule teinte de composite suffit pour obtenir un effet de gradient naturel. Toutefois, des teintes multiples de composite sont possibles en fonction de la technique privilégiée par le praticien.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Uvener et Uvener Extra, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont des systèmes de gabarits pour composites directs. Non remboursés. Classe I, certifiés Dental Art Innovation, Pvb, LTD, Ultradent Inc.

1. realityesthetics.com. *Le composite Vit-l-escence™ n'est pas en vente dans l'UE.

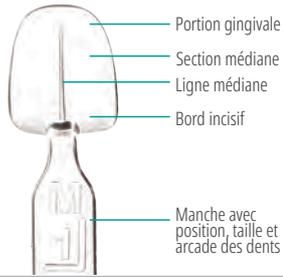

GUIDE TECHNIQUE POUR COMPOSITE DIRECT



1. Sélectionner le gabarit qui correspond à la dent à restaurer. Vérifier sur le manche du gabarit la position de la dent, la taille et l'arcade. Choisir la ou les teinte(s) composite(s) appropriée(s).




2. Retirer toutes les caries éventuelles et réaliser une préparation minimale de la dent.



3. Placer les matrices de séparation interproximales et appliquer Ultra-Etch™, Peak™ SE Primer ou l'agent de mordantage de son choix.



4. Rincer l'agent de mordantage et sécher à l'air en suivant les instructions du fabricant. Ne pas rincer si Peak SE Primer est utilisé ; amincir doucement la couche de produit à l'air comprimé.

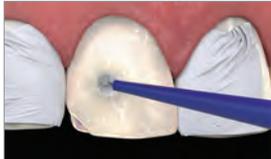

5. Appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond ou l'adhésif de son choix sur la surface de la dent.



6. Photopolymériser avec la lampe à polymériser VALO™ pendant 10 secondes en mode Puissance standard. Si une autre lampe à polymériser est utilisée, polymériser en suivant les instructions du fabricant.



7a. En cas d'utilisation de la technique avec teinte unique, appliquer le composite de son choix directement sur la dent. Ne pas photopolymériser le composite.



7b. Avec la technique de stratification, appliquer la couche de composite la plus profonde directement sur la dent et les couches de composite superficielles dans le gabarit. Ne pas photopolymériser le composite.



8. Placer le gabarit sélectionné sur le composite non photopolymérisé. Positionner la ligne centrale du gabarit parallèlement à la ligne médiane de la face et perpendiculairement au plan incisif. Appliquer la face concave du gabarit sur la dent avec le pouce. Appuyer fermement pour chasser l'air éventuellement emprisonné.



9. Retirer l'excès de composite non polymérisé à la périphérie. Vérifier l'alignement du gabarit.



10. Avec la lampe VALO, polymériser le composite à travers le gabarit. Pour chaque couche de 2 mm, polymériser 10 secondes en mode Standard Power, 4 secondes en High Power ou 3 secondes en Xtra Power. Si une autre lampe à polymériser est utilisée, polymériser en suivant les instructions du fabricant.



11. Retirer le gabarit Uvener™ en soulevant doucement le manche.



12. Terminer la polymérisation directement sur le composite avec la lampe VALO. Polymériser pendant 5 secondes en mode Standard Power, 4 secondes en High Power ou 3 secondes en Xtra Power. Si une autre lampe à polymériser est utilisée, polymériser en suivant les instructions du fabricant.



13. En évitant la surface faciale brillante, éliminer l'excès de composite polymérisé à la périphérie avec une fraise flamme fine du kit de fraises de finition Jiffy™ pour composites. Utiliser une lame pour travailler près des bords de la restauration définitive pour éviter de les déformer. Utiliser des polissoirs et brossettes Jiffy™ pour composites pour une finition minimale et un éventuel ajustement.



14. Immédiatement après utilisation, essuyer soigneusement le gabarit avec un tampon d'alcool, puis le sécher, l'emballer et le passer à l'autoclave en suivant la notice d'utilisation du gabarit Uvener. Ne laisser aucun résidu de composite sur le gabarit afin d'en préserver la translucidité et la brillance.

Ne pas passer la base noire à l'autoclave.



UVKV3 – Kit Uvener

16 gabarits Medium pour arcades supérieure et inférieure
16 gabarits Large pour arcades supérieure et inférieure

Les gabarits Medium et Large comprennent 2 incisives centrales, 2 incisives latérales, 2 canines et 2 prémolaires pour les arcades supérieure et inférieure.



UVKEV1 – Kit Uvener Extra

6 gabarits Extra Large pour région supérieure antérieure
6 gabarits Large pour région supérieure antérieure
6 gabarits Medium pour région supérieure antérieure
6 gabarits Square pour région supérieure antérieure

Les kits Uvener incluent des gabarits allant de canine à canine.

UVKEXLSQV1 – Kit Uvener Extra XL & SQ

6 gabarits Extra Large pour région supérieure antérieure
6 gabarits Square pour région supérieure antérieure

UVKELMV1 – Kit Uvener Extra L & M

6 gabarits Large pour région supérieure antérieure
6 gabarits Medium pour région supérieure antérieure

SCELLEMENT



45 ANS
1978-2023

NICOLAS SONDAZ – Zion National Park

Ciments provisoires à base de polycarboxylate et de résine, sans eugérol
Scellement provisoire des facettes
Résine de scellement photopolymérisable pour facettes
Composite auto-photo de scellement et de reconstitution
Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine



	UltraTemp™	UltraTemp™ REZ II	ClearTemp™ LC	PermaFlo™ DC	UltraCem™	PermaShade™ LC
Description	Ciment de scellement provisoire	Ciment de scellement provisoire	Scellement provisoire des facettes	Ciment de scellement/restauration	Ciment de scellement à base de verre ionomère modifié par adjonction de résine	Scellement des facettes
Composition	Polycarboxylate pâte/pâte sans eugénoïl	Ciment pâte/pâte, à base de résine sans eugénoïl	Ciment à base de composite faiblement/moyennement chargé	Ciment à base de composite hautement chargé de petites particules	CVIMAR liquide/poudre (VIMR)	Ciment à base de composite hautement chargé
Indications	Scellement provisoire des couronnes, bridges, inlays et onlays	Scellement provisoire des prothèses provisoires ou dans le cadre de procédures de restauration (à savoir avec couronnes, bridges, inlays et onlays provisoires)	Scellement provisoire des facettes	Scellement définitif des couronnes, inlays, onlays et bridges, scellement des tenons endodontiques et fabrication de faux moignons	Scellement définitif des restaurations (dont inlays, onlays, couronnes et bridges) métalliques, céramo-métalliques, en zircon et composites sur dents naturelles	Scellement définitif des facettes en céramique, zircon, composite et autres facettes antérieures
Application	Seringue à double cylindre de 5 ml avec embout mélangeur	Seringue à double cylindre de 5 ml avec embout mélangeur	Seringue coudée de 0,67 g	Seringue à double cylindre de 5 ml avec embout mélangeur. Embout intra-oral supplémentaire pour une application précise.	Kit flacon pour mélange manuel : 15 g de poudre / 8,6 ml de liquide	Seringue coudée de 0,95 g
Type de polymérisation	Autopolymérisable	Autopolymérisable	Photopolymérisable	Polymérisation double	Autopolymérisable	Photopolymérisable
Temps de travail/Temps de prise	2-3 minutes	Prise rapide 1 à 2 minute(s) Prise normale 2 à 3 minutes	Photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™	Temps de travail 2,5 minutes, prise totale en 5 à 8 minutes. Photopolymériser avec la lampe à polymériser VALO™ conformément au mode d'emploi.	Temps de travail : 1 à 3 minute(s), prise totale en 5 minutes	Polymérisation flash (tack cure) pendant 2 secondes pour éviter tout décalage. Photopolymériser pendant 10 secondes avec la lampe à polymériser VALO™.
Viscosité	Fluide	Fluide	Grain moyen	Fluide	Très fluide	Grain moyen
Teintes	Off-white	Off-white	Translucet (fluorescent sous lumière ultraviolette)	A2, A3.5, Translucet, Opaque White	Proche de A2	A2, B1, Translucet, Opaque White
Différenciation	Mélange et application en un seul temps. La formule hydrophile non irritante à base de polycarboxylate est douce pour la pulpe. Pour l'obturation des cavités d'accès dans les cas de « Walking Bleach ». Conçu pour s'éliminer par simple grattage.	Mélange et application en un seul temps. Formule à base de résine hydrophile parfaitement adaptée pour les cas où une rétention plus longue est nécessaire. Disponible en prise normale et en prise rapide. Radio-opaque et fluorescent pour garantir l'élimination totale du ciment.	Résistance encore plus élevée pour le scellement des facettes provisoires. Fluorescent sous lumière ultraviolette pour une détection aisée. Meilleure adhérence sur la restauration provisoire que sur la dent.	Film le plus mince (8 µm) connu pour un ciment de scellement ¹ . Résistances d'adhésion et en compression supérieures à celles des autres ciments de scellement de qualité ² . Économique.	Résistance d'adhésion sur le métal ou la dentine. Résistance d'adhésion sur le métal ou la dentine supérieure à celle des autres ciments de même catégorie ³ .	Teinte stable pour un résultat esthétique durable. Extrémité d'application coudée unique pour plus de précision et de confort. La faible contrainte due au retrait réduit la déformation des facettes à la polymérisation.

Indications	PROVISOIRE			DÉFINITIF		
	Autopoly-mérisable	Autopoly-mérisable	Photopoly-mérisable	Polymérisation double	Autopoly-mérisable	Photopoly-mérisable
Couronne	X	X		X	X	
Bridge	X	X		X	X	
Facette			X			X
Scellement des tenons				X		
Reconstitution des moignons				X		
Technique Walking Bleach	X					
Couronne et bridge pour implants		X		X		
Cavité d'accès endodontique	X					
Bagues orthodontiques					X	
Inlays/Onlays	X			X	X	
		X				

Ciment provisoire UltraTemp

Ciment provisoire ClearTemp LC

Ciment VIMR UltraCem

Ciment résine PermaShade LC

Ciment résine PermaFlo DC avec adhésif Peak Universal Bond



← Provisoire ————— VALEURS D'ADHÉSION : ————— Définitif →
des plus faibles aux plus élevées

1. Données internes. 2. Données internes. 3. Données internes.



UltraTemp™ & UltraTemp™ REZ II

CIMENTS PROVISOIRES À BASE DE POLYCARBOXYLATE ET DE RÉSINE, SANS EUGÉNOL



Ultradent™ Mixing Tip


- Formule sans eugénol n'interférant pas avec les adhésifs
- Élimination à l'eau avant la prise/polymérisation
- Seringue à double cylindre pour l'application des mélanges pâte/pâte
- Mélange homogène
- Étanchéité après polymérisation
- Résistance aux contraintes normales d'occlusion et de mastication
- Composition hydrophile
- Pour couvrir l'accès dans les procédures d'éclaircissement intracronaire
- Utiliser le matériau provisoire UltraTemp pour couvrir l'accès dans les procédures d'éclaircissement intracronaire

Le ciment provisoire UltraTemp™ a une formulation hydrophile à base de polycarboxylate qui garantit une faible irritation de la pulpe et une étanchéité de qualité. Il est facile à éliminer à l'eau avant la prise. Le ciment provisoire UltraTemp est recommandé pour la mise en place classique, pour 1 à 2 semaine(s), des restaurations provisoires fabriquées sur-mesure ou préformées standards.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. UltraTemp et UltraTemp REZ II, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour le scellement provisoire. Ils ne sont pas remboursés. Ultratemp, Classe IIa, certifiés TÜV Nord, Ultradent Inc. Ultradentemp REZ II, Classe I, auto-certifiés Ultradent Inc

SCELLEMENT PROVISOIRE

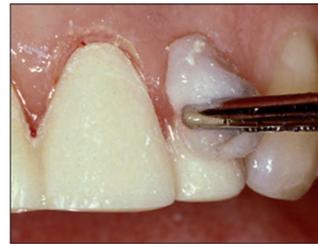

1. Avant la prise totale, éliminer les excédents de ciment provisoire UltraTemp aisément avec un coton ou une gaze humide. Après un temps de prise de 2 à 3 minutes, éliminer tout ciment sous-gingival résiduel avec une sonde.



2. Après la dépose de la restauration provisoire, deux semaines après l'intervention, le ciment adhère aussi bien à la restauration provisoire qu'à la préparation. C'est le signe d'un scellement efficace.



3. Gratter le ciment résiduel à l'aide d'un instrument manuel émoussé.



4. Appliquer une pâte abrasive antibactérienne à base de chlorhexidine avec une cupule en caoutchouc ou une brosse intracronaire pour éliminer le ciment résiduel.



5916 – Kit UltraTemp Regular
(temps de prise de 2 à 3 minutes)
1 seringue de 5 ml (7,96 g)
20 embouts mélangeurs Mixing Tips



6060 – Kit UltraTemp REZ II Regular
(temps de prise de 2 à 3 minutes)
1 seringue de 5 ml (7,96 g)
20 embouts mélangeurs Mixing Tips



6061 – Kit UltraTemp REZ II Fast
(temps de prise de 1 à 2 minute(s))
1 seringue de 5 ml (7,96 g)
20 embouts mélangeurs Mixing Tips



ClearTemp™ LC

SCHELLEMENT PROVISOIRE DES FACETTES



- La teinte translucide a été développée pour les facettes antérieures provisoires
- Résine photopolymérisable
- La fluorescence sous lumière noire facilite l'élimination totale
- Application par seringue coudée ergonomique

Le ciment provisoire ClearTemp LC est conçu pour les facettes provisoires. Sa formule brevetée à base de résine photopolymérisable lui confère une résistance pour le scellement des facettes provisoires.

ESTHÉTIQUE




Les restaurations provisoires ont de nos jours un aspect plus naturel que jamais. Le ciment ClearTemp LC aide à obtenir rapidement un sourire que les patients arboreront fièrement.

COMPARAISON



Un ciment provisoire classique est visible à travers la couronne provisoire sur la 11. Le ciment ClearTemp LC n'est pas visible à travers la facette provisoire sur la 21.

PROPRIÉTÉS DE FLUORESCENCE

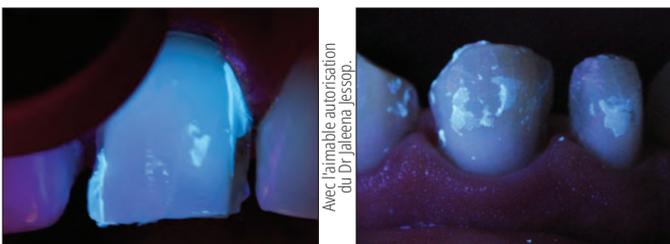

Le ciment ClearTemp LC est fluorescent sous lumière noire pour une détection aisée. Utiliser une lumière noire pour garantir l'élimination totale du ciment ClearTemp LC. Cette étape est importante pour minimiser le risque d'endommager la restauration définitive. Utiliser la lentille lumière noire de VALO™ ou le porte-clé lumière noire UltraSeal XT™ hydro pour une bonne visibilité.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. ClearTemp LC, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le scellement provisoire des facettes provisoires. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.

PROCÉDURE



1. Sortir le produit du réfrigérateur pour qu'il atteigne la température ambiante. Nettoyer, rincer et sécher légèrement la préparation. Exprimer suffisamment de ciment ClearTemp LC pour recouvrir l'intrados de la restauration provisoire.



2. Mettre en place une facette provisoire.



3. Éliminer l'excédent de matériau.



4. Photopolymériser avec la lampe à polymériser VALO en mode Puissance standard pendant 10 secondes.

DÉPOSE



5. Utiliser un instrument manuel pour rompre le scellement au niveau des limites de la résine et retirer la restauration provisoire. Le ciment ClearTemp LC est résistant et a une force d'adhésion élevée – il est par conséquent possible que les facettes provisoires se brisent lors de la dépose. Gratter le ciment résiduel à l'aide d'un instrument manuel émoussé.



6. Éclairer la surface de la dent avec une lumière noire pour voir les résidus de ciment ClearTemp LC. Éliminer tout résidu de ciment et vérifier de nouveau. Frotter la préparation avec un produit abrasif et une cupule ou une brosse à dents. Rincer abondamment et préparer le site pour le scellement définitif.

Remarque : en raison de sa force d'adhésion élevée par rapport aux autres ciments provisoires, le ciment ClearTemp LC doit être utilisé pour les facettes provisoires UNIQUEMENT, jamais pour la mise en place des restaurations provisoires, les couronnes de recouvrement total, les inlays ou les onlays.



Remarque : Nous recommandons le ciment pour facettes PermaShade™ LC pour le scellement des facettes définitives. Voir page suivante.

RÉFRIGÉRER



3518 – ClearTemp LC Recharge
4 seringues de 0,67 g (0,5 ml)



PermaShade™ LC

RÉSINE DE SCELLEMENT PHOTOPOLYMÉRISABLE
POUR FACETTES



- La viscosité moyenne empêche la facette de bouger avant la polymérisation
- Pour facettes en céramique, zircone, composite et autres facettes indirectes
- À la polymérisation, la faible contrainte due à la rétraction de prise prévient la déformation de la facette¹
- Disponibles en quatre teintes VITA™* : Translucents, Opaque White, A2 et B1

PermaShade LC est une résine de scellement photopolymérisable à utiliser exclusivement pour le scellement des prothèses translucides laissant passer la lumière et lorsque la correspondance des teintes est importante.



La seringue à extrémité ergonomique permet une application contrôlée et précise.


Remarque : porter la résine PermaShade LC à température ambiante avant utilisation pour une manipulation optimale.

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. PermaShade LC, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé comme résine de scellement photopolymérisable à utiliser exclusivement pour les facettes. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

AVANT ET APRÈS

Avec l'aimable autorisation du Dr. Shea Bess.

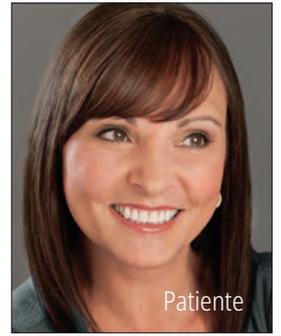

Patiente

Patiente présentant 4 restaurations composites antérieures préexistantes et un large diastème. Six facettes antérieures (13-23) en céramique de teinte A1 ont été scellées avec la résine PermaShade LC de teinte Translucents.

RÉFRIGÉRER



PermaShade LC 4 seringues

Teinte	4 unités	Teinte	4 unités
A2	5229	Translucents	5227
B1	5230	Opaque White	5228

Seringues de 0,95 g (0,5 ml)

Lettres d'information électroniques d'Ultradent

Abonnez-vous gratuitement aux lettres d'information électroniques d'Ultradent pour recevoir les actualités sur les produits, les événements et plus encore.



Scannez le code QR pour vous inscrire dès aujourd'hui !



PermaFlo™ DC

COMPOSITE AUTO-PHOTO DE SCELLEMENT
ET DE RECONSTITUTION



Ultradent™ Mixing Tip

- Usages multiples dont scellement de tenons, fabrication de faux moignons et scellement
- Radio-opaque
- Auto-mélange
- Temps de travail : 2,5 minutes, temps de prise chimique : 5-8 minutes
- Compatible avec le mordantage total et l'automordantage


La résine de scellement PermaFlo DC hautement chargée, à petites particules et à polymérisation duale s'écoule par un embout fin pour le scellement des tenons. Film mince de 8 µm¹.

La résine de scellement PermaFlo DC est recommandée pour le scellement définitif des couronnes transparentes ou opaques, etc. Il est possible d'utiliser la même méthode de mélange et d'application pour le scellement des tenons et la reconstitution des moignons. Sa texture visqueuse lui permet de s'écouler au fond de la préparation de tenon, puis tout autour des tenons mis en place directement. Pendant la reconstitution du moignon, figer l'écoulement du matériau à l'aide d'une lampe à polymériser. La résine PermaFlo DC est compatible avec l'adhésif Peak™ Universal Bond pour le collage et le scellement avec photopolymérisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES²


Résistance au cisaillement sur émail (mordantage total)	53,38 MPa
Résistance au cisaillement sur dentine (mordantage total)	62,07 MPa
Résistance à la flexion	128,5 MPa
Module d'élasticité en flexion	9,37 GPa
Résistance à la compression	355,91 MPa
Module d'élasticité en compression	4,22 GPa

ÉPAISSEUR DU FILM³

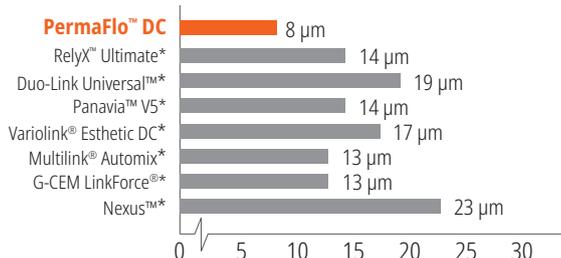


La résine PermaFlo DC présente le film le plus mince connu pour un composite de scellement⁴.

PLUSIEURS OPTIONS

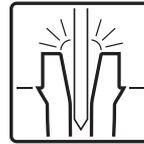

Scellement des tenons

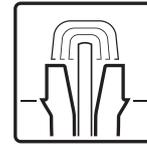

Reconstitution des moignons



Scellement

PROCÉDURE

Avec l'aimable autorisation du Dr Gary Findley.



La formule à polymérisation duale de la résine PermaFlo DC permet de l'utiliser pour sceller les tenons endodontiques et reconstituer les moignons.

UTILISATION



L'embout Intraoral se clique sur l'embout mélangeur à double cylindre pour une application précise du matériau de scellement.



Adhésif pour couronnes, bridges, inlays et onlays. Avec l'application par seringue/embout, une couronne est remplie depuis sa partie la plus profonde pour garantir l'absence d'air.

RÉFRIGÉRER



PermaFlo DC Kits de seringues

Teinte	Kit	Teinte	Kit
A2	5912	Translucents	5914
A3.5	5913	Opaque White	5915


1 seringue de 5 ml (9,5 g) de PermaFlo DC
20 embouts mélangeurs Mixing Tips
20 embouts Intraoral Tips

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. Données internes. 2. Données internes. 3. Données internes. 4. Données internes.


DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. PermaFlo DC, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est recommandé pour le scellement définitif des couronnes céramo-céramiques opaques, le scellement des tenons et la reconstitution du moignon. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



GUIDE POUR LE SCELLEMENT DES TENONS ENDODONTIQUES AVEC LA RÉSINE PERMAFLO DC

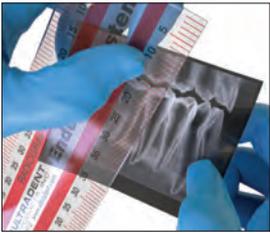


1. Procéder à un essai pour déterminer la taille et la longueur du tenon ou prendre un cliché radiographique et se fier à son jugement clinique.

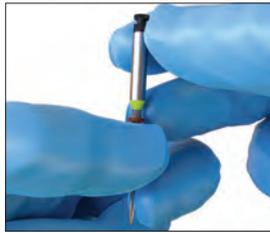

2. Placer une butée en caoutchouc sur le foret UniCore™ de manière à obtenir la longueur requise.



3. Placer l'embout UniCore dans le passage créé. Suivre, en appliquant une légère pression, le matériau d'obturation sur la longueur indiquée par la butée en caoutchouc. Laisser le foret à vitesse maximale et le retirer du canal.

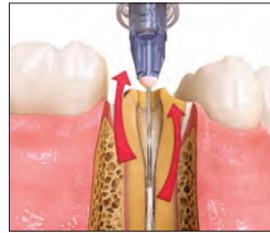

4. Utiliser l'adaptateur TriAway™* avec l'embout Endo-Eze™ 22 ga pour éliminer, du bas vers le haut, les débris du logement du tenon par un rinçage à l'eau sous aspiration.



5. Vérifier la taille et la longueur du tenon en mettant en place le tenon UniCore correspondant. Nettoyer le tenon avec de l'alcool isopropylique après la vérification.

APPLIQUER LA TECHNIQUE AVEC MORDANÇAGE ET RINÇAGE




6. Mordancer le logement pendant 15 secondes avec le gel de mordantage Ultra-Etch™ et l'embout Endo-Eze 22 ga. Commencer en partant de l'apex pour remonter vers la couronne.



Utiliser l'adaptateur TriAway* et l'embout Endo-Eze 22 ga pour rincer le logement du tenon avant de le sécher avec un jet d'air léger, tout en veillant à laisser les surfaces légèrement humides.

OU LA TECHNIQUE AVEC MORDANÇAGE MAIS SANS RINÇAGE

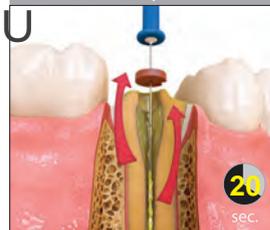

6a. Fixer l'embout NaviTip™ FX™ Brush 30 ga sur la seringue de primer Peak™ SE. Appliquer le matériau dans le logement du tenon et sur la préparation coronaire pendant 20 secondes en agitant la seringue.



Éliminer le matériau en excès du bas vers le haut avec l'adaptateur TriAway* et l'embout Endo-Eze 22 ga sous aspiration. Ne pas trop sécher.



7. Utiliser l'embout NaviTip FX 30 ga ou Micro Applicator pour appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond. Appliquer l'adhésif par frottement sur toute la longueur du logement du tenon ainsi que sur l'ensemble de la préparation pendant 10 secondes.



8. Éliminer l'adhésif Peak Universal Bond en excès avec l'adaptateur TriAway* et l'embout Endo-Eze 22 ga sous aspiration. Continuer pendant 10 secondes à l'air comprimé à pression maximale, puis étaler l'adhésif sur les surfaces coronaires pendant 10 secondes.



9. Photopolymériser l'adhésif pendant 20 secondes. Pour les zones proches de la gencive, polymériser avec deux intervalles de 10 secondes ou en mode Xtra-puissance pendant 6 secondes avec la lampe VALO™.



10. S'assurer que le tenon UniCore entrera dans son logement avant d'appliquer le ciment de scellement.



11. Charger le ciment PermaFlo™ DC dans la seringue Skini avec l'embout Endo-Eze™ 20 ga rose. Vérifier le mélange et l'écoulement.



12. Appliquer le ciment PermaFlo DC mélangé dans le logement du tenon en partant de l'apex pour remonter vers la couronne.



13. Insérer lentement le tenon et le loger à la profondeur prédéterminée.



14. Procéder à une polymérisation flash (tack cure) du ciment PermaFlo DC dans le canal pendant 5 secondes.



15. Exprimer le ciment PermaFlo DC autour du tenon pour réaliser le faux moignon. Réaliser le faux moignon progressivement et photopolymériser pendant 10 secondes entre les couches. Si le ciment commence à s'affaisser, procéder à une polymérisation flash (tack cure) entre les couches. Réaliser le faux moignon progressivement.

* Les adaptateurs TriAway ne sont pas disponibles dans l'UE.



UltraCem™

CIMENT VERRE IONOMÈRE MODIFIÉ
PAR ADJONCTION DE RÉSINE



- Libération de fluor prolongée
- Consistance fluide et film de faible épaisseur pour ne pas gêner l'ajustement ou l'occlusion
- Temps de travail : 1 à 3 minute(s), temps de prise : 5 minutes
- Radio-opacité > à 1 mm d'aluminium
- Rétention supérieure à celle assurée par les principaux ciments VIMR sur les couronnes en alliage précieux²


Le ciment au verre ionomère renforcé à la résine UltraCem est recommandé pour le scellement des restaurations indirectes (dont inlays, onlays, couronnes et bridges) métalliques, céramo-métalliques, en zircon et composites. Il peut également être utilisé pour le scellement des bagues orthodontiques.

Remarque : ne jamais utiliser d'acide phosphorique pour nettoyer le zircon car cela réduirait significativement ses forces d'adhésion. Ne pas utiliser de primer pour zircon avec le ciment UltraCem.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *UltraCem*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le scellement définitif. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

ESSAI COMPARATIF¹

	RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT	FORCE D'EXTRACTION	ÉPAISSEUR DE FILM
Ciment UltraCem™	10,89 MPa	5,22 MPa	24,0 µm
GC Fuji PLUS™*	4,76 MPa	3,91 MPa	17,6 µm
3M RelyX™ Luting*	5,12 MPa	4,59 MPa	36,9 µm
3M Ketac-Cem™*	3,65 MPa	2,27 MPa	25,8 µm

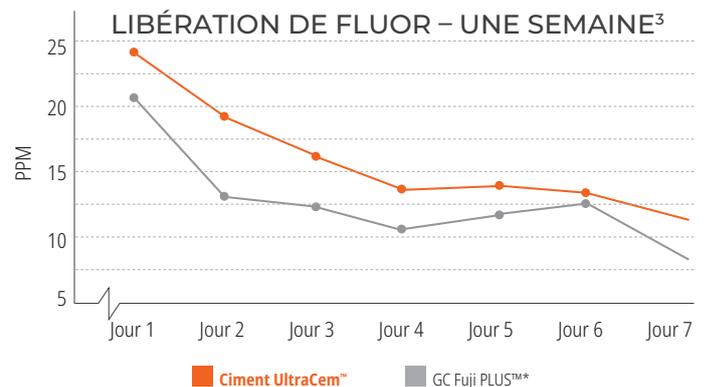

2056 – UltraCem Kit Liquide/Poudre en flacons

- 1 flacon de 15 g de poudre
- 1 flacon de 8,6 ml de liquide
- 1 bloc de mélange
- 1 cuillère doseuse
- 1 spatule

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. **1.** Données internes. **2.** Pameijer CH. Crown retention with three resin modified glass ionomer luting agents. *JADA* 2012;143(11):1218-1222. **3.** Données internes.



Peak™ Universal Bond


ADHÉSIF PHOTOPOLYMÉRISABLE



Inspiral™ Brush Tip

- Mélange de monomères de phosphate Dymetech™
- Adhère à tous les substrats dentaires
- Pour le collage direct et indirect, ainsi que pour les procédures avec tenons et moignons
- Convient aussi bien pour les techniques en automordançage qu'en mordançage total
- Disponible en seringue ou en flacon

COMPARAISON DES FORCES D'ADHÉSION²

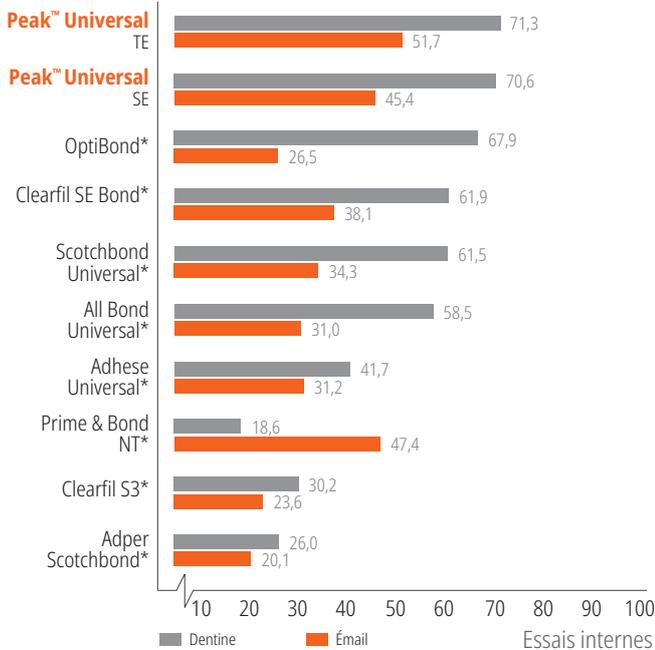

Adhésif photopolymérisable, voir page 60.

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityratings.com 2. Données internes.



Uvener™ & Uvener™ Extra

SYSTÈMES DE GABARITS POUR COMPOSITES DIRECTS



- Des restaurations composites prédictibles et d'aspect naturel
- Prévention de la formation d'une couche inhibée par l'oxygène au cours de la polymérisation
- Passage de la lumière à travers le gabarit vers le composite
- Compatible avec tous les composites
- Dégagement de la résine composite polymérisée
- Application sur dent unitaire ou dents multiples
- Autoclavable et réutilisable

Systèmes de gabarits pour composites directs, voir pages 75-76.

1. realityesthetics.com.



HALO™

SECTIONAL MATRIX SYSTEM



De beaux résultats
en moins de temps

Le système de matrices sectionnelles Halo, facile à utiliser, vous permet de créer en moins de temps de belles restaurations composites aux contours anatomiques.

FINITION



45 ANS
1978-2023

ARIANA ALSHIMMARY – Bonneville Salt Flats

Polissoirs à usage unique
Disques de mise en forme et de finition
Système de polissage pour composites Original
Système de polissage pour composites Natural
Système de polissage pour céramiques Universal Natural
Système de polissage pour céramiques Universal
Brossettes de polissage
Pâte de polissage diamantée
Agent siccatif
Bandes de finition
Composite de réétanchéification



Jiffy™ One

POLISSOIRS À USAGE UNIQUE



- Pas besoin de retraiter les polissoirs
- Obtenez l'éclat que vos patients et vous-même attendez grâce à la formule spéciale des particules de diamant
- Aucun risque de contamination croisée
- Inutile de se soucier de l'élimination accidentelle de polissoirs réutilisables

SIMPLE, DIRECT ET SANS DANGER



Polissez.



Jetez à la poubelle.





Rapide. Facile. Magnifique.

Pour un polissage en un temps, commencez avec un grain moyen.

Vous voulez plus d'éclat? Utilisez un grain fin.

Système en deux temps maximum pour un polissage facile et rapide. Le système de polissage à usage unique Jiffy One vous permet d'obtenir un fini brillant d'aspect naturel en moins de temps.

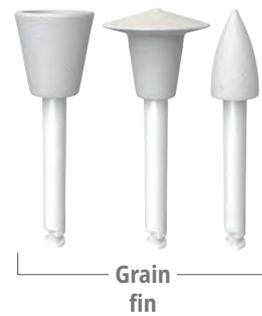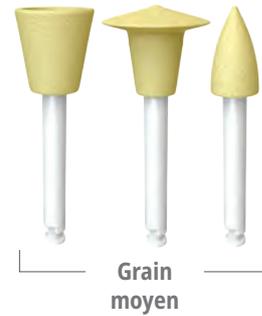

Jiffy One Cupules, disques, pointes 20 unités

	  Cupules 20 unités	  Disques 20 unités	  Pointes 20 unités
Grain moyen	7024	7026	7028
Grain fin	7025	7027	7029



7030 – Jiffy One – Échantillon de polissoirs à usage unique

4 cupules jaunes à grain moyen, 2 disques jaunes à grain moyen,
2 pointes jaunes à grain moyen
4 cupules blanches à grain fin, 2 disques blancs à grain fin,
2 pointes blanches à grain fin



nouveau

Jiffy™ Spin

DISQUES DE MISE EN FORME ET DE FINITION



- Les disques ultrafins sont parfaits pour la mise en forme et la finition interproximales
- Chaque élément du système Jiffy aidera les praticiens à offrir aux patients la restauration esthétique qu'ils souhaitent
- Les disques au revêtement d'oxyde d'aluminium ont un grain allant de gros à fin pour le lissage et le polissage
- Grain diamanté extra-gros pour une mise en forme et un dégrossissage rapides
- Convient pour une utilisation avec les matériaux composites et céramiques
- Ce nouvel ajout à la famille de produits Jiffy apportera sans aucun doute la finition parfaite que les patients adorent

Le système de disques de mise en forme et de finition Jiffy Spin est une solution de haute qualité, et abordable, pour mettre en forme et finir les restaurations rapidement et efficacement. Les praticiens adorent les résultats finaux obtenus avec n'importe quel kit de la ligne de produits Jiffy, mais si vous voulez un outil de polissage plus rapide dans votre arsenal, c'est celui-ci qu'il faut choisir.



5570 - Jiffy Spin

Kit de disques de mise en forme et de finition 10 mm

2 mandrins, 50 disques grain extra-gros, 50 disques gros grain, 50 disques grain moyen, 50 disques grain fin



5571 - Jiffy Spin

Kit de disques de mise en forme et de finition 14 mm

2 mandrins, 50 disques grain extra-gros, 50 disques gros grain, 50 disques grain moyen, 50 disques grain fin



5581 - Jiffy Spin Mandrin 10 unités

Jiffy Spin Disques de mise en forme et de finition 75 unités

75 unités	Grain extra-gros	Gros grain	Grain moyen	Grain fin
10 mm	5582	5572	5573	5574

75 unités	Grain extra-gros	Gros grain	Grain moyen	Grain fin
14 mm	5583	5576	5578	5579



Jiffy™

SYSTÈME POUR COMPOSITES ORIGINAL



- La forme unique des disques crée un effet de levier sur les surfaces de travail
- Les cupules de polissage présentent de fines parois évasées et souples, parfaites pour le polissage à proximité des gencives
- Disponible avec ou sans présentoir en aluminium autoclavable*
- Les particules de Jiffy permettent d'obtenir un joli fini sur tout matériau composite
- Sans latex de caoutchouc naturel



1. Mise en forme grossière à fine
Utiliser les polissoirs Jiffy vert (gros grain), jaune (grain moyen) puis blanc (grain fin) pour une mise en forme rapide des composites présentant des excès et de légères irrégularités.



2. Poli brillant
Utiliser le système Jiffy HiShine bleu (grain ultrafin) pour une étape supplémentaire fournissant un lissage supplémentaire et un fini poli.



3. Dernière finition
La brosse de polissage utilisée avec Ultradent™ Diamond Polish Mint permet d'obtenir un fini esthétique avec les restaurations en composite ou en céramique.

MISE EN FORME INTRA-ORALE

Vitesse recommandée : 3 000 – 8 000 TPM



La cupule Jiffy verte à gros grain permet de mettre en forme les cuspidés ainsi que les surfaces vestibulaires et cervicales.




Le disque Jiffy vert à gros grain permet de mettre en forme les surfaces vestibulaires.



Utiliser une pointe Jiffy verte à gros grain pour mettre en forme les surfaces occlusales et vestibulaires.

POLISSAGE INTRA-ORAL

Vitesse recommandée : 3 000 – 8 000 TPM

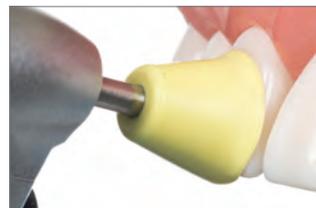

Utiliser une cupule Jiffy jaune à grain moyen pour polir les bords et les surfaces vestibulaires.



Le disque Jiffy jaune à grain moyen permet de polir les surfaces vestibulaires.



La pointe Jiffy jaune à grain moyen permet de polir les surfaces occlusales et vestibulaires.



POLISSAGE INTRA-ORAL (SUITE)

Vitesse recommandée : 3 000 – 8 000 TPM



La cupule Jiffy Fine White permet le polissage de finition des cuspides et des régions vestibulaires et cervicales.



Le disque Jiffy Fine White permet le polissage de finition des surfaces vestibulaires.



La pointe Jiffy Fine White permet le polissage de finition des surfaces occlusales et vestibulaires.

POLISSAGE FINAL INTRA-ORAL

Vitesse recommandée : 3 000 – 8 000 TPM



Utiliser la cupule Jiffy HiShine bleue à grain ultrafin comme étape supplémentaire pour obtenir un lissage supplémentaire et un fini poli sur les cuspides ainsi que sur les régions vestibulaires et cervicales.



Utiliser le disque Jiffy HiShine bleue à grain ultrafin pour une étape supplémentaire pour obtenir un lissage supplémentaire et un fini poli sur les surfaces vestibulaires.



Utiliser la pointe Jiffy HiShine bleue à grain ultrafin comme étape supplémentaire pour obtenir un lissage supplémentaire et un fini poli sur les surfaces occlusales et vestibulaires.



7010 – Gamme de polissoirs Jiffy Original 18 unités

6 cupules Jiffy RA Original (2 à gros grain, 2 à grain moyen, 2 à grain fin)
3 disques Jiffy RA Original (1 à gros grain, 1 à grain moyen, 1 à grain fin)
9 pointes Jiffy RA Original (3 à gros grain, 3 à grain moyen, 3 à grain fin)

7023 – Kit d'ajustage & de polissage Jiffy Original 9 unités

3 instruments Jiffy RA Original à grain fin (1 cupule, 1 disque, 1 pointe)
3 instruments Jiffy RA Original à grain moyen (1 cupule, 1 disque, 1 pointe)
3 instruments Jiffy RA Original à gros grain (1 cupule, 1 disque, 1 pointe)



	Cupules 12 unités	Disques 12 unités	Pointes 12 unités
Gros grain	7011	7015	7019
Grain moyen	7012	7016	7020
Grain fin	7013	7017	7021



	Cupules 10 unités	Disques 10 unités	Pointes 10 unités
HiShine	7014	7018	7022

* Ultradent recommande l'utilisation d'un présentoir en aluminium pour le passage à l'autoclave de manière à prévenir tout gauchissement et toute déformation. 1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Jiffy destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié MDC GmbH, Stuttgart.



Jiffy™ Natural

SYSTÈME DE POLISSAGE POUR COMPOSITES



- Reproduction aisée de l'éclat de l'émail naturel
- La formule spéciale des particules de diamant Jiffy permettent d'obtenir un fini idéal sur tout matériau composite
- Idéal pour la finition du composite universel Mosaic™ d'Ultradent
- Disponible avec ou sans présentoir en aluminium autoclavable*


Le système de finition et de polissage pour composites Jiffy Natural inclut des disques en forme de spirale souples pensés pour s'adapter facilement à toutes les faces de la dent et un polissoir en forme de tortillon parfait pour les surfaces occlusales.

Vitesse recommandée : 5 000 – 8 000 TPM



Les disques Jiffy Natural Medium Yellow permettent de polir toutes les zones, sauf celles proches de la gencive où il convient d'utiliser une cupule Jiffy Medium.

Vitesse recommandée : 5 000 – 8 000 TPM

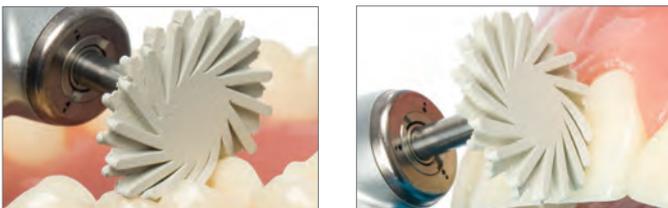

Utiliser les disques Jiffy Fine White Natural pour le polissage final de toutes les zones, sauf celles proches de la gencive où il convient d'utiliser une cupule Jiffy Fine White Polishing.



6304-1 – Jiffy Natural Composite Polishing Kit
(Présentoir en aluminium)

6384-1 – Jiffy Natural Composite Polishing Kit
(Présentoir en plastique)

2 disques Jiffy Natural (1 à grain moyen, 1 à grain fin)
2 tortillons Jiffy Natural (1 à grain moyen, 1 à grain fin)



6089-1 – Jiffy Natural RA Medium
Spiral Polishing Wheel 3 unités

6090-1 – Jiffy Natural RA Fine
Spiral Polishing Wheel 3 unités
Disques de 14 mm

Remarque : Ne pas utiliser les disques de polissage Jiffy Natural Universal pour polir la surface vestibulaire à proximité de la ligne gingivale. Cela peut blesser la gencive.



6305-1 – Jiffy Natural Occlusal Twirl Medium 3 unités

6306-1 – Jiffy Natural Occlusal Twirl Fine 3 unités

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Jiffy Natural, système de finition et de polissage pour composites, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié MDC GmbH, Stuttgart.

* Ultradent recommande l'utilisation d'un présentoir en aluminium pour le passage à l'autoclave de manière à prévenir tout gauchissement et toute déformation. 1. realityesthetics.com.



Jiffy™ Natural

SYSTÈME DE POLISSAGE POUR CÉRAMIQUES UNIVERSEL



- Adaptation naturelle à toute surface dentaire, y compris l'anatomie occlusale
- La formule spéciale des grains de diamant d'Ultradent permet un polissage efficace de toutes les céramiques, y compris la zircone
- Il est possible de l'utiliser pour raviver les prothèses anciennes
- Séquence de polissage en deux temps optimisée
- Disponible avec ou sans présentoir en aluminium autoclavable*

Le système pour céramiques Jiffy Natural Universal inclut des disques en forme de spirale souples pensés pour s'adapter facilement à l'anatomie de la dent. Leurs extensions souples ressemblant à des doigts atteignent des endroits inaccessibles aux cupules et aux pointes, et adoucissent le fini très brillant pour un résultat proche de l'émail naturel. Ces disques ont été développés pour une utilisation en association avec le système d'ajustage et de polissage pour céramiques Jiffy Universal de manière à obtenir aisément une finition de haute qualité et d'aspect naturel sur toutes les restaurations en céramique. Les disques imprégnés de diamant sont disponibles pour des applications intra- et extra-orales en grain moyen comme en grain fin. Le processus en deux temps efficace vous permet d'obtenir aisément la finition à l'aspect le plus naturel possible sur toutes les céramiques, y compris la zircone, le disilicate de lithium et la porcelaine.

* Ultradent recommande l'utilisation d'un présentoir en aluminium pour le passage à l'autoclave de manière à prévenir tout gauchissement et toute déformation.

POLISSAGE EXTRA-ORAL

Vitesse recommandée : 7 000 – 10 000 TPM



Utiliser le disque Jiffy Natural Universal HP Medium 26 mm pour le prépolissage.



Utiliser le disque Jiffy Natural Universal HP Fine 26 mm pour le polissage final.

POLISSAGE INTRA-ORAL

Vitesse recommandée : 5 000 – 8 000 TPM




Utiliser le disque Jiffy Natural Universal RA Medium 14 mm pour le prépolissage de toutes les zones, sauf celles proches de la gencive où il convient d'utiliser une cupule Jiffy RA Medium Universal.



Utiliser le disque Jiffy Natural Universal RA Fine 14 mm pour le polissage final de toutes les zones, sauf celles proches de la gencive où il convient d'utiliser une cupule Jiffy RA Fine Universal.

Avec l'aimable autorisation du Dr Richard Tuttle.

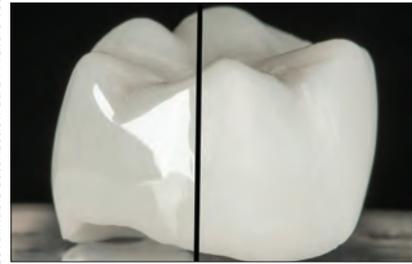

Magnifique fini obtenu sur l'ensemble de cette couronne en Zircone en quelques minutes avec le système d'ajustage et de polissage pour céramique Jiffy Universal et le système de polissage pour céramiques Jiffy Natural Universal. **REMARQUE :** Ne pas utiliser les disques de polissage Jiffy Natural Universal pour polir la surface vestibulaire à proximité de la ligne gingivale. Cela peut blesser la gencive.



6081-1 – Jiffy Natural Universal Extraoral Polishing Kit
(Présentoir en aluminium)



6085-1 – Jiffy Natural HP Medium Spiral Polishing Wheel
1 unité

6086-1 – Jiffy Natural HP Fine Spiral Polishing Wheel
1 unité

Disque de 26 mm



6080-1 – Jiffy Natural Universal Intraoral Polishing Kit
(Présentoir en aluminium)



6082-1 – Jiffy Natural Universal RA Polishing Wheel
Assortiment 6 unités
3 disques Jiffy Natural Universal RA de 14 mm de chaque taille de grain, moyen et fin



6083-1 – Jiffy Natural Universal RA Medium Spiral Polishing Wheel 3 unités
6084-1 – Jiffy Natural Universal RA Fine Spiral Polishing Wheel 3 unités
Disques de 14 mm




Jiffy™

SYSTÈME D'AJUSTAGE ET DE POLISSAGE UNIVERSEL POUR CÉRAMIQUES



- Les particules diamantées multi-grains permettent un ajustage de la céramique pour la finition².
- Séquence de mise en forme et de polissage en deux temps
- Présentoir en aluminium autoclavable

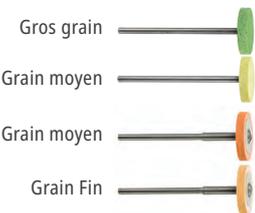

Kit extra-oral pour la mise en forme brut et le polissage

Utiliser les cônes de polissage Jiffy vert (gros grain) et jaune (grain moyen) pour l'ajustage des céramiques. Les disques oranges Universal et les disques Natural sont utilisés pour le polissage.



Kit intra-oral pour la mise en forme mineur et le polissage

Utiliser les pointes, cupules et disques Natural orange foncé à grain moyen pour le prépolissage suivis de ceux orange clair pour le polissage final.




Dernière finition

La brosse de polissage utilisée avec Ultradent™ Diamond Polish Mint permet d'obtenir un fini esthétique des restaurations en céramique.


MISE EN FORME EXTRA-ORAL

- Exercer une légère pression de la main
- Les instruments diamantés à gros grain et les pierres abrasives traditionnelles peuvent générer une chaleur élevée entraînant des microfractures et ne sont donc pas recommandés

Vitesse recommandée : 8 000 – 12 000 TPM

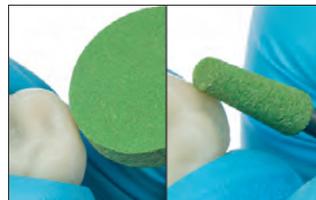

Les polissoirs Jiffy Universal Coarse Grinders (vert) sont recommandés pour le meulage des excès et la mise en forme brut.

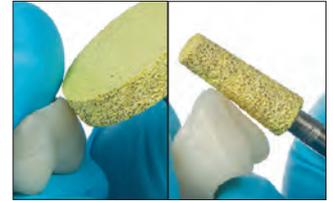

Les polissoirs Jiffy Universal Medium Grinders (jaune) sont destinés à l'ajustage du disilicate de lithium, de la zircone et de la porcelaine feldspathique.


POLISSAGE EXTRA-ORAL

- Exercer une légère pression de la main
- Réduire la vitesse à chaque étape pour obtenir une surface ultra-lisse

Vitesse recommandée : 7 000 – 10 000 TPM



1. Utiliser le disque Jiffy HP Medium Universal Wheel pour le prépolissage.

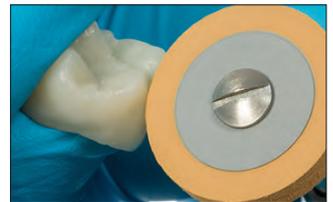


2. Utiliser le disque Jiffy HP Fine Universal Wheel pour le polissage final.


POLISSAGE INTRA-ORAL

- Exercer une légère pression de la main
- Réduire la vitesse à chaque étape pour obtenir une surface ultra-lisse

Vitesse recommandée : 5 000 – 7 000 TPM

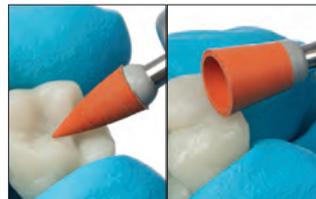

1. Utiliser la pointe et la cupule Jiffy Universal RA Medium pour le prépolissage.



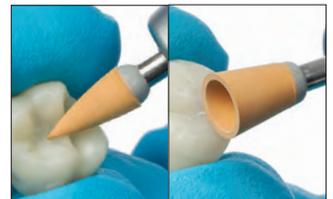


2. Utiliser la pointe et la cupule Jiffy Universal RA Fine pour le polissage final.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Le kit de mise en forme et de polissage intraoral JIFFY est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement. Il est utilisé pour la finition des composites. Non remboursé, Classe IIa, certifié MDC Medical device certificate GmbH, Kriegerstrasse 6, D-70191 Stuttgart.



RUGOSITÉ DE LA SURFACE (µin)³

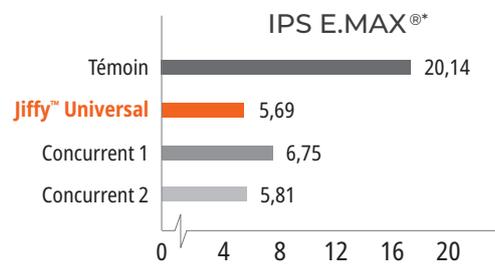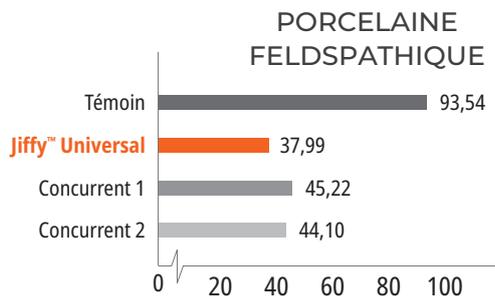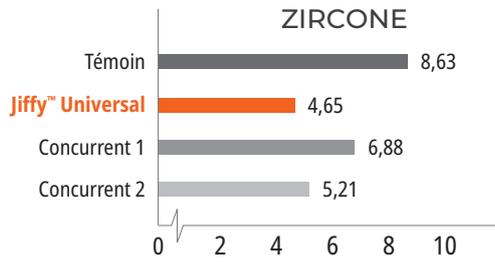

4018-1 – Jiffy Universal **Extraoral Adjusting & Polishing Kit** (Présentoir en aluminium)



4238-1 – Jiffy HP **Coarse Polishing Grinder Wheel 1 unité**
4241-1 – Jiffy HP **Medium Polishing Grinder Wheel 1 unité**



4239-1 – Jiffy HP **Coarse Polishing Grinder Taper 1 unité**
4242-1 – Jiffy HP **Medium Polishing Grinder Taper 1 unité**



4236-1 – Jiffy HP **Medium Polishing Wheel 1 unité**
4237-1 – Jiffy HP **Fine Polishing Wheel 1 unité**



4019-1 – Jiffy Universal **Intraoral Adjusting & Polishing Kit** (Présentoir en aluminium)



4108-1 – Jiffy RA **Medium Polishing Point 5 unités**
4109-1 – Jiffy RA **Fine Polishing Point 5 unités**



4234-1 – Jiffy RA **Medium Polishing Cup 5 unités**
4235-1 – Jiffy RA **Fine Polishing Cup 5 unités**

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Données internes. 3. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Jiffy destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié MDC GmbH, Stuttgart.



Brossettes de polissage Jiffy™ pour composite

STANDARD ET EN POINTE



Chaque brosse est un instrument de polissage. Des fibres spéciales sont imprégnées de particules abrasives de carbure de silice.

Mandrin doré



- Chaque brosse contient des milliers de particules abrasives imprégnées de carbure de silice
- Accès et polissage des sillons occlusaux des composites ou céramiques
- Pour le polissage des composites, les brosses tournent à une vitesse élevée sous forte pression dans une pièce à main à vitesse lente

Vitesse recommandée : 1 000 – 3 000 TPM



Utiliser les brosses Jiffy pour composite pour la finition de toutes les surfaces. Appliquer une pression pendant le polissage pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



850 – Jiffy Regular Brush **10 unités**
1009 – Jiffy Pointed Brush **10 unités**

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les brosses JIFFY sont destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement. Elles sont utilisées pour la finition et le lustrage des composites. Le traitement n'est pas remboursé, Classe IIa, certifié DQS Medizinprodukte GmbH, August-Schanz-Str. 21, D-60433 Frankfurt a. M.

1. realityesthetics.com.

Ultradent™ Diamond Polish Mint



Black Mini™ Tip

- Forte teneur en particules diamantées microcristallines blanches
- Polissage esthétique inégalé
- Idéale pour les restaurations en céramique ou en composite



5540 – Diamond Polish Mint Recharge 0,5 µm
5541 – Diamond Polish Mint Recharge 1 µm
2 seringues de 1,2 ml (1,40 g)

PrimaDry™ AGENT SICCATIF



Black Micro™ FX™ Tip

L'agent siccatif PrimaDry est composé à 99 % de solvants organiques et 1 % de primer, et il est idéal pour la préparation et le séchage des puits et des sillons. Il entraîne rapidement l'évaporation de l'humidité présente dans les puits et étancheifie les défauts microscopiques des restaurations existantes après le processus de mordantage. Le film de primer ultrafin permet à UltraSeal XT™ plus de pénétrer parfaitement dans tous les puits et sillons. Également utile avant la mise en œuvre de la réparation de composites. Il ne doit pas être utilisé sur la dentine.

RÉFRIGÉRER



716 – PrimaDry en seringue Recharge
4 seringues de 1,2 ml (0,95 g)

717 – PrimaDry en seringue Recharge économique
20 seringues de 1,2 ml (0,95 g)

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Ultradent Diamond Polish Mint destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc. PrimaDry destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, il n'est pas remboursé. Classe I, auto-certification Ultradent Products Inc.

1. realityesthetics.com.



Bandes diamantées Jiffy™



Ces bandes de finition sont souples, durables, fines et plus agressives que les bandes en oxyde d'aluminium. Les trous améliorent la visibilité pour un modelage plus précis. Disponibles en deux versions – large et étroite.



4670 – Bandes diamantées Jiffy perforées

Étroites Assortiment 15 unités

4674 – Bandes diamantées Jiffy perforées

Larges Assortiment 15 unités

5 bandes diamantées à revêtement électrolytique en acier inoxydable de chaque taille de grain (moyen, fin et extra-fin)



4671 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Étroites*

Grain moyen 10 unités

4683 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Larges*

Grain moyen 10 unités

10 bandes diamantées à revêtement électrolytique en acier inoxydable



4672 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Étroites*

Grain fin 10 unités

4676 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Larges*

Grain fin 10 unités

10 bandes diamantées à revêtement électrolytique en acier inoxydable



4673 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Étroites*

Grain extra-fin 10 unités

4677 – Bandes diamantées Jiffy perforées *Larges*

Grain extra-fin 10 unités

10 bandes diamantées à revêtement électrolytique en acier inoxydable

Scie proximale Jiffy™

La scie proximale Jiffy est une bande en acier inoxydable très fine avec un bord dentelé. Elle peut être stérilisée à l'autoclave ou à la chaleur sèche.



4680 – Scie proximale Jiffy Acier inoxydable 10 unités

10 lames de scie à ruban en acier inoxydable

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *Jiffy*, bandes diamantées et scies proximales, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, ils ne sont pas remboursés. Classe I, certifiées Dr Hopf GmbH, Langenhagen.

Lettres d'information électroniques d'Ultradent

Abonnez-vous gratuitement aux lettres d'information électroniques d'Ultradent pour recevoir les actualités sur les produits, les événements et plus encore.



Scannez le code QR pour vous inscrire dès aujourd'hui !



PermaSeal™

COMPOSITE DE RÉÉTANCHÉIFICATION



Black Micro™ FX™ Tip

- Adhère sur le composite et l'émail mordancé
- Étanchéfie les défauts microscopiques
- Protège et vitalise les restaurations composites

Le composite de réétanchéification PermaSeal est une résine photopolymérisable non chargée à base de méthacrylate. Sa faible viscosité lui confère un pouvoir de pénétration et la couche fine minimise le besoin d'ajustement occlusal.

Le composite de réétanchéification PermaSeal comble les espaces et irrégularités créés pendant le polissage, minimisant ainsi la coloration et l'usure. Son application sur les bords des composites de classe V permet de réduire les défauts microscopiques². Pour obtenir le brillant final des restaurations provisoires en résine, appliquer une solution barrière oxygène par-dessus le composite de réétanchéification PermaSeal avant la photopolymérisation. Le composite de réétanchéification PermaSeal adhère aux restaurations provisoires en composite et permet également de revitaliser les anciens composites.

NOUVELLES RESTAURATIONS



Avant : espaces interproximaux et légères rotations à corriger avec l'adhésif Peak™ Universal Bond associé à un composite.



Après restauration et polissage, mordancer pendant 5 secondes et appliquer composite de réétanchéification PermaSeal pour étanchéfier le composite et obtenir un fini brillant. Étaler à l'air comprimé puis photopolymériser pendant 10 secondes.

RESTAURATIONS EXISTANTES



Bien nettoyer les surfaces et les bords à sceller avec une pâte antibactérienne, une micro-sableuse, ou aviver avec une fraise puis rincer abondamment. Mordancer l'émail à proximité immédiate de la restauration ainsi que toutes les surfaces composites accessibles pendant 15 secondes. Si l'émail n'est pas préparé comme décrit ci-dessus, mordancer pendant 30 secondes.



Restauration composite, vieille de quatre ans, après traitement avec PermaSeal.



Lisser la surface de la restauration provisoire. Mordancer pendant 5 secondes, appliquer le sealant PermaSeal sur les surfaces, étaler doucement à l'air comprimé, couvrir avec une solution barrière à oxygène puis photopolymériser pendant 10 secondes.

RÉFRIGÉRER



631 – PermaSeal Kit

4 seringues de 1,2 ml (1,30 g)
10 embouts Black Micro FX Tips

RÉFRIGÉRER



1013 – PermaSeal Mini Kit

2 seringues de 1,2 ml (1,30 g)
10 embouts Black Micro FX Tips

Remarque : l'agent siccatif PrimaDry est parfait avec un séchage à l'air juste avant l'application du composite de réétanchéification PermaSeal.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *PermaSeal*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour combler les espaces et irrégularités. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

1. realityesthetics.com. 2. Dunn JR, Dole P, Fullerton B, Hennessey C. Microleakage of Class V composite restorations using a composite surface sealant. Biomaterials Research Center, Loma Linda University School of Dentistry. May 1996. Données internes.

MATÉRIEL



45 ANS
1978-2023

CAROLYN TAYLOR – Hanksville

Accessoires pour lampe à polymériser
Lampes à polymériser LED à large spectre
Lasers à diode
Lunettes de protection
Ciseaux



Famille VALO™

LAMPES À POLYMÉRISER À LED



Meilleure lampe à polymériser à LED



- LED à large spectre pour polymériser tous les matériaux dentaires
- Rayon lumineux collimaté pour une polymérisation régulière et homogène
- Modes de polymérisation polyvalents pour une adaptation à vos préférences et à vos besoins
- Construction extrêmement durable et fabrication avec de l'aluminium de qualité aéronautique pour une excellente gestion de la chaleur
- Corps monobloc ergonomique et élancé pour un accès inégalé à tous les sites de restauration²
- Construction en une pièce unique assurant longévité et légèreté
- LED à rendement élevé et aluminium monobloc de qualité aéronautique dissipant la chaleur au niveau du manche

RÉSULTAT CLINIQUE

La collimation et l'uniformité du faisceau d'une lampe à polymériser ont une influence sur la quantité d'énergie qui atteint le site de restauration. Un faisceau qui se disperse sera moins puissant qu'un faisceau qui reste collimaté et peut se traduire par des restaurations insuffisamment polymérisées et, finalement par des échecs. L'uniformité d'un faisceau a une influence sur l'énergie transmise au site de restauration. Un faisceau présentant des points chauds ou froids produit une polymérisation inégale pouvant fragiliser les restaurations et entraîner une hypersensibilité.

La lampe VALO est dotée de plusieurs LED et d'éléments optiques spécialisés pour émettre une énergie uniformément répartie de manière à obtenir des résultats réguliers, quel que soit le type, la taille ou l'emplacement de la restauration. Grâce à leur ensemble de LED avec puces en trois longueurs d'onde, les lampes à polymériser VALO™ permettent de polymériser tous les matériaux dentaires, même ceux qui contiennent des photo-initiateurs brevetés tels que la lucérine TPO et le PPD ou de la camphorquinone, qui est plus commune.


1. realityesthetics.com. 2. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/jjad.b1079561.

	VALO	VALO GRAND	VALO X
Taille réelle de la lentille	9,8 mm (78 mm ²)	11,7 mm (107 mm ²)	12,5 mm (144 mm ²)
Puces LED			
Longueur d'ondes	 385 nm - 515 nm	 385 nm - 515 nm	 380 nm - 515 nm
Puissance (mW)	STANDARD 670 MODE XTRA PUISSANCE 1570	STANDARD 970 MODE XTRA PUISSANCE 2260	STANDARD 1350 MODE XTRA PUISSANCE 2700
Irradiance (mW/cm ²)	STANDARD 900 MODE XTRA PUISSANCE 2100	STANDARD 900 MODE XTRA PUISSANCE 2100	STANDARD 1100 MODE XTRA PUISSANCE 2200
Joules @	STANDARD 6,7 MODE XTRA PUISSANCE 4,7	STANDARD 9,7 MODE XTRA PUISSANCE 6,8	STANDARD 13,5 MODE XTRA PUISSANCE 13,5
Profil du faisceau			
De haut en bas			




ACCESSIBILITÉ


Le profil effilé de la famille de lampes à polymériser VALO permet d'accéder facilement aux restaurations postérieures sans désagrément pour le patient¹. Leur tête mince permet de les positionner directement sur le site à polymériser, quelle que soit sa localisation dans la bouche, et assure ainsi une diffusion de la lumière à tous les points de la préparation. Les lentilles plus larges couvrent une large zone de polymérisation et garantissent une diffusion appropriée de la lumière au bon endroit.

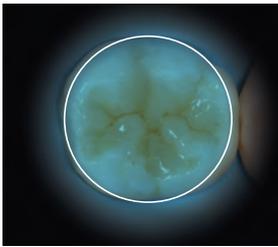

Surface de la lampe à polymériser VALO X
144 mm²

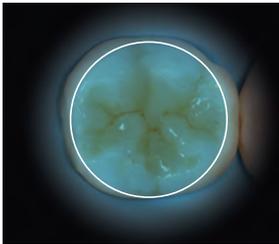

Surface de la lampe à polymériser VALO Grand
107 mm²

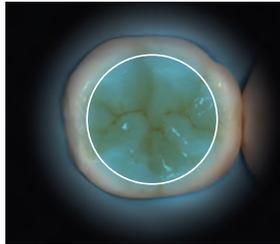


Surface de la lampe à polymériser VALO
78 mm²




L'angulation de 60° d'une lampe concurrente peut conduire à une trop grande ouverture de la mâchoire et, souvent, la lampe n'atteint pas toutes les surfaces de la préparation.



La tête mince de la lampe VALO permet un accès facile et direct à tous les sites à polymériser.

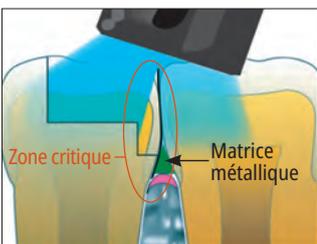

Un faisceau lumineux avec angle peut ne pas polymériser complètement une restauration avec matrice.

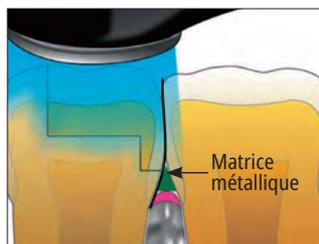


L'accès direct et le faisceau collimaté de la lampe VALO permettent une polymérisation totale.

DURABILITÉ

Toutes les lampes à polymériser VALO sont créées à partir d'une barre d'aluminium de haute qualité aéronautique, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Avec sa construction monobloc synonyme de robustesse et d'étanchéité, la lampe élimine les points faibles de connexion et les zones d'accumulation de charge microbienne.



L'usinage en une seule pièce de la lampe VALO garantit durabilité et excellente dissipation de la chaleur. De plus, sa forme élégante, ergonomique et élancée permet l'accès à des zones que les autres lampes à polymériser ne peuvent tout simplement pas atteindre.

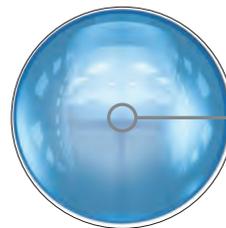

La lentille de verre unique produit le faisceau collimaté mixte de la lampe

GARANTIE FABRICANT DE 5 ANS

La famille de lampes à polymériser VALO est conçue pour durer, nous nous y engageons. Chaque lampe VALO bénéficie d'une garantie fabricant de 5 ans. C'est une valeur sûre.

1. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/j.jad.b1079561.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VALO X	VALO Grand	VALO
Plage d'intensités lumineuses (nm)	380 nm – 515 nm	385 nm – 515 nm	385 nm – 515 nm
Pics de longueur d'onde (nm)	380–420 nm et 420–515 nm	395–415 nm et 440–480 nm	395–415 nm et 440–480 nm
Puissance (mW)			
Standard	1350 mW	970 mW	670 mW
Haute puissance	S/O	1620 mW	920 mW
Mode Xtra puissance	2700 mW	2260 mW	1570 mW
Irradiance (mW/cm²)			
Standard	1100 mW/cm ²	900 mW/cm ²	900 mW/cm ²
Haute puissance	S/O	1500 mW/cm ²	1300 mW/cm ²
Mode Xtra puissance	2200 mW/cm ²	2100 mW/cm ²	2100 mW/cm ²
Total d'énergie par cycle			
Standard	13,5 J (10 secondes)	9,70 J (10 secondes)	6,65 J (10 secondes)
Haute puissance	S/O	6,46 J (4 secondes)	3,83 J (4 secondes)
Mode Xtra puissance	13,5 J (5 secondes)	6,30 J (3 secondes)	4,65 J (3 secondes)
Modes de polymérisation			
Standard	10 s	20/15/10/5 s	20/15/10/5 s
Haute puissance	S/O	1/2/3/4 s	1/2/3/4 s
Mode Xtra puissance	5 s	3 s	3 s

	VALO X	VALO Grand	VALO
Dimensions			
Cordless (sans fil)	22,6 x 2,1 x 2,1 cm (8,9 x 0,83 x 0,83 pouces)	20,3 x 3,3 x 2,7 cm (8 x 1,28 x 1,06 pouces)	20,3 x 3,3 x 2,7 cm (8 x 1,28 x 1,06 pouces)
Avec fil	22,6 x 2,1 x 2,1 cm (8,9 x 0,83 x 0,83 pouces) Longueur de fil: 1,80 m (6 pieds)	23,5 x 2 x 2 cm (9,26 x 0,79 x 0,79 pouces) Longueur de fil: 1,80 m (6 pieds)	23,5 x 2 x 2 cm (9,26 x 0,79 x 0,79 pouces) Longueur de fil: 1,80 m (6 pieds)
Poids du manche			
Cordless (sans fil)	Unité: 108 grammes (3,8 onces) Avec piles: 136 grammes (4,8 onces)	Unité sans fil: 150 grammes (5,3 onces) Avec piles: 190 grammes (6,7 onces)	Unité sans fil: 150 grammes (5,3 onces) Avec piles: 190 grammes (6,7 onces)
Avec fil	Avec fil: 158 grammes (5,6 onces)	Unité avec fil: 226 grammes (8 onces)	Unité avec fil: 226 grammes (8 onces)
Alimentation électrique	Sans fil/pile ou avec fil	Unité sans fil/pile Unité avec fil	Unité sans fil/pile Unité avec fil
Pile	Pile Lithium-Ion protégée et rechargeable 1IMR14/65 3,7 V, 900 mAh 3,33 WH	Accumulateur lithium fer phosphate rechargeable, à sécurité chimique (LiFePO4) RCR123 A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 WH	Accumulateur lithium fer phosphate rechargeable, à sécurité chimique (LiFePO4) RCR123 A, 3,2 V, 400 mAh 1,28 WH

**Irradiance conforme à la norme ISO 10650 lorsque mesurée avec un analyseur de spectre Gigahertz.*



Scannez pour voir la vidéo de toute l'histoire



VALO™


UNE LONGÉVITÉ D'UN AUTRE MONDE



Lentilles accessoires pour VALO™ et VALO™ Grand

Les lentilles sont réutilisables et doivent être désinfectées avec un désinfectant de moyenne activité.

PointCure™ Lens

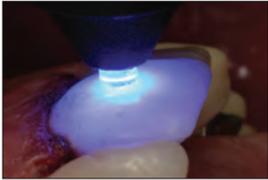

La lentille PointCure est une lentille claire de 2,5 mm de diamètre utilisée pour la polymérisation précise des petits composites, pour faciliter le positionnement et la polymérisation rapide.

VALO	2 unités
PointCure Lens	5934



VALO Grand	2 unités
PointCure Lens	4082



ProxiCure™ Ball Lens



La lentille ProxiCure Ball contribue à maintenir la matrice en contact interproximal au cours de la polymérisation.

VALO	2 unités
ProxiCure Ball Lens	5936



VALO Grand	2 unités
ProxiCure Ball Lens	4081



TransLume™ Lens



La lentille TransLume facilite la visualisation et la localisation des fissures, des défauts des dents ou des matériaux de restauration.


VALO	2 unités
TransLume Lens	5937



VALO Grand	2 unités
TransLume Lens	4084



Interproximal Lens

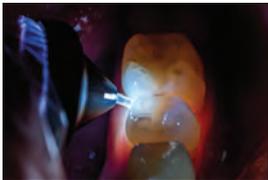

La lentille interproximale est une lentille de 1 mm à lumière blanche qui permet le positionnement de cette dernière entre les dents pour une observation des ombres, des anomalies ou des caries dans les espaces interproximaux.

VALO	2 unités
Interproximal Lens	4629



VALO Grand	2 unités
Interproximal Lens	4658



Black Light Lens



La lentille à lumière noire aide à détecter les particules fluorescentes dans les résines, facilitant ainsi la différenciation avec l'émail naturel.

VALO	1 unité
Black Light Lens	5939



VALO Grand	1 unité
Black Light Lens	4319



White Light Lens



La lentille à lumière blanche constitue une source lumineuse naturelle pure et contrôlée pour une correspondance de teinte précise.

VALO Grand	2 unités
White Light Lens	4628



DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les lentilles, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisées pour la collimation de la lumière et ne sont pas remboursées. Classe I, certifiées TUV Nord, Ultradent Inc.



VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT

LA LAMPE À POLYMÉRISER RÉINVENTÉE

TOTALEMENT REPENSÉE

- Reconstituée de zéro pour créer la lampe à polymériser la plus innovante sur le marché

LENTILLE PLUS GROSSE

- La lentille de 12,5 mm couvre n'importe quelle dent sans nuire à l'accessibilité ni au confort du patient

PLUSIEURS CONFIGURATIONS

- Peut être utilisée avec ou sans fil (batterie et cordon inclus dans le kit)

FONCTION D'ACCÉLÉROMÈTRE

- Permet de basculer rapidement et facilement entre les modes polymérisation et diagnostic

ALUMINIUM DE HAUTE QUALITÉ AÉROSPATIALE

- La conception monobloc est exceptionnellement durable et permet une excellente gestion de la chaleur

INTERFACE SIMPLIFIÉE

- Les modes de polymérisation et de lumière de diagnostic sont indiqués, actionnés et activés avec les boutons situés en haut et en bas ou avec la fonction Accéléromètre

GARANTIE 5 ANS

- Inclut une garantie du fabricant de 5 ans

JEU DE PUCES À 12 LED

- Assure une lumière de forte intensité à large bande pour une uniformité du faisceau, une profondeur de polymérisation et une collimation du faisceau excellentes

MODES DE POLYMÉRISATION : Puissance standard, Puissance Xtra | MODES LUMIÈRE DE DIAGNOSTIC : Aide au diagnostic à lumière blanche, Aide au diagnostic à lumière noire

POUR PASSER D'UN MODE À L'AUTRE




MODES DE POLYMÉRISATION :
Déplacer la lampe VALO X vers l'avant avec un mouvement de tapotement pour accéder aux modes de polymérisation et passer de l'un à l'autre.



MODES LUMIÈRE DE DIAGNOSTIC :
Déplacer la lampe VALO X avec un mouvement de tapotement vers le côté pour accéder aux modes lumière de diagnostic et passer de l'un à l'autre.

LENTILLES ACCESSOIRES INCLUSES

DEUX LENTILLES DE POLYMÉRISATION

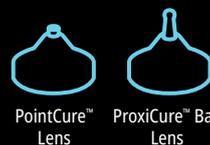

PointCure™ Lens ProxiCure™ Ball Lens

TROIS LENTILLES DE DIAGNOSTIC



TransLume™ Lens Lentille interproximale Lentille de diffusion



VALO™ X

LAMPE À POLYMÉRISER À LED À LARGE SPECTRE



Lentille
plus
grande
(12,5 mm)

- 12 LED à spectre large pour polymériser tous les matériaux dentaires
 - Rayon lumineux collimaté pour une polymérisation régulière et homogène
 - Deux modes de polymérisation – Standard, Haute puissance et Xtra puissance – pour une adaptation à vos préférences
 - Construction extrêmement durable et fabrication avec de l'aluminium de qualité aéronautique pour une excellente gestion de la chaleur
 - Interface simplifiée incluant les modes de diagnostic et de polymérisation
 - Corps monobloc ergonomique et élancé pour un accès inégalé à tous les sites de restauration¹
 - Nouvelle fonction Accéléromètre pour une bascule rapide entre les modes avec un mouvement de tapotement
 - Deuxième bouton d'activation situé en bas pour un fonctionnement intuitif
 - Cinq lentilles accessoires incluses dans le kit pour le diagnostic et la polymérisation
 - L'adaptateur secteur permet aux praticiens d'utiliser la lampe avec ou sans fil
- Un bloc d'alimentation universel peut être utilisé sur des prises électriques de 100 à 240 volts ; aucune pile nécessaire

La lampe VALO X est la lampe à polymériser revisitée. Sa conception simplifiée permet l'activation au moyen d'un bouton et sa fonction Accéléromètre permet au praticien de basculer entre les modes de puissance et de diagnostic d'un coup de baguette magique. Cela élimine les tâtonnements maladroits en cours de procédure, réduit le risque de laisser tomber l'instrument et aide le praticien à rester concentré sur la tâche en cours. La lampe est dotée d'une diode électroluminescente (LED) à longueurs d'onde multiples pour la production d'une lumière de haute intensité couvrant un spectre de 380 à 515 nm, ce qui permet de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables, tout en assurant une excellente largeur de polymérisation et des performances régulières. Cette intensité pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes. Le manche se loge dans tout support d'unité dentaire standard ou dans son propre support inclus dans le kit.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écran protecteur, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour protéger de la lumière et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les manchons protecteurs, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour protéger la lampe et ne sont pas remboursés. Classe I, certifiés Tidi Products.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALO X, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.



5973 – Kit VALO X Corded

- 1 lampe à polymériser LED VALO X
- 5 lentilles accessoires
- 2 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 bloc d'alimentation (pour chargeur de piles ou cordon)
- 1 cordon
- 1 support pour pièce à main
- 1 écran protecteur contre la lumière bleue
- 1 échantillon de manchons protecteurs



4952 – VALO X Bloc d'alimentation (fiches universelles) 1 unité



5189 – VALO X Cordon assemblé 1 unité



4951 – VALO X Chargeur de piles 1 unité



5437 – VALO X Piles 2 unités



4665 – VALO X Manchons protecteurs 100 unités

1. Moreira RJ, de Deus RA, Ribeiro MTH, et al. Effect of light-curing unit design and mouth opening on the polymerization of bulk-fill resin-based composite restorations in molars. J Adhes Dent. 2021;23(2):121-131. doi:10.3290/j.jad.b1079561.



MATÉRIEL

VALO™ Grand Cordless LAMPE À LED



50%
Lentille
plus
grande
(12 mm)



Meilleure
lampe à polymériser
à LED

- LED à spectre large pour polymériser tous les matériaux dentaires
- Rayon lumineux collimaté
- Trois modes de polymérisation – Puissance Standard, Haute puissance et Xtra puissance
- Accès à tous les sites de restauration
- Construction en une pièce unique
- Aluminium monobloc de qualité aéronautique

- Deuxième bouton d'activation situé en bas
- Modèle sans fil fonctionnant avec piles
- Piles rechargeables

La lampe à polymériser VALO Grand Cordless est dotée d'une diode électroluminescente (LED) à longueurs d'onde multiples pour la production d'une lumière de haute intensité couvrant un spectre de 385 à 515 nm, ce qui permet de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes. La lampe à polymériser VALO Grand Cordless fonctionne avec les piles rechargeables VALO et un chargeur de piles pour prises électriques de 100 à 240 volts. Le manche se loge dans tout support d'unité dentaire standard ou dans son propre support inclus dans le kit. Il peut également être rangé sur un comptoir ou dans un tiroir. La lampe à polymériser VALO Grand est dotée d'un capteur enregistrant les mouvements de la lampe. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la lampe VALO Grand se met automatiquement en veille. Il suffit de la bouger pour qu'elle se rallume sur le dernier mode utilisé.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écran protecteur VALO GRAND, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour protéger de la lumière pendant la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les manchons protecteurs, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour protéger la lampe et ne sont pas remboursés. Classe I, certifiés Tidi products.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALO GRAND, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifiée TÜV Nord, Ultradent Inc.



- 5972 – Kit VALO Grand Cordless – Noir
- 4866 – Kit VALO Grand Cordless – Bleu nuit
- 4864 – Kit VALO Grand Cordless – Saphir
- 4865 – Kit VALO Grand Cordless – Rouille
- 1 lampe à polymériser à LED VALO Grand Cordless
- 4 piles rechargeables
- 1 chargeur de piles
- 1 bloc d'alimentation pour chargeur
- 1 support pour pièce à main
- 1 écran protecteur contre la lumière bleue
- 1 échantillon de manchons protecteurs

AVERTISSEMENT : Utiliser exclusivement les piles rechargeables recommandées dans le mode d'emploi. Certaines piles rechargeables peuvent perturber le fonctionnement de la lampe à polymériser VALO.

5963 – VALO Grand Piles rechargeables 2 unités



5962 – VALO Grand Chargeur de piles 1 unité



5961 – VALO Bloc d'alimentation pour chargeur 1 unité

1667 – Support VALO Mounting Bracket 1 unité



3604 – VALO Grand Écran protecteur 1 unité



4666 – VALO Grand Cordless
Manchons protecteurs 100 unités



508 – Lunettes UltraTect 1 unité



VALO™ Cordless
LAMPE À PHOTOPOLYMERISER LED



- 5941 – VALO Cordless Kit**
1 lampe à polymériser à LED VALO Cordless
4 piles rechargeables
1 chargeur de piles
1 bloc d'alimentation pour chargeur
1 support pour pièce à main
1 écran protecteur contre la lumière bleue
1 échantillon de manchons protecteurs



Meilleure lampe à polymériser à LED

- LED à spectre large
- Rayon lumineux collimaté
- Trois modes de polymérisation – Puissance Standard, Haute puissance et Xtra puissance
- Accès à tous les sites de restauration
- Construction en une pièce unique
- Aluminium monobloc de qualité aéronautique
- Modèle sans fil fonctionnant avec piles
- Piles rechargeables

La lampe à polymériser VALO Cordless est dotée d'une diode électroluminescente (LED) à longueurs d'onde multiples pour la production d'une lumière de haute intensité couvrant un spectre de 385 à 515 nm, ce qui permet de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes. La lampe à polymériser VALO Cordless fonctionne avec les piles rechargeables VALO et un chargeur de piles pour prises électriques de 100 à 240 volts. Le manche se loge dans tout support d'unité dentaire standard ou dans son propre support inclus dans le kit. Il peut également être rangé sur un comptoir ou dans un tiroir. La lampe à polymériser VALO Cordless est dotée d'un capteur enregistrant les mouvements de la lampe. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la lampe VALO Cordless se met automatiquement en veille. Il suffit de la bouger pour qu'elle se rallume sur le dernier mode utilisé.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écran protecteur VALO, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour protéger de la lumière pendant la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les manchons protecteurs, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour protéger la lampe et ne sont pas remboursés. Classe I, certifié. Classe I, certifiés Tidi Products.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALO, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.

AVERTISSEMENT : Utiliser exclusivement les piles rechargeables recommandées dans le mode d'emploi. Certaines piles rechargeables peuvent perturber le fonctionnement de la lampe à polymériser VALO.

5963 – VALO Cordless Piles rechargeables 2 unités



5962 – VALO Cordless Chargeur de piles 1 unité



5961 – VALO Cordless Bloc d'alimentation 1 unité



1667 – Support VALO Mounting Bracket 1 unité



5929 – VALO Cordless Écran protecteur 1 unité



4667 – VALO Cordless Manchons protecteurs 100 unités



508 – Lunettes UltraTect 1 unité



MATÉRIEL

VALO™ Grand Corded LAMPE À POLYMÉRISER À LED



50%
Lentille
plus
grande
(12 mm)



5971 – Kit VALO Grand Corded

- 1 lampe à polymériser à LED VALO Grand – cordon de 2,13 m
- 1 bloc d'alimentation avec fiches universelles – cordon de 1,83 m
- 1 support pour pièce à main
- 1 paire de lunettes de protection contre la lumière bleue
- 1 échantillon de manchons protecteurs



Meilleure
lampe à polymériser
à LED

- LED à spectre large
 - Rayon lumineux collimaté
 - Trois modes de polymérisation – Puissance Standard, Haute puissance et Xtra puissance
 - À tous les sites de restauration
 - Construction en une pièce unique
 - Aluminium monobloc de qualité aéronautique
 - Deuxième bouton d'activation
- Un bloc d'alimentation universel peut être utilisé sur des prises électriques de 100 à 240 volts ; aucune pile nécessaire

La lampe à polymériser à LED VALO Grand est dotée d'une diode électroluminescente (LED) à longueurs d'onde multiples pour la production d'une lumière de haute intensité couvrant un spectre de 385 à 515 nm, ce qui permet de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes. La lampe à polymériser VALO est fournie avec un bloc d'alimentation universel de qualité médicale et peut être utilisée sur des prises électriques de 100 à 240 volts. Le manche se loge dans tout support d'unité dentaire standard ou dans son propre support inclus dans le kit.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les manchons protecteurs, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour protéger la lampe et ne sont pas remboursés. Classe I, certifiés Tidi Products.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écran protecteur, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour protéger de la lumière lors de la photopolymérisation et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALO GRAND, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.



5930 – VALO Bloc d'alimentation – cordon de 1,83 m

5933 – VALO Bloc d'alimentation – cordon de 4,88 m

1667 – VALO Surface Mounting Bracket 1 unité



4669 – VALO Grand Manchons protecteurs 100 unités



508 – Lunettes UltraTect 1 unité



VALO™ Corded

LAMPE À POLYMÉRISER À LED



5919 – VALO Kit

- 1 lampe à polymériser à LED VALO – cordon de 2,13 m
- 1 bloc d'alimentation avec fiches universelles – cordon de 1,83 m
- 1 support pour pièce à main
- 1 écran protecteur contre la lumière bleue
- 1 échantillon de manchons protecteurs



5930 – VALO Bloc d'alimentation – cordon de 1,83 m



5933 – VALO Bloc d'alimentation – cordon de 4,88 m



1667 – Support VALO Mounting Bracket 1 unité



5935 – VALO Écran protecteur 1 unité



4668 – VALO Manchons protecteurs 100 unités



508 – Lunettes UltraTect 1 unité



Meilleure
lampe à polymériser
à LED

- LED à spectre large
- Rayon lumineux collimaté
- Trois modes de polymérisation – Puissance Standard, Haute puissance et Xtra puissance
- À tous les sites de restauration
- Construction en une pièce unique
- Aluminium monobloc de qualité aéronautique
- Un bloc d'alimentation universel peut être utilisé sur des prises électriques de 100 à 240 volts ; aucune pile nécessaire

La lampe à polymériser LED VALO avec fil est dotée d'une diode électroluminescente (LED) à longueurs d'onde multiples pour la production d'une lumière de haute intensité couvrant un spectre de 385 à 515 nm, ce qui permet de polymériser tous les matériaux dentaires photopolymérisables. Cette intensité pénètre également la céramique et permet de polymériser les résines sous-jacentes. La lampe à polymériser VALO est fournie avec un bloc d'alimentation universel de qualité médicale et peut être utilisée sur des prises électriques de 100 à 240 volts. Le manche se loge dans tout support d'unité dentaire standard ou dans son propre support inclus dans le kit.

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les manchons protecteurs, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour protéger la lampe et ne sont pas remboursés. Classe I, certifiés TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'écran protecteur, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour protéger de la lumière et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALO, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.



Gemini™ & Gemini EVO™

LASERS À DIODE 810 + 980



- Le modèle 3-en-1 vous permet de choisir les longueurs d'onde optimales pour la coagulation, l'ablation ou une combinaison des deux
- Puissance de pointe super-pulsée pour une coupe plus rapide et plus douce avec une meilleure prédictibilité clinique et un traitement plus efficace⁷
- Superbe conception avec une interface utilisateur plus conviviale incluant des procédures préprogrammées classées dans les catégories non chirurgicale, chirurgicale et photobiomodulation pour une commande plus intuitive et plus conviviale
- Fonctionnement sur batterie et pédale sans fil pour un déplacement aisé d'un poste à l'autre
- Embouts à usage unique et pièce à main autoclavable exclusifs pour une utilisation simple du laser et une stérilisation aisée entre les interventions
- Options de photobiomodulation innovantes pour soulager la douleur et permettre à vos patients de bénéficier pleinement des avantages du laser
- Conçue/assemblée aux É.-U. avec des composants fabriqués aux É.-U./à l'étranger


Les lasers à diode pour tissus mous présentent plusieurs avantages par rapport aux méthodes classiques, ce qui en fait un excellent ajout dans tous les cabinets dentaires. Les lasers à diode pour tissus mous sont mini-invasifs et peuvent être utilisés pour toutes les procédures sans qu'il soit nécessaire de pratiquer des incisions ou des sutures, ce qui réduit les traumatismes, les saignements et l'inconfort du patient.

Ils sont en outre souvent associés à moins de douleur et d'œdèmes par rapport aux procédures exécutées avec des méthodes classiques, telles que l'électrocautérisation ou l'usage d'un bistouri, et raccourcissent ainsi le délai de cicatrisation pour un plus grand confort et une plus grande satisfaction des patients. La possibilité de cibler et traiter plus précisément des zones spécifiques du tissu mou se traduit par des résultats plus prédictibles et cohérents.


AVANTAGES	SCALPEL	ELECTRO-CHIRURGIE	LASER
Élimination efficace des tissus mous	X	X	X
Excellente hémostase		X	X
Généralement sans danger autour des implants	X		X
Nécessite moins d'anesthésie			X
Réduit les douleurs post-opératoires			X
Moins de risque de récession gingivale	X		X
Réduit le gonflement et l'inconfort			X
Ne requiert pas de sutures		X	X
Décontamine les bords de la plaie		X	X
Photobiomodulation			X

Les lasers à diode pour tissus mous dentaires fonctionnent en émettant un faisceau lumineux concentré (rayonnement infrarouge non ionisant d'une longueur d'onde comprise entre 800 et 980 nm) qui est absorbé par l'eau, l'hémoglobine et les molécules de pigment qui se trouvent dans le tissu mou. Ce phénomène chauffe les molécules qui s'évaporent et permet au laser de couper au travers du tissu avec une grande précision. De plus, le laser coagule, cautérise les terminaisons nerveuses et décontamine le tissu environnant pour une meilleure hémostase, un moindre inconfort pour le patient et un risque plus faible d'infections postopératoires.

Il est important de choisir la longueur d'onde optimale pour maximiser l'efficacité du laser dans les applications sur tissu mou. Les modèles 810 nm, 980 nm et double longueur d'onde de la famille de lasers Gemini permettent d'associer la meilleure absorption de mélanine, d'hémoglobine et d'eau pour offrir la plus grande polyvalence clinique^{3,4}.

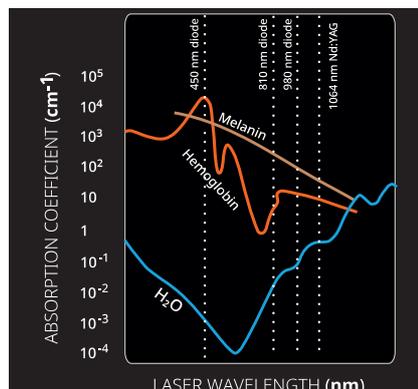

Les résultats recherchés avec le plus faible risque de lésion involontaire due à la chaleur peuvent être obtenus grâce à des impulsions très courtes au flux énergétique surfacique le plus élevé pendant le temps le plus court possible^{1,2}. La puissance de pointe pulsée élevée du laser Gemini permet une ablation efficace, tandis que les impulsions courtes permettent le refroidissement des tissus mous pendant la procédure, ce qui réduit la carbonisation et les lésions dues à la chaleur sur les tissus adjacents. Cela se traduit par un plus grand confort du patient sans compromettre la rapidité ni l'efficacité du traitement^{1,2}.

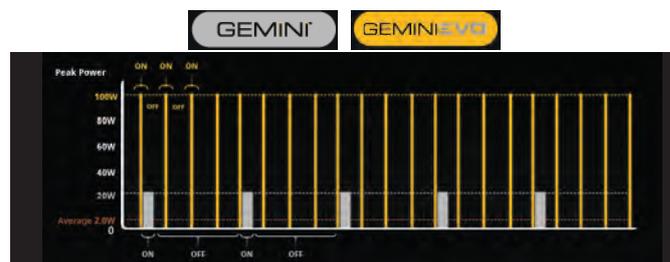

Puissance moyenne en watt, fibre de 400 microns, vitesse à contrôle robotique.



PROCÉDURES CHIRURGICALES

- Biopsie-exérèse et biopsie simple • Exposition de dents enclavées • Résection de fibrome
- Freinectomie • Frénotomie • Approfondissement de sulcus pour l'empreinte coronaire • Gingivectomie
- Gingivoplastie • Incision et excision gingivales • Hémostase et coagulation • Dégagement d'implant
- Incision et drainage d'abcès • Résection de lésion (tumeur) • Leucoplasie • Operculéctomie
- Papillectomie orale • Pulpotomie • Pulpotomie en complément d'un traitement endocanalaire
- Réduction d'une hypertrophie gingivale • Allongement coronaire au niveau du tissu mou
- Traitement des aphtes ainsi que des ulcérations herpétiques et aphteuses de la muqueuse buccale
- Vestibuloplastie



Gingivectomie



Frénotomie



Biopsie/Fibrome



Exposition de la canine

PROCÉDURE PROPHYLACTIQUE

- Curetage au laser des tissus mous • Réduction de la charge bactérienne (décontamination) et de l'inflammation • Élimination du tissu mou malade, infecté, enflammé et nécrosé dans la poche parodontale
- Élimination du tissu œdémateux très enflammé touché par la pénétration bactérienne de la poche
- Débridement sulculaire (élimination du tissu mou malade, infecté, enflammé et nécrosé dans la poche parodontale pour améliorer les indices cliniques dont l'indice gingival, l'indice de saignement gingival, la profondeur de sondage, la perte d'attache et la mobilité des dents)



Décontamination ou réduction bactérienne au laser



Curetage/Débridement au laser

PHOTOBIO-MODULATION



Les lasers Gemini et Gemini EVO offrent des options de traitement par photobiomodulation (PBM), permettant ainsi aux praticiens de soulager la douleur des patients présentant différents problèmes dentaires ou un inconfort postopératoire. Les accessoires de PBM intégrés facilitent l'émission d'une énergie lumineuse pour améliorer la fonction cellulaire, pour réduire la douleur et l'inflammation et pour favoriser une cicatrisation plus rapide^{5,6}. À noter, seul le laser Gemini EVO intègre totalement la PBM comme une fonctionnalité standard.

1. Goharkhay K, Moritz A, Wilder-Smith P, et al. Effects on oral soft tissue produced by a diode laser in vitro. Lasers Surg Med. 1999;25(5):401-406. doi:10.1002/(sici)1096-9101(1999)25:5<401::aid-lsm6>3.0.co;2-u
2. R. Borchers. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. Int J Laser Dent. 2011; 1(1):17-27.
3. S Pirnat. Versatility of 810 nm laser in dentistry. J Laser Health Academy, 2007; (4).
4. Akbulut N, Kursun ES, Tumer MK, Kamburoglu K, Gulsen U. Is the 810-nm diode laser the best choice in oral soft tissue therapy?. Eur J Dent. 2013;7(2):207-211. doi:10.4103/1305-7456.11017
5. Ross G, Ross A. Photobiomodulation: an invaluable tool for all dental specialties. J Laser Dent. 2009;17(3):117-124.
6. Märmora BC, Brochado FT, Schmidt TR, et al. Defocused high-power diode laser accelerates skin repair in a murine model through REDOX state modulation and reepithelization and collagen deposition stimulation. J Photochem Photobiol B. 2021;225:112332. doi:10.1016/j.jphotobiol.2021.112332
7. R Borchers. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. Int J Laser Dent. 2011; 1(1):17-27.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Gemini EVO est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, c'est un laser à diode utilisé pour préparer et couper les tissus mous. Classe IIb, certifié BSI.



Gemini™

LASER À DIODE 810 + 980



Scannez ici pour entrer en relation avec d'autres fans du laser Gemini sur notre site Web

- 20 watts de puissance de pointe pulsée pour une coupe plus rapide et plus douce¹
- La technologie de double longueur d'ondes associe l'absorption optimale de mélanine de la longueur d'ondes 810 nm et l'absorption optimale d'eau de la longueur d'ondes 980 nm dans les lasers à diode^{2,3}
- Les lignes pures mettent en valeur un superbe écran électroluminescent transparent
- Interface utilisateur simple et 20 procédures préprogrammées pour une plus grande facilité d'utilisation (Soulagement de la douleur préprogrammé disponible avec le kit d'adaptateur de PBM)
- Pédale sans fil et fonctionnement sur batterie pour un déplacement aisé d'un poste à l'autre
- Pièce à main autoclavable pour une stérilisation aisée entre les interventions
- Conçue et assemblée aux É.-U. avec des composants fabriqués aux É.-U. et à l'étranger

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Gemini est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, c'est un laser à diode utilisé pour préparer et couper les tissus mous. Classe IIb, certifié BSI.

Le laser Gemini™ dispose d'un adaptateur de PBM. La photobiomodulation (PBM) est une réaction photochimique au cours de laquelle l'énergie lumineuse d'une certaine longueur d'onde, intensité et durée est absorbée au niveau cellulaire, améliorant ainsi la circulation, l'oxygénation et l'activité enzymatique locales.


Les bénéfices de la PBM incluent :

- Soulagement temporaire de la douleur
- Amélioration de la circulation sanguine locale
- Relâchement musculaire
- Réduction de l'inflammation
- Accélération de la cicatrisation
- Amélioration de la fonction cellulaire, notamment dans les cellules stressées

1. R Borchers. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. Int J Laser Dent. 2011; 1(1):17-27. 2. S Pirnat. Versatility of 810 nm laser in dentistry. J Laser Health Academy, 2007; (4). 3. Akbulut N, Kursun ES, Tumer MK, Kamburoglu K, Gulsen U. Is the 810-nm diode laser the best choice in oral soft tissue therapy?. Eur J Dent. 2013;7(2):207-211. doi:10.4103/1305-7456.110174.



COMPARAISON DE LA PUISSANCE DE POINTE DE LASERS À DIODE^{1,2}

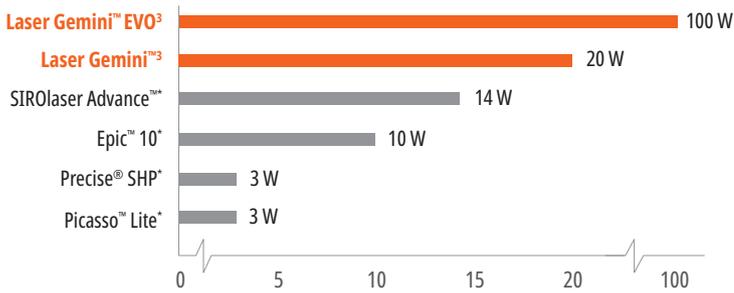

8990 – Gemini Kit laser
 1 laser Gemini
 1 bloc d'alimentation
 1 pédale
 1 pièce à main
 3 x paires de lunettes de protection
 10 embouts de 5 mm



8991 – Gemini Bloc d'alimentation 1 unité



8992 – Gemini Pédale 1 unité



8998 – Kit d'adaptateur de PBM pour Gemini
 1 adaptateur de photobiomodulation (PBM)
 2 écarteurs
 1 clip pour support de pièce à main
 1 chiffon de nettoyage



8993 – Gemini Embout 5 mm pré-activé 25 unités

8994 – Gemini Embout 7 mm non activé 25 unités



8995 – Gemini Lunettes de protection 1 unité



8999 – Kit d'embouts écarteurs pour PBM pour Gemini – 5 unités



8996 – Coque pour pièce à main 1 unité

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. Données publiées par le fabricant. 2. Puissance de pointe en mode double longueur d'ondes. 3. S. Pirnat. Versatility of 810 nm laser in dentistry. J Laser Health Academy, 2007; (4).

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Le kit d'adaptateur Gemini est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, lors des procédures de PBM réalisées avec le laser à diode Classe I, certifié Azena Medical LLC.



Gemini EVO™

LASER À DIODE 810 + 980



PROCÉDURES PRÉPROGRAMMÉES

LA PHOTOBIMODULATION SIMPLIFIÉE

- Puissance de sortie maximale de 100 watts pour une coupe plus rapide, une moindre production de chaleur et des incisions du tissu mou extrêmement nettes¹
- Connectivité Wi-Fi pour des mises à jour en direct et une assistance technique spécifique
- L'application mobile et le tableau de bord permettent de surveiller les statistiques d'utilisation, y compris le RCI et les données des procédures
- Trois adaptateurs de photobiomodulation (3 mm, 7 mm et 25 mm) sont inclus pour vous permettre de bénéficier pleinement des avantages du laser
- Affichage en continu et interface utilisateur pour un contrôle plus intuitif et plus convivial
- Trois modes de longueur d'ondes
- 16 procédures préprogrammées divisées en trois catégories pour une utilisation efficace et intuitive
- Utilisation des mêmes embouts que le laser Gemini original
- Deux ans de garantie avec option d'extension à cinq ans



Avec le tableau de bord de Gemini EVO, vous pouvez visualiser le nombre de procédures que vous réalisez, suivre le RCI, vérifier que votre logiciel est à jour, télécharger les rapports sur les procédures, surveiller les statistiques d'utilisation, et plus encore !

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Gemini EVO est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, c'est un laser à diode utilisé pour préparer et couper les tissus mous. Classe IIb, certifié BSI.

1. R Borchers. Comparison of diode lasers in soft tissue surgery using CW and superpulsed mode, an in vivo study. Int J Laser Dent. 2011; 1(1):17-27.



9120 – Gemini EVO Kit laser
 1 laser Gemini EVO
 1 pédale
 3 paires de lunettes de protection
 10 embouts fibrés jetables de 5 mm
 1 bloc d'alimentation c.c.
 3 adaptateurs de PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)



9126 – Gemini EVO Bloc d'alimentation 1 unité



9127 – Gemini EVO Coque pour pièce à main 1 unité



8995 – Gemini EVO Lunettes de protection 1 unité



8993 – Gemini EVO Embout 5 mm pré-activé 25 unités
8994 – Gemini EVO Embout 7 mm non activé 25 unités

Remarque : si vous souhaitez commander les adaptateurs de PBM ou la pédale pour Gemini EVO, veuillez contacter le service clients d'Ultradent Products.



9123 – Kit d'adaptateur de PBM intra-oral pour Gemini EVO
 1 adaptateur de photobiomodulation (PBM) de 3 mm
 1 adaptateur de photobiomodulation (PBM) de 7 mm

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Le kit d'adaptateur Gemini EVO est destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, lors des procédures de PBM réalisées avec le laser à diode Classe I, certifié Azena Medical LLC.



9124 – Kit d'adaptateur de PBM extra-oral pour Gemini EVO
 1 adaptateur de photobiomodulation (PBM) de 25 mm
 2 écarteurs
 1 chiffon de nettoyage



8999 – Kit d'embouts écarteurs pour PBM pour Gemini – 5 unités



5764 – Gemini EVO Pédale rechargeable Pile Li-Ion et kit USB 1 unité

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les embouts préactivés sont destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, utilisés pour préparer et couper les tissus mous. Classe IIa, certifiés BSI.



UltraTect™

LUNETTES DE PROTECTION




Les lunettes UltraTect sont fabriquées pour l'environnement dentaire moderne. La monture légère et les verres en polycarbonate sont confortables et durables. Ils sont en outre conformes aux normes de sécurité ANSI et CE pour la protection contre les blessures dues aux impacts et l'exposition aux produits chimiques.

Remarque : ne protègent pas des rayons laser.



La monture est souple et résiste aux impacts.

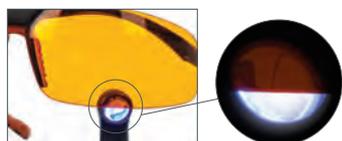

Les verres oranges assurent une protection contre la lumière bleue émise par les lampes à polymériser VALO™.



914 – Monture marron/Verres marrons **1 unité**

501 – Monture noire/Verres clairs **1 unité**

508 – Monture noire/Verres oranges **1 unité**

(Lunettes de protection contre la lumière bleue)

Ciseaux crantés Ultradent™ Ultra-Trim

- Découpe précise du bord de la gouttière autour des papilles interdentaires
- À ressort pour ménager les doigts
- Bonne prise du matériau des gouttières
- En acier inoxydable



605 – Ciseaux crantés Ultradent Ultra-Trim **1 unité**

Lettres d'information électroniques d'Ultradent

Abonnez-vous gratuitement aux lettres d'information électroniques d'Ultradent pour recevoir les actualités sur les produits, les événements et plus encore.



Scannez le code QR pour vous inscrire dès aujourd'hui !

ENDODONTIE



45 ANS
1978-2023

TIFFANY DRAPER – House On Fire

Ciment pour réparation à base d'agrégat de trioxyde minéral
Ciment endocanalaire
Gutta-percha enrobée de résine
Lubrifiants pour limes
Pâte d'hydroxyde de calcium
Citric Acid
Embouts endodontiques
Forets et tenons
Résine provisoire photopolymérisable



Endo-Eze™ MTAFlow™ White et MTAFlow™

CIMENTS DE RÉPARATION À BASE
D'AGRÉGAT DE TRIOXYDE MINÉRAL



- Propriétés de formation d'apatite bioactive²
- Consistance lisse une fois mélangés
- Résistants au lavage
- Application possible avec un embout NaviTip™ 29 ga selon la consistance
- Prise rapide prédictible
- Rapport de mélange adaptable à la procédure
- Formule anti-coloration White disponible

Les ciments de réparation à base d'agrégat de trioxyde minéral Endo-Eze MTAFlow et MTAFlow White présentent les mêmes propriétés. Tous les deux sont conçus pour être mélangés et appliqués selon la consistance de son choix. Utiliser l'embout NaviTip 29 GA pour les procédures d'apexification, de mise en place de bouchon apical, de résorption et de perforation. Le ciment de réparation MTA Flow White est conçu pour une utilisation au dessus de la limite clinique car il contient un agent radio-opacifiant qui ne tache pas – il ne sera ainsi pas visible dans la région esthétique de la dent.

« Le ciment à base de MTA est un matériau bioactif. La formation d'hydroxyapatite (HA) couvrira la surface du MTA exposée aux liquides organiques, puis cette couche d'HA ne ressemblera plus à du matériau étranger pour les cellules vivantes. Le MTA favorisera par conséquent la cicatrisation³. »

Avertissement : le MTA a des propriétés antimicrobiennes limitées.

Utiliser uniquement de l'eau stérile pendant la procédure avec le ciment MTAFlow pour une pulpotomie vitale sur dents de lait.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Endo-Eze MTA Flow, destinée à une utilisation en cabinet dentaire uniquement, est une solution antibactérienne qui accélère la réparation des tissus et n'est pas remboursée. Classe IIa, certifiée SGS Belgique.

1. realityesthetics.com. 2. Guimaraes, B. et al. Chemical-physical properties and apatite-forming ability of mineral trioxide aggregate flow. *J Endod.* 2017 ; 43 : 1692-96 3. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 2005;31(2):97-100.

Les ciments de réparation MTAFlow ont une consistance lisse grâce à leur poudre fine et leur gel de mélange breveté. Sa formulation le rend résistant au lavage, ce qui aide à garantir que le mélange reste là où vous l'avez appliqué. Il peut en être appliqué avec les seringues et embouts d'Ultradent.



1. Utiliser une spatule à ciment pour éliminer la poudre en excès. **NE PAS** utiliser la poudre sans l'avoir nivelée au ras de la cuillère.



2. Secouer du haut vers le bas 3 fois. S'assurer que le gel se trouve à l'extrémité du flacon avant de l'expulser.



3. Après le mélange, charger le ciment MTAFlow obtenu dans la partie arrière de la seringue Skini.



4. Insérer le piston et expulser une petite quantité de matériau à travers l'embout.



5. Le ciment Endo-Eze MTAFlow mélangé à l'intérieur de la seringue sera utilisable pendant 15 minutes.



6. Utiliser une consistance fluide et un embout NaviTip™ 29 ga pour appliquer le ciment MTAFlow à l'intérieur du canal.

Au bout de 5 minutes, la zone peut être légèrement rincée et séchée à l'air sans déloger le ciment MTAFlow. Le ciment MTAFlow mélangé et placé dans la seringue Skini peut être utilisé jusqu'à 15 minutes après la fin du mélange. Le temps de prise totale est d'une heure. La polymérisation totale et le durcissement complet sont observés à 4 semaines.



Perforation localisée dans le tiers cervical du canal buccal mésial.



Ciment MTA en place montrant la réparation.



UNE CONSISTANCE GEL ADAPTABLE À LA PROCÉDURE

Le ratio de mélange de la poudre et du gel des ciments de réparation MTAFlow dépend de la procédure. La formule résistante à la coloration du ciment MTAFlow White est conçue pour être utilisée dans le cadre de procédures telles que la pulpotomie vitale sur dents de lait et le coiffage pulpaire.

Après l'application du ciment de réparation MTAFlow, attendre 5 minutes pour la prise initiale puis recouvrir avec le fond de cavité UltraBlend™ plus et procéder à la restauration.

Il est possible d'ajouter du gel ou de la poudre à tout moment pendant le mélange pour obtenir la consistance souhaitée.

SUGGESTIONS DE PROPORTIONS DE MÉLANGE (POUDRE ET GEL)*

Applications	Coiffage pulpaire, perforation de la chambre pulpaire, pulpotomie vitale sur dents de lait	Résorption, apexification, bouchon apical	Résection apicale
Poudre (cuillère doseuse)	2 grosses doses (0,26 g)	1 grosse dose plus 1 petite dose (0,19 g)	1 grosse dose plus 1 petite dose (0,19 g)
Gouttes de gel	3 gouttes	3 gouttes	1 goutte**
Consistance	Épaisse	Fluide	Putty
Embout d'application	Micro 20 ga Tip	Embout NaviTip 29 ga	Application sans seringue

* Il est possible d'ajouter du gel ou de la poudre pour obtenir la consistance souhaitée.

** Selon la consistance souhaitée.

DES KITS COMPLETS

Les kits de ciment de réparation MTAFlow incluent les outils dont vous aurez besoin pour mélanger et appliquer le ciment. Ils incluent suffisamment de poudre et de gel à base de MTA pour 8 à 10 applications.



5980 – Kit de ciment de réparation MTAFlow White

1 guide technique, 1 mode d'emploi, 2 g de poudre MTAFlow, 2 ml de gel MTAFlow et 1 cuillère doseuse
10 seringues Skini
10 capuchons Luer Lock
20 embouts Micro 20 ga




3980-1 – Kit de ciment de réparation MTAFlow

1 guide technique, 1 mode d'emploi, 2 g de poudre MTAFlow, 2 ml de gel MTAFlow et 1 cuillère doseuse
10 seringues Skini
10 capuchons Luer Lock
20 embouts Micro 20 ga




3981 – Ciment de réparation MTAFlow Recharge

1 guide technique, 1 mode d'emploi, 2 g de poudre MTAFlow, 2 ml de gel MTAFlow et 1 cuillère doseuse

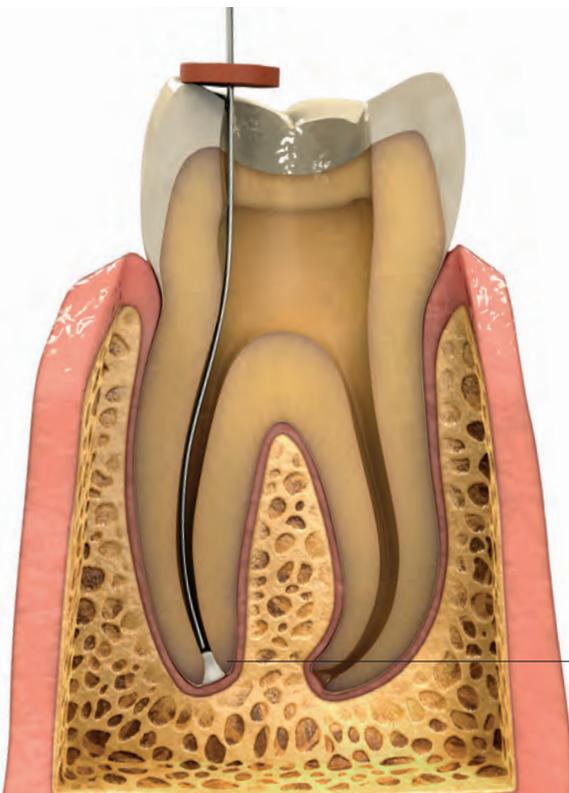


APEXIFICATION

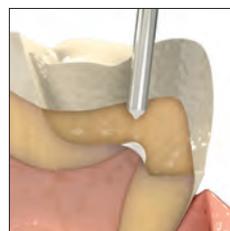


COIFFAGE PULPAIRE




PERFORATION DU PLANCHER DE LA CHAMBRE PULPAIRE

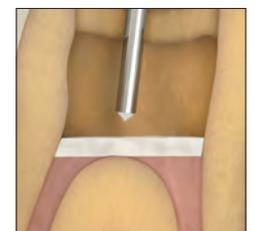


PULPOTOMIE VITALE SUR DENTS DE LAIT

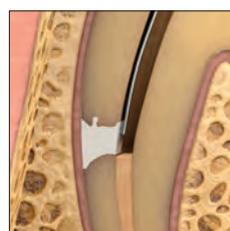

RÉSORPTION

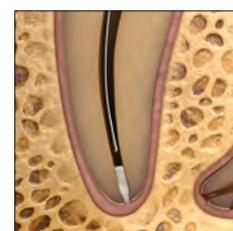

BOUCHON APICAL

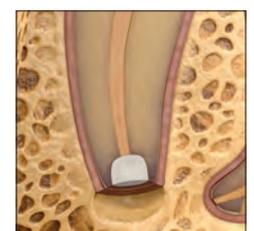

RÉSECTION APICALE



Remarque : les lubrifiants suivants contiennent des peroxydes incompatibles avec le ciment endocanalaire EndoREZ : EndoGel,* EndoSequence,* Glyde,* ProLube,* RC-Prep* et SlickGel ES*.

EndoREZ™

CIMENT ENDOCANALAIRE




Ultradent™ Mixing Tip

Prise normale en 20 à 30 minutes
Prise en 5 à 12 minutes avec un accélérateur

- Résine de scellement hydrophile ne nécessitant pas de primer
- Obturation totale et hermétique²
- Radio- opaque
- Adhérence aux moignons / composites à base de résine
- Traitement possible en association avec la gutta percha³
- Application par seringue jusqu'au tiers apical

Le ciment endocanalaire EndoREZ permet de réduire le temps de traitement au fauteuil nécessaire pour l'obturation. Ce matériau thixotrope présente une affinité pour l'humidité située en profondeur dans les tubuli dentinaires et les canaux latéraux⁴ et assure ainsi l'obturation la plus complète possible. Dans la mesure où le ciment endocanalaire à base de méthacrylate EndoREZ repose plus sur la chimie que sur la chaleur ou la pression pour obturer le canal, le risque de trauma/fracture radiculaire supplémentaire est réduit. En outre, des études montrent que le ciment endocanalaire EndoREZ est suffisamment polyvalent pour être utilisé comme ciment dans toutes les procédures d'obturation (maître-cône, condensation latérale ou gutta-percha chaude par exemple). Créer un « monobloc » avec les pointes de gutta-percha enrobées de résine EndoREZ.

Le ciment endocanalaire EndoREZ contient un monomère hydrophile spécial – le méthacrylate organophosphoré – qui accentue ses propriétés hydrophiles et confère au matériau une grande affinité pour l'humidité, avec une pénétration de ce dernier de 1 000 µm dans les tubuli⁵.

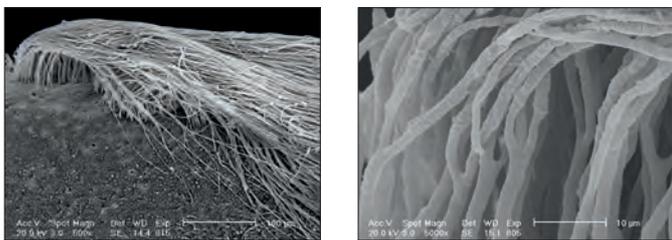


Le ciment endocanalaire EndoREZ pénètre dans les tubuli et s'adapte aux parois comme aucun autre ciment sur le marché.



Le ciment endocanalaire EndoREZ permet d'obtenir des obturations prédictibles qui sont radio-opaques, faciles à diagnostiquer et permettant un traitement ultérieur ainsi que les procédures de restauration de tenon et de moignon.


La fluidité du ciment endocanalaire EndoREZ lui permet d'atteindre l'isthme et les régions intracanales pendant la procédure d'obturation sans instrument particulier.

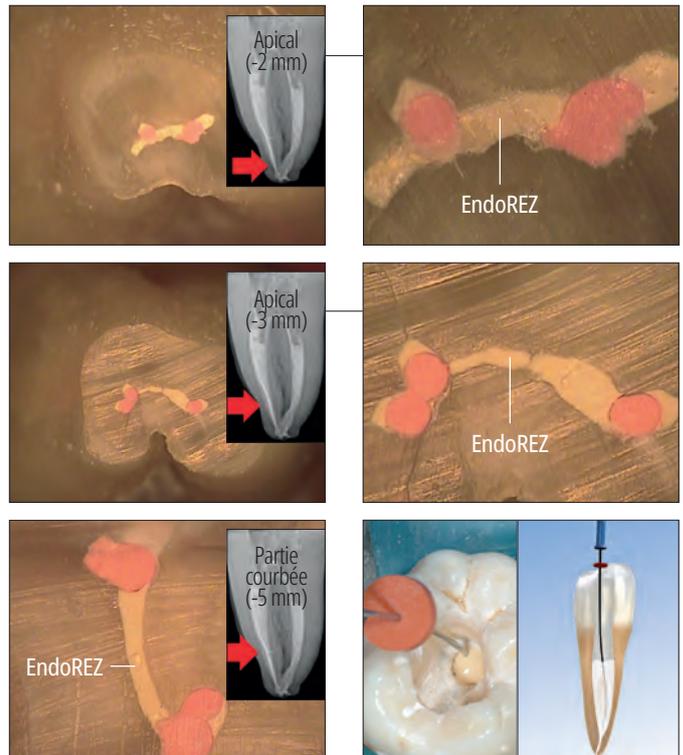

L'embout breveté NavITip™ d'Ultradent permet d'appliquer le ciment endocanalaire EndoREZ en un temps dans tout l'espace canalaire.

SCELLEMENT CANALAIRE

Le ciment endocanalaire à base de résine EndoREZ a une fluidité améliorée. La seringue Skini et l'embout NavITip permettent d'appliquer le ciment endocanalaire EndoREZ jusqu'au tiers apical. Le niveau d'application dépend de l'instrument final utilisé. Pour les petits diamètres (25 à 30), l'exploration finale (à gauche) permet une application jusqu'à 2 mm avant la longueur de travail. Pour les gros diamètres (60 à 80), il est recommandé d'appliquer lors de l'exploration finale le produit jusqu'à 4 mm avant la longueur de travail.

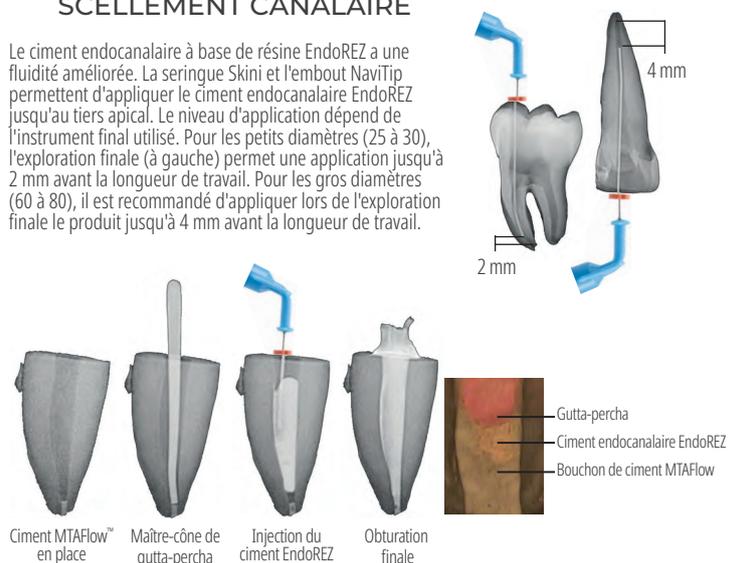

Le bouchon de ciment apical MTAFlow permet de traiter, en une seule visite, les cas de formation incomplète de l'apex ou de foramens résorbés. Cela empêchera l'extrusion du ciment endocanalaire EndoREZ en créant une obturation biologique au niveau du foramen apical.

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. 1. realityesthetics.com. 2. Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer: an eight-year update. *J Endod.* 2010;36(8):1311-4. 3. Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreating root canal: an in vitro study. *Endod Pract.* 2005;8:29-33. 4. Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers: an in vitro coronal dye leakage study. *J Endod.* 2008;34(1):76-9. 5. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. EndoREZ, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour l'obturation endocanalaire. Il n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.




PROCÉDURE D'APPLICATION CLINIQUE DU CIMENT ENDOCANALAIRE ENDOREZ




1. Insérer une pointe de gutta-percha EndoREZ™ jusqu'à la longueur de travail. Faire une radiographie pour vérifier l'ajustement.



2. Chasser l'humidité de l'espace canalaire avec un embout Capillary et un adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum, puis sécher avec une pointe de papier (l'extrémité de cette dernière ne doit être humide que sur 1 à 3 mm). Avant l'obturation avec le ciment hydrophile EndoREZ, le canal doit être humide et non pas desséché. Appliquer le ciment hydrophile EndoREZ avec un embout NaviTip™ 29 ga en arrêtant ce dernier 2 à 4 mm avant la longueur de travail.

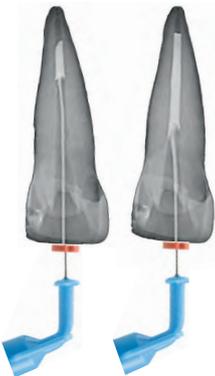

3. Injecter le ciment endocanalair EndoREZ en exerçant une légère pression dans le canal tout en remontant l'embout. Laisser l'orifice de l'embout NaviTip plongé dans le matériau tout en injectant le ciment endocanalair EndoREZ et en remontant l'embout.

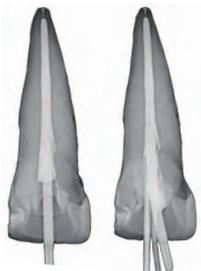

4. Insérer lentement le maître-cône de la pointe de gutta-percha EndoREZ sur toute la longueur de travail. Veiller à faire un seul mouvement, en douceur, vers la région apicale. Éviter de « pomper » avec le cône. Il est possible d'utiliser des compacteurs passifs ou latéraux à froid. Sans accélérateur, le ciment endocanalair EndoREZ durcira en 20 à 30 minutes.



5. Photopolymériser le ciment endocanalair EndoREZ pendant 40 secondes avec la lampe à polymériser à LED VALO™. La polymérisation initiale de la surface avec une lampe à polymériser (sans EndoREZ Accelerator) se fait sur une épaisseur inférieure à 0,3 mm et facilite la restauration immédiate. Découper la gutta-percha en excès à l'aide d'un instrument très chaud. Finir les restaurations après l'obturation pour bien sceller l'entrée canalaire. Ne pas laisser de boulettes de coton entre l'obturation et la restauration provisoire.



5901 – Kit pour obturation EndoREZ – Conicité 02 %

5902 – Kit pour obturation EndoREZ – Conicité 04 %

5903 – Kit pour obturation EndoREZ – Conicité 06 %

1 seringue de 5 ml (8,15 g)

20 seringues Skini

20 embouts mélangeurs Mixing Tips

20 embouts NaviTip 29 ga – Assortiment

120 pointes EndoREZ



5900 – Kit EndoREZ

1 seringue de 5 ml (8,15 g)

20 embouts mélangeurs Mixing Tips

EndoREZ™ Accelerator



**Le ciment endocanalair EndoREZ
durcit en 5 à 12 minutes.**

- Accélération de la polymérisation du ciment EndoREZ
- Permet la préparation du tenon au cours de la même consultation

EndoREZ Accelerator réduit le temps de prise du ciment endocanalair EndoREZ de 20-30 minutes à environ 5-12 minutes avant le début des restaurations post-endodontiques et permet de commencer tout de suite les restaurations avec tenons définitives. Il est conçu pour un usage en association avec le ciment endocanalair EndoREZ dans le but d'obtenir une obturation fiable.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire.

Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. EndoREZ Accelerator, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour accélérer la polymérisation d'EndoREZ et n'est pas remboursé. Classe IIa, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



399 – EndoREZ Accelerator – Usage unique

– 20 unités

Flacons de 0,035 ml




* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent. **1.** realityesthetics.com. **2.** Zmener O, Pameijer CH. Clinical and radiographic evaluation of a resin-based root canal sealer : an eight-year update. *J Endod.* 2010;36(8):1311-4. **3.** Zmener O, Banegas G, Pameijer C. Efficacy of an automated instrumentation technique in removing resin-based, zinc oxide and eugenol endodontic sealers when retreatting root canal : an in vitro study. *Endod Pract.* 2005;8:29-33. **4.** Zmener O, Pameijer CH, Serrano SA, Vidueira M, Macchi RL. Significance of moist root canal dentin with the use of methacrylate-based endodontic sealers : an in vitro coronal dye leakage study. *J Endod.* 2008;34(1):76-9.



Pointes EndoREZ™


POINTES DE GUTTA-PERCHA ENROBÉES DE RÉSINE

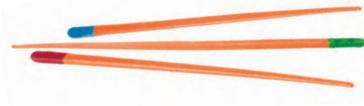

- Gutta-percha enrobée de résine
- Liaison chimique avec le ciment endocanalair EndoREZ et les autres ciments à base de résine

EndoREZ Points sont des pointes de gutta-percha de taille standard ISO enrobées d'une fine couche de résine qui se lie chimiquement au ciment endocanalair EndoREZ. Il s'agit de pointes de gutta-percha qui établiront une liaison chimique avec le ciment, assurant le scellement.

GUTTA-PERCHA AU MEB

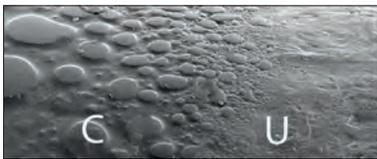

Enrobée

Non enrobée



Pointes de gutta-percha EndoRez

Taille	.02 120 unités	.04 60 unités	.06 60 unités
15	—	1838	—
20	—	1839	—
25	1631	1634	1637
30	1632	1635	1638
35	1633	1636	1639
40	1675	1707	—
15-40	3355	3357	3359
45-80	3356	—	—



3358 – Assortiment de pointes Moyennes Fines / Moyennes Moyennes 100 unités

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les pointes de Gutta-percha EndoRez Points, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisées pour effectuer une liaison chimique avec les ciments et résines. Classe IIa, certifiées TUV Nord, Ultradent Inc.



Voir pages 104-105.

VALOX™

LA LAMPE À POLYMÉRISER RÉINVENTÉE



SCANNEZ LE CODE QR POUR PLUS D'INFORMATIONS OU RENDEZ-VOUS SUR ULTRADENT.COM/VALOX-EU

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. VALOX, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour la photopolymérisation des résines dentaires et n'est pas remboursée. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.



Seringues d'application Skini et Clear Skini




En dentisterie, l'air se met toujours sur le chemin des matériaux utilisés dans les canaux. Il est toujours essentiel de chasser l'air pour obtenir un scellement prévisible et obturer totalement le canal préparé. Le système d'application d'EndoREZ permet le déplacement d'air et la création de scellements avec une force d'adhésion élevée. Il permet l'application des matériaux du bas vers le haut du canal pour une obturation totale sans bulle d'air.



1. Transférer le ciment endocanalé EndoREZ™ de la seringue à double cylindre vers la partie arrière d'une seringue Skini en utilisant l'embout mélangeur.

2. Remplir la seringue par sa base, il n'y aura ainsi pas d'air entre le piston et le ciment endocanalé EndoREZ.

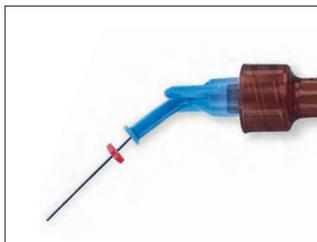

3. Fixer un embout NaviTip™ 29 ga de la longueur appropriée. Expulser une petite quantité de ciment endocanalé EndoREZ hors bouche pour vérifier l'écoulement. S'assurer que l'extrémité n'est pas coincée dans la région apicale avant d'expulser le ciment.



0,5 ml	20 unités	50 unités
Seringue d'application Skini	1680	1681
Seringue d'application Skini Clear	1880	—

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. La seringue *Skini*, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée pour appliquer des ciments et résines. Classe I, certifiée TÜV Nord, Ultradent Inc.

PermaFlo™ Purple

COMPOSITE RÉVÉLATEUR ANATOMIQUE




Micro 20 ga Tip

PermaFlo Purple est utilisé avec un système adhésif pour créer une obturation coronaire identifiable. La couleur pourpre facilite la localisation du plancher de la chambre pulpaire lors de l'accès à cette dernière pour un traitement ultérieur.


Avec l'aimable autorisation du Dr Carlos Ramos.



1. Le canal radiculaire vient d'être obturé et débarrassé de l'excédent de ciment endocanalé EndoREZ dans la chambre pulpaire. (Si une quantité significative de ciment endocanalé EndoREZ non durci est exposée au niveau de l'entrée canalaire, recouvrir avec une fine couche de fond de cavité Ultra-Blend™ plus puis polymériser). Sécher en tamponnant ou avec un jet d'air. Remarque : en cas d'utilisation d'eugénol ou d'un matériau comparable, attendre la prise puis aviver toutes les surfaces de la chambre et/ou de la préparation avec une fraise diamantée avant le collage.

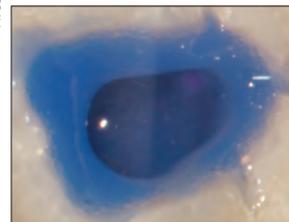

2. Mordancer et appliquer l'adhésif Peak™ Universal Bond, puis photopolymériser.

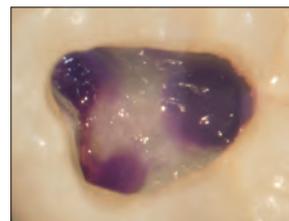

3. Appliquer une couche de PermaFlo Purple d'une épaisseur ≤ 1,0 mm. Photopolymériser pendant 20 secondes pour créer un « bouchon coronaire » immédiat. Lors de la préparation d'un tenon et/ou d'un faux moignon, la couleur pourpre indique l'emplacement de la préparation canalaire. Le contraste indique au praticien où se situe le plancher de la chambre pulpaire par rapport aux entrées canalaire, ce qui réduit le risque de perforation.

Remarque : appliquer en premier lieu l'agent adhésif dentinaire. Ne pas oublier que les ciments de scellement à base d'eugénol peuvent empêcher la polymérisation des résines adhésives. Nous recommandons la résine de scellement hydrophile EndoREZ™.



RÉFRIGÉRER

962 – PermaFlo Purple Kit de seringues

2 seringues de 1,2 ml (2,28 g)
4 embouts Micro 20 ga

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *PermaFlo purple*, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour la création d'obturations coronaires. Classe IIa, certifié TÜV Nord, Ultradent Inc.



Adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum




Remarque : les embouts Capillary ne doivent jamais être utilisés pour l'application des produits d'irrigation ni des ciments endocanalaire.



• Séchage canalaire

Introduire l'adaptateur d'aspiration Luer Vacuum sur tout embout d'aspiration à grand volume de fauteuil pour éliminer produits d'irrigation et débris. Compatible avec tous les embouts Luer, l'adaptateur d'aspiration Luer Vacuum. Il est possible de l'utiliser avec les embouts Capillary Tip qui présentent des canules coniques et souples pouvant aller au fond des canaux pour nettoyer et sécher.

SÉCHAGE CANALAIRE

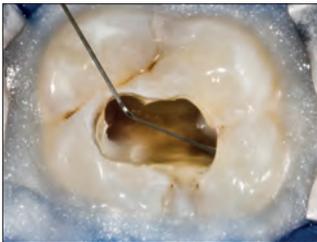


1. Irriguer les canaux avec l'embout d'irrigation Navitip™ 31 ga Double Sideport.



2. Faire glisser l'embout Capillary installé sur l'adaptateur d'aspiration dans le canal. Faire entrer et sortir l'embout tout en aspirant.



3. L'embout Capillary permet de mieux voir ce qui sort du canal et d'identifier plus facilement ce qu'il contient.

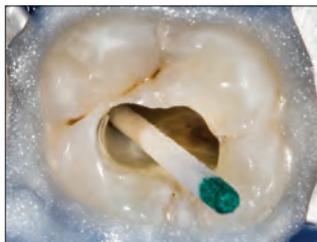

4. Vérifier le degré de séchage en insérant des pointes de papier.



230 – Adaptateurs d'aspiration Luer Vacuum 10 unités

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'adaptateur d'aspiration Luer Vacuum, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisé pour le séchage canalaire et n'est pas remboursé. Classe I, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

DermaDam™

DIGUE EN CAOUTCHOUC



- Sans poudre pour limiter les réactions allergiques

La digue en caoutchouc DermaDam est en latex pur et sans poudre pour limiter le risque de réactions au latex.



311 – DermaDam Medium 0,20 mm 36 unités
314 – DermaDam Heavy 0,25 mm 36 unités
15 cm x 15 cm

DermaDam™ Synthétique

DIGUE DENTAIRE



La digue dentaire DermaDam Synthétique n'est pas en latex de caoutchouc naturel mais elle a été conçue pour être aussi souple et durable que les digues fabriquées avec ce matériau.

Aucune protéine sensibilisante



299 – DermaDam Medium Synthétique 0,20 mm 20 unités
330 – DermaDam Medium Synthétique 0,20 mm 60 unités
15 cm x 15 cm

1. realityesthetics.com.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. DermaDam, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est une digue de protection et n'est pas remboursée. Classe I, Fabriquée par Pro-Options AB, Brännkyrkagatan 94,117 26 Stockholm, Suède.




Guide de référence NaviTip™

- Application contrôlée à proximité du tiers apical
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés

	Produit	Embout recommandé	Embouts compatibles
	File-Eze™ en seringue IndiSpense	NaviTip™ 29 ga ou 30 ga	—
	EDTA 18 % en seringue IndiSpense	NaviTip™ 31 ga Embout d'irrigation Sideport double	NaviTip™ 30 ga et NaviTip™ FX™
	UltraCal™ XS	NaviTip™ 29 ga Single Sideport	Pour le coiffage pulpaire direct et la perforation du plancher pulpaire, utiliser l'embout Micro 20 ga
	Citric Acid	NaviTip™ FX™	Embout d'irrigation NaviTip™ 31 ga Double Sideport
	Kit EndoREZ™	NaviTip™ 29 ga	NaviTip™ 29 ga Single Sideport
	Kit MTAFlow™	NaviTip™ 29 ga	Micro 20 ga
	Kit MTAFlow™ White	NaviTip™ 29 ga	Micro 20 ga



File-Eze™ Lubrifiant EDTA LUBRIFIANT EDTA

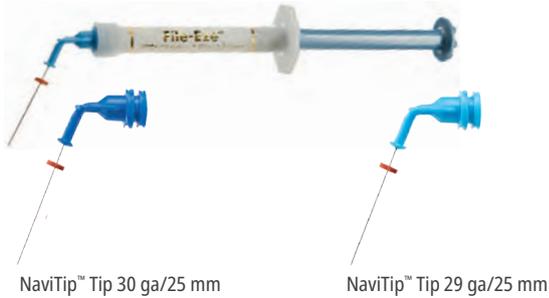

NaviTip™ Tip 30 ga/25 mm

NaviTip™ Tip 29 ga/25 mm

- Exempt de peroxyde ; pas d'interférence avec la prise des ciments à base de résine

Le lubrifiant pour limes File-Eze est une solution visqueuse d'EDTA à 19 % hydrosoluble pour la chélation, la lubrification et le débridement des préparations endocanalaire.

Remarque : les lubrifiants suivants contiennent des peroxydes incompatibles avec le ciment endocanalaire EndoREZ : EndoGel, * EndoSequence, * Glyde, * ProLube, * RC-Prep* et SlickGel ES*.



1075 – File-Eze Kit
4 seringues de 1,2 ml (1,43 g)
5 embouts NaviTip 30 ga de chaque dimensions
17 mm, 21 mm, 25 mm et 27 mm



297 – File-Eze Recharge
4 seringues de 1,2 ml (1,43 g)



682 – File-Eze en seringue IndiSpense™ 1 unité
Seringue de 30 ml (35,64 g)

* Marque commerciale d'une entreprise autre qu'Ultradent.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. File-Eze, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est une solution visqueuse d'EDTA pour la chélation, la lubrification et le débridement des préparations endocanalaire et n'est pas remboursée. Classe IIa, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.


Solution Ultradent™ EDTA à 18 %




NaviTip™ FX™ Tip 30 ga/25 mm

NaviTip™ FX™ Tip 30 ga/17 mm


Chélatant endocanalaire conditionnant/nettoyant par un processus de chélation, Ultradent EDTA 18 % permet d'éliminer la boue dentinaire ; elle peut également être utilisée comme solution d'irrigation avant l'obturation finale.

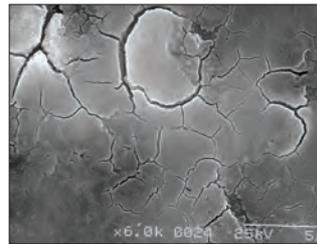


1. Après la préparation canalaire (sans produit d'irrigation ni lubrifiant). Couche de boue dentinaire intacte.

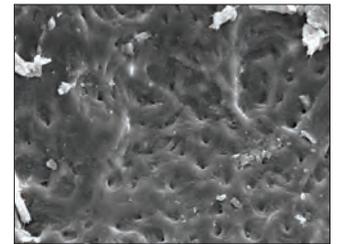

2. Après la préparation canalaire avec de l'hypochlorite de sodium. Boue dentinaire encore intacte.

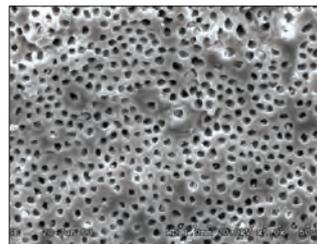

3. Après la préparation canalaire avec de l'hypochlorite de sodium et de l'EDTA. La couche de boue dentinaire est éliminée. Les tubuli dentinaires sont ouverts et propres.

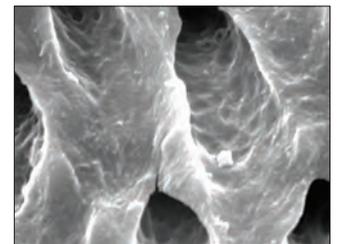

4. Grossissement du cliché 3.



162 – EDTA en seringue IndiSpense 1 unité
Seringue de 30 ml (33,27 g)

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. La solution Ultradent™ EDTA à 18 %, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée comme conditionnant par un processus de chélation et n'est pas remboursée. Classe IIa, certifiée TUV Nord, Ultradent Inc.



UltraCal™ XS

PÂTE D'HYDROXYDE DE CALCIUM À 30% – 35%



Single Sideport NaviTip™ 29 ga Tip

- Radio-opaque
- pH élevé

La pâte à base d'hydroxyde de calcium UltraCal XS est une pâte à la composition unique qui est à la fois aqueuse et radio-opaque, avec un pH élevé (12,5). Il est recommandé d'utiliser l'embout plus large Single Sideport NaviTip 29 ga pour l'écoulement et la possibilité d'une application directe. La pâte UltraCal XS peut être totalement éliminée du canal avec la solution Ultradent Citric Acid et un embout NaviTip™ FX™.

La pâte UltraCal XS fait augmenter le pH de la dentine qui devient alcalin, ce qui permet de l'utiliser comme pansement entre les rendez-vous dans les situations cliniques impliquant résorption radiculaire, pansement, coiffage pulpaire, apexification et perforations¹.



5145 – UltraCal XS Recharge
4 seringues de 1,2 ml (1,76 g)



5149 – UltraCal XS Recharge économique
20 seringues de 1,2 ml (1,76 g)

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. *UltraCal XS*, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est une pâte d'hydroxyde de calcium et a une action antibactérienne. Elle n'est pas remboursée. Classe IIa, certifiée TÜV Nord, Ultradent Inc.

Solution Ultradent™ Citric Acid 20%



NaviTip™ FX™ Tip 30 ga/25 mm



NaviTip™ FX™ Tip 30 ga/17 mm



Seringue vide de 1,2 ml

- Recommandé comme agent nettoyant/conditionneur pour canaux préparés
- Élimination des boues dentinaires et minérales
- Formulation légèrement visqueuse pour faciliter la lubrification
- Élimination de la pâte d'hydroxyde de calcium

Légèrement acide, la solution Ultradent Citric Acid est efficace pour dissoudre/nettoyer les résidus d'hydroxyde de calcium présents dans les canaux (par exemple pâte UltraCal XS). Cette solution est également recommandée comme agent nettoyant/conditionneur pour l'élimination de la boue dentinaire déposée sur les parois dentinaires.



329 – Citric Acid en seringue IndiSpense™ 1 unité
Seringue de 30 ml (31,26 g)

¹. Pedrinha VF, Cuellar MRC, de Barros MC, et al. The vehicles of calcium hydroxide pastes interfere with antimicrobial effect, biofilm polysaccharidic matrix, and pastes' physicochemical properties. *Biomedicines*. 2022;10(12):3123. doi:10.3390/biomedicines10123123.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. La solution *Ultradent™ Citric Acid à 20%*, destinée à une utilisation en cabinet médical uniquement, est utilisée comme agent nettoyant pour canaux préparés et n'est pas remboursée. Classe IIa, certifiée TÜV Nord, Ultradent Inc.



AVERTISSEMENT :

- Utiliser l'embout endodontique recommandé • S'assurer que la butée en caoutchouc est en position
- Prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation d'embouts sans orifice latéral • S'assurer que l'embout n'est pas coincé dans le canal



Capillary Tips

Ne jamais utiliser ces embouts pour l'application des produits d'irrigation ni des produits endocanalaux.

- Vide les canaux et réduit considérablement l'utilisation de pointes de papier
- Extrémité fine et souple permettant l'accès aux canaux incurvés
- Pour les procédures impliquant des abcès dentaires

À fixer sur l'adaptateur Ultradent™ Luer Vacuum pour l'aspiration dans les canaux endodontiques.

LOK-TITE™	Diamètre interne	20 unités	50 unités
Capillary	0,36 mm	341	3099
Capillary	0,48 mm	186	1425



Micro Capillary™ Tips

- Facilement identifiable par rapport aux tissus mous grâce à sa couleur claire
- Les plus petits embouts moulés au monde

Recommandé pour : les matériaux utilisés en parodontie et en endodontie ainsi que l'adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
Micro Capillary	5 mm	1120
Micro Capillary	10 mm	1121



Endo-Eze™ Irrigator Tip

- Assure une application idéale tout en expulsant les produits chimiques vers la paroi canalaire et en réduisant la pression directement vers l'apex
- Canule souple émoussée avec extrémité anti-obturation unique
- Non stérile

Recommandé pour : seringue Ultradent™ de 5 ml.

	Longueur de l'embout	20 unités
27 ga (0,40 mm) Endo-Eze Irrigator	25 mm	207



22 ga 20 ga 19 ga 18 ga

Endo-Eze™ Tips

- Pour les procédures endodontiques telles que le scellement de tenons et la fabrication de faux moignons
- Canules souples et solides
- Facilement coudable
- Longueur 19 mm

Recommandé pour : matériaux de scellement et irrigation/séchage. À utiliser avec PermaFlo™ DC (20 ga) et autres seringues Ultradent.

	Embout pouvant être courbé	20 unités	100 unités
Endo-Eze 22 ga	0,70 mm	348	1431
Endo-Eze 20 ga	0,90 mm	347	1430
Endo-Eze 19 ga	1,06 mm	346	1429
Endo-Eze 18 ga	1,25 mm	345	1428



Embouts NaviTip™ 29 ga Tips

avec orifice latéral unique

- Conçus pour diriger l'écoulement du produit à travers l'orifice latéral avant son écoulement dans la région de l'apex, réduisant ainsi le risque d'expulsion du produit
- La canule souple en acier inoxydable facilite la navigation dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,33 mm

29 ga pour l'application de pâtes telles que MTAFlow™, MTAFlow™ White, EndoREZ™ et UltraCal™ XS.

Remarque : le ciment à base d'hydroxyde de calcium UltraCal™ XS ne doit être utilisé qu'avec les embouts Single Sideport NaviTip 29 ga.




LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
NaviTip 29 ga	27 mm	4989
NaviTip 29 ga	25 mm	4990
NaviTip 29 ga	21 mm	4991
NaviTip 29 ga	17 mm	4992
NaviTips 29 ga – 29 ga	27 – 17 mm	5143



AVERTISSEMENT :

- Utiliser l'embout endodontique recommandé
- S'assurer que la butée en caoutchouc est en position
- Prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation d'embouts sans orifice latéral
- S'assurer que l'embout n'est pas coincé dans le canal

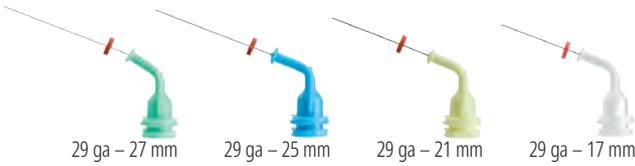


Embouts NaviTip™ 29 ga Tips

- Application contrôlée jusqu'à l'apex
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,33 mm

29 ga pour l'application de pâtes telles que MTAFlow™, MTAFlow™ White et EndoREZ™.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 29 ga	27 mm	5115	1377
NaviTip 29 ga	25 mm	5114	1376
NaviTip 29 ga	21 mm	5113	1374
NaviTip 29 ga	17 mm	5112	1378
NaviTips 29 ga – 29 ga	27 – 17 mm	5116	1379

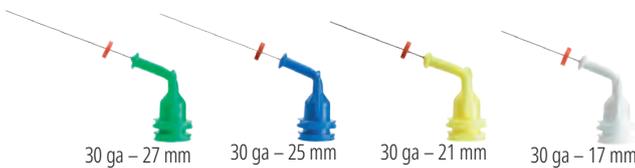


Embouts NaviTip™ 30 ga Tips

- Application contrôlée jusqu'à l'apex
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,30 mm

30 ga pour l'application de solutions/gels tels que File-Eze™, Ultradent™ EDTA 18% Solution et Ultradent™ Citric Acid 20% Solution.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 30 ga	27 mm	1354	1424
NaviTip 30 ga	25 mm	1250	1423
NaviTip 30 ga	21 mm	1349	1422
NaviTip 30 ga	17 mm	1249	1421
NaviTips 30 ga – 30 ga	27 – 17 mm	1351	3319

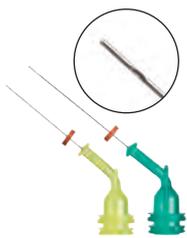

Embouts NaviTip™ 31 ga Tips

avec embout d'irrigation Sideport double

- Les deux orifices latéraux permettent l'application de liquides d'irrigation sans danger, en minimisant le risque d'expulsion de produits chimiques au-delà de l'apex
- L'une des plus petites canules au monde pénètre dans les espaces canalaires les plus difficiles d'accès

Recommandé pour : Ultradent™ EDTA 18% Solution et Ultradent™ Citric Acid 20% Solution.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 31 ga	21 mm	5121	5122
NaviTip 31 ga	27 mm	5123	5124



Embouts NaviTip™ FX™ 30 ga Tips

- Brosse qui nettoie, fait pénétrer les produits et irrigue simultanément
- Canule rigide

Recommandé pour : solution Ultradent™ Citric Acid 20%.

Classé comme un produit « EXCELLENT » par un important institut de recherche indépendant¹.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
NaviTip FX 30 ga	17 mm	1452
NaviTip FX 30 ga	25 mm	1454

¹. Clinical Research Associates Newsletter. Volume 29, Issue 1, January 2005.



UniCore™

SYSTÈME DE TENONS ET DE FORETS




- Radio-opaque
- Forets et tenons dotés du même code couleur
- Le « Kit des kits » UniCore d'Ultradent comporte tous les tenons nécessaires

Les tenons UniCore sont en fibres de verre. Les tenons unidirectionnels en fibres de verre UniCore ont une résistance à la flexion comparable à celle de la dentine². La forme légèrement conique du tenon UniCore reprend l'anatomie de la dent naturelle pour une adaptation au logement du tenon créé avec le foret UniCore. Les cinq tailles et couleurs des tenons UniCore correspondent à celles du foret UniCore. Le foret UniCore permet d'éliminer les obturateurs tout en préparant une chambre adaptée à son tenon. Il est doté d'un embout breveté qui génère de la chaleur pour faciliter le retrait des tenons fibrés, des matrices rigides et de la gutta-percha classique. Son col diamanté, qui dissipe la chaleur, préserve la structure de la dent et ses lames sont spécialement conçues pour découper les parois du canal dans le sens latéral plutôt que vertical.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les forets et tenons, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, sont utilisés pour la reconstruction et restauration sur dents dévitalisées et ne sont pas remboursés. Classe IIa, certifiés TUV Nord, Ultradent Inc.

	Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Ø apical	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
Ø coronaire	1,0 mm	1,15 mm	1,35 mm	1,55 mm	1,75 mm
Conicité	2,1°	1,8°	1,8°	1,8°	1,3°
Longueur	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Propriétés physiques		Tenon en fibres de quartz UniCore			
Module d'élasticité en flexion (GPa)		43-44			
Résistance à la flexion (MPa)		1500-1600			
Résistance à la traction (MPa)		1200			
Module d'élasticité à 30° (GPa)		13 (comparable à la dentine)			
Résistance interlaminaire au cisaillement (MPa)		70-80			

Avec l'aimable autorisation du Dr. Carlos Ramos.

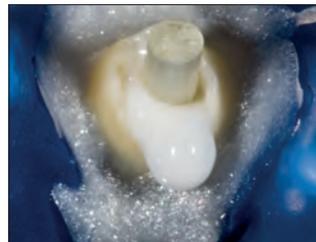

Tenon principal UniCore en place.



Tenons accessoires supplémentaires.



Situation finale.

1. realityesthetics.com. 2. Brown PL, Hicks NL. Rehabilitation of endodontically treated teeth using the radiopaque fiber post. *Compend Contin Educ Dent.* 2003;24(4):275-284.



FORET UNICORE™



- Les forets résistants peuvent être utilisés jusqu'à 15 fois pour éliminer la gutta-percha ou les matrices rigides pendant la préparation du tenon et jusqu'à 5 fois pour retirer les tenons fibrés déjà en place
- Les forets et les tenons sont dotés d'un code couleur par taille, simplifiant leur emploi au fauteuil
- Leur col diamanté breveté empêche tout blocage dans les cavités d'accès
- La forme unique des lames assure une extraction rapide et uniforme des débris du canal
- La chaleur générée par l'embout facilite les procédures d'élimination des obturateurs



7132 – UniCore Starter Kit
1 foret de chaque taille : 1 et 2
5 tenons de taille 1 et 5 tenons de taille 2



7120 – Kit UniCore « Le kit des kits »
1 foret de chaque taille : 1, 2, 3 et 4
5 tenons de chaque taille : 1, 2, 3 et 4

7133 – UniCore Taille 0 Kit complémentaire
1 foret de taille 0
5 tenons de taille 0



TENON UNICORE™ Fibres pré-tendues et adhésives



- La surface microporeuse garantit une rétention micromécanique
- Pas de traitement chimique au fauteuil
- Radio-opacité supérieure aux normes ISO
- Les tenons translucides transmettent la lumière sur toute la profondeur de la préparation
- L'extrémité légèrement conique suit l'anatomie naturelle de la dent
- S'élimine si besoin pour un traitement endodontique ultérieur

Forets UniCore

Taille	mm	1 unité
0	0,6 mm	7134
1	0,8 mm	7121
2	1,0 mm	7122
3	1,2 mm	7123
4	1,5 mm	7124



Tenons UniCore

Taille	mm	5 unités
0	0,6 mm	7135
1	0,8 mm	7125
2	1,0 mm	7126
3	1,2 mm	7127
4	1,5 mm	7128



Le tenon UniCore est notablement plus radio-opaque que celui du principal concurrent.



nouveau

J-Temp™

RÉSINE PROVISOIRE PHOTOPOLYMÉRISABLE



Black Mini tip

Quatre indications cliniques:

- Restaurations provisoires (endodontie, technique « walking bleach », inlay/onlay, réparation d'une cuspside)
- Solidarisation de plusieurs transferts d'implant pour les empreintes permettant une résistance à la déformation sous l'effet du matériau à empreintes
- Reconstitution d'une structure pour la fixation des crampons pour digue dentaire et assurer l'isolation aux produits d'irrigation endodontiques
- Bite ramps et surélévations occlusales provisoires lors des traitements orthodontiques
- Matériau autonivelant¹
- Taux de rétraction inférieure à 5 %²
- Couleur pourpre pour faciliter l'identification et le retrait
- Sans colorant

J-Temp est une résine provisoire à base de méthacrylate radio-opaque, photopolymérisable et fluide qui offre un matériau provisoire durable à utiliser pour différentes indications cliniques. J-Temp est une résine auto-nivelante¹ au taux de rétraction inférieur à 5 %². Sa couleur pourpre caractéristique permet de la distinguer aisément de l'émail et de la dentine sans que le patient ne la remarque trop. Une telle polyvalence et une telle qualité feront rapidement de la résine provisoire J-Temp un pilier dans votre cabinet.



4897 – Kit J-Temp en seringue

1 seringue de 1,2 ml (2,02 g)
20 embouts Black Mini Tips




RESTAURATION PROVISOIRE : ENDODONTIE



1. Effectuer la préparation canalair.



2. Insérer une boulette de coton/Teflon (ou autre barrière) et la compacter pour protéger l'entrée canalair.

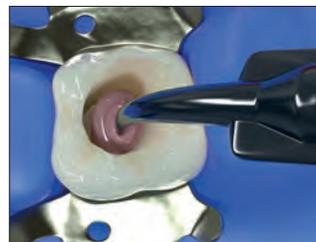

3. Appliquer la résine provisoire J-Temp par couches successives de 2–3 mm.



4. Photopolymériser après chaque couche et ajuster l'occlusion avec des fraises.

1. Données internes. 2. Données internes.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. J-Temp, résine provisoire photopolymérisable destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement. Il ne est pas remboursé. Classe I, auto-certifiés Ultradent Inc.

EMBOUTS ET SERINGUES



45 ANS
1978-2023

SCOTT PAYNE – Mudd Creek, Strawberry Reservoir

Embouts pour restauration
Embouts endodontiques
Seringues et couvre-seringues
Accessoires



EMBOUTS ULTRADENT™ CONÇUS POUR L'APPLICATION

Jetez un œil à nos embouts avec raccord

LOK-TITE et COMFORT HUB™

Les embouts Luer Lock avec raccord Lok-Tite sont dotés d'un double pas de vis qui les maintient en place pour une sécurité accrue. Des ailettes en facilitent la mise en place et le retrait.

Les embouts avec raccord Comfort Hub sont dotés d'ailettes ergonomiques plus larges qui assurent une prise en main ferme et confortable.

Les produits chimiques que vous utilisez sont différents. Certains sont activés chimiquement et doivent être appliqués immédiatement une fois mélangés. D'autres ont des viscosités variables. Certains agissent dans les puits et sillons, d'autres dans les canaux et d'autres enfin sur les surfaces lisses. Chaque produit chimique est conçu pour un usage précis.

Ultradent fabrique des embouts d'application adaptés pour chacun de ses produits. Nous fabriquons des embouts adaptés à chaque application, que vous appliquiez une solution, un composite fluide ou un gel épais. En outre, nos embouts étant conçus sur site, nous les testons tous pour nous assurer qu'ils fonctionnent avec les produits auxquels ils sont destinés.

Restauration



Black Micro™ FX™ Tip

- Convient pour différentes viscosités
- La pointe floquée se déploie pour l'application en une couche fine régulière

Recommandé pour : PrimaDry™ et PermaSeal™.

LOK-TITE™	100 unités	500 unités
Black Micro FX 22 ga	1357	1434



Black Mini™ Tip

- Application de grosses quantités
- Le plastique opaque préserve l'écoulement des matériaux photopolymérisables

Recommandé pour : Ultra-Blend™ plus, Ultradent™ LC Block-Out Resin, PermaFlo™, Opalescence™ Boost™, Ultradent™ Diamond Polish Mint, OpalDam™, OpalDam™ Green, Opalescence™ Endo et OraSeal™ Caulking.

LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
Black Mini	196	514	1433



Black Mini™ Brush Tip

- Application précise et contrôlée des produits aqueux
- Les fibres resserrées et ajustables du pinceau minimisent la formation de bulles
- Exclusivité Ultradent

Recommandé pour : Peak™ SE, Peak™-ZM, Seek™/Sable™ Seek™, Ultradent™ Silane et Ultradent™ Universal Dentin Sealant.

LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
Black Mini Brush	190	1169	1432



Black Micro™ Tip

- Application ultra-précise
- Canule fine pour une application précise des matériaux

Recommandé pour : Ultra-Blend™ plus.

LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
Black Micro 22 ga	194	1085	1435



Blue Micro™ Tip

- Application ultra-précise
- Canule fine pour une application précise des matériaux

Recommandé pour : Ultra-Etch™.

	20 unités	100 unités	500 unités
25 ga Blue Micro	158	127	1436



Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip

- Avantages en termes de gestion des tissus comparables à ceux offerts par l'embout Metal Dento-Infusor™
- Permet l'application contrôlée de très petites quantités
- Diamètre extérieur 1,2 mm

Recommandé pour : Astringent™ et Astringent™ X.

LOK-TITE™	mm	20 unités	100 unités	500 unités
Blue Mini Dento-Infusor	1,20	128	1086	1440



Inspiral™ Brush Tip

- Application régulière de matériaux visqueux ou chargés via un canal hélicoïdal interne et un pinceau
- Les fibres resserrées et ajustables du pinceau minimisent la formation de bulles

Recommandé pour : Composite Wetting Resin, Peak™ Universal Bond, PQ1™, Ultradent™ Porcelain Etch, Ultra-Etch™, UltraSeal XT™ plus et UltraSeal XT™ hydro.

LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
Inspiral Brush	710	123	1033



Intraoral Tip

- Mise en place précise
- Fixation sur les embouts de mélange à double cylindre

Recommandé pour : PermaFlo™ DC.

	20 unités
Temps de prise intra-orale	5922



Metal Dento-Infusor™ Tip avec Comfort Hub™

- Le raccord Comfort Hub™ permet un contrôle sûr et confortable lors de la mise en place et du retrait
- Application précise des solutions hémostatiques et élimination efficace des caillots superficiels
- Canule émoussée et coudée avec pinceau ouaté pour l'application d'une pression légère dans le sillon
- Le premier embout d'Ultradent, l'embout « MDI », reste primordial pour une gestion des tissus efficace

Recommandé pour : Astringent™, Astringent™ X, ViscoStat™, ViscoStat™ Clear, PQ1™ et Peak™ Universal Bond.

COMFORT HUB™			
LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
19 ga Metal Dento-Infusor	4954	4955	4956



Micro Capillary™ Tips

- Facilement identifiable par rapport aux tissus mous grâce à sa couleur claire
- Les plus petits embouts moulés au monde

Recommandé pour : les matériaux utilisés en parodontie et en endodontie ainsi que l'adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum.

LOK-TITE™	mm	20 unités
Micro Capillary 0,2 mm	5	1120
Micro Capillary 0,2 mm	10	1121



Micro 20 ga Tip

- Canule de large calibre pour un écoulement régulier
- Embout d'application standard pour composite fluide

Recommandé pour : Opalescence™ Boost™, MTAFlow™, MTAFlow™ White, PermaFlo™, PermaFlo™ Purple, PermaFlo™ Pink, OpalDam™ et OpalDam™ Green et UltraCal™ XS.

LOK-TITE™	20 unités	100 unités	500 unités
Micro 20 ga	1168	1252	1437



SoftEZ™ Tip

- Les fibres de l'embout permettent une application contrôlée et visible
- Les fibres de la brosse facilitent l'application régulière

Recommandé pour : Enamelast™.

LOK-TITE™	50 unités
SoftEZ	4712



SST™ – Embout d'aspiration chirurgical

- Idéal pour les procédures chirurgicales délicates
- Ouverture de large diamètre

Recommandé pour : adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum pour les petites interventions parodontales ou endodontiques et aspiration contrôlée d'Opalescence™ Boost™.

LOK-TITE™	20 unités
SST	1248



Ultradent™ Mixing Tip

- Mélange et application en un seul temps

Recommandé pour : UltraTemp™, UltraTemp™ REZ II, EndoREZ™ et PermaFlo™ DC.

	20 unités
Ultradent Mixing	5920



White Mac™ Tip

- Application de grosses quantités
- Embout entièrement plastique
- Angle plus large pour une application intra-orale aisée

Recommandé pour : OraSeal™ Caulking, OraSeal™ Putty, Opalustre™ et les pâtes plus épaisses.

	20 unités	100 unités
White Mac	661	1361



White Mini™ Tip

- Application de grosses quantités
- Embout entièrement plastique
- Application aisée de produits de viscosité élevée

Recommandé pour : les matériaux de consistance plus épaisses.

	20 unités
White Mini	1247

AVERTISSEMENT :

- Utiliser l'embout endodontique recommandé • S'assurer que la butée en caoutchouc est en position
- Prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation d'embouts sans orifice latéral • S'assurer que l'embout n'est pas coincé dans le canal



Capillary Tips

Ne jamais utiliser ces embouts pour l'application des produits d'irrigation ni des produits endocanalaux.

- Vide les canaux et réduit considérablement l'utilisation de pointes de papier
- Extrémité fine et souple permettant l'accès aux canaux incurvés

À fixer sur l'adaptateur Ultradent™ Luer Vacuum pour l'aspiration dans les canaux endodontiques.

LOK-TITE™	Diamètre interne	20 unités	50 unités
Capillary	0,36 mm	341	3099
Capillary	0,48 mm	186	1425



Micro Capillary™ Tips

- Facilement identifiable par rapport aux tissus mous grâce à sa couleur claire
- Les plus petits embouts moulés au monde

Recommandé pour : les matériaux utilisés en parodontie et en endodontie ainsi que l'adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
Micro Capillary	5 mm	1120
Micro Capillary	10 mm	1121



EMBOUTS ENDODONTIQUES

Endodontie

AVERTISSEMENT :

- Utiliser l'embout endodontique recommandé
- S'assurer que la butée en caoutchouc est en position
- Prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation d'embouts sans orifice latéral
- S'assurer que l'embout n'est pas coincé dans le canal



Endo-Eze™ Irrigator Tip

- Assure une application idéale tout en expulsant les produits chimiques vers la paroi canalaire et en réduisant la pression directement vers l'apex
- Canule souple émoussée avec extrémité anti-obturation unique
- Non stérile

Recommandé pour : seringue Ultradent™ de 5 ml.

	Longueur de l'embout	20 unités
27 ga (0,40 mm) Endo-Eze Irrigator	25 mm	207




22 ga 20 ga 19 ga 18 ga

Endo-Eze™ Tips

- Parfait pour les procédures endodontiques
- Canules souples et solides
- Facilement coudable
- Longueur 19 mm

Recommandé pour : matériaux de scellement et irrigation/séchage.
À utiliser avec les seringues Ultradent.

	Embout pouvant être courbé	20 unités	100 unités
Endo-Eze 22 ga	0,70 mm	348	1431
Endo-Eze 20 ga	0,90 mm	347	1430
Endo-Eze 19 ga	1,06 mm	346	1429
Endo-Eze 18 ga	1,25 mm	345	1428

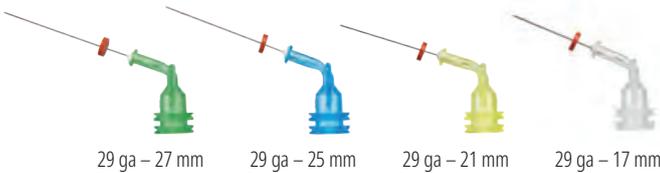

29 ga – 27 mm 29 ga – 25 mm 29 ga – 21 mm 29 ga – 17 mm

Embouts NaviTip™ 29 ga Tips

avec orifice latéral unique

- Conçus pour diriger l'écoulement du produit à travers l'orifice latéral avant son écoulement dans la région de l'apex, réduisant ainsi le risque d'expulsion du produit
- La canule souple en acier inoxydable facilite la navigation dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,33 mm

29 ga pour l'application de pâtes telles que MTAFlow™, MTAFlow™ White, EndoREZ™ et UltraCal™ XS.



REMARQUE : Le ciment à base d'hydroxyde de calcium UltraCal™ XS ne doit être utilisée qu'avec les embouts Single Sideport NaviTip 29 ga.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
NaviTip 29 ga	27 mm	4989
NaviTip 29 ga	25 mm	4990
NaviTip 29 ga	21 mm	4991
NaviTip 29 ga	17 mm	4992
NaviTips 29 ga – 29 ga	27 – 17 mm	5143



29 ga – 27 mm 29 ga – 25 mm 29 ga – 21 mm 29 ga – 17 mm

Embouts NaviTip™ 29 ga Tips


- Application contrôlée jusqu'à l'apex
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,33 mm

29 ga pour l'application de pâtes telles que MTAFlow™, MTAFlow™ White, File-Eze™, Ultradent EDTA 18% Solution et EndoREZ™.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 29 ga	27 mm	5115	1377
NaviTip 29 ga	25 mm	5114	1376
NaviTip 29 ga	21 mm	5113	1374
NaviTip 29 ga	17 mm	5112	1378
NaviTips 29 ga – 29 ga	27 – 17 mm	5116	1379

AVERTISSEMENT :

- Utiliser l'embout endodontique recommandé
- S'assurer que la butée en caoutchouc est en position
- Prendre des précautions supplémentaires lors de l'utilisation d'embouts sans orifice latéral
- S'assurer que l'embout n'est pas coincé dans le canal

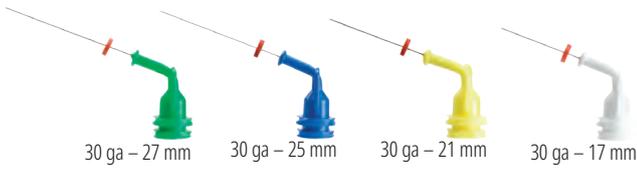

Embouts NaviTip™ 30 ga Tips

- Application contrôlée jusqu'à l'apex
- Canules souples en acier inoxydable pour naviguer facilement dans les canaux incurvés
- Embout pouvant être courbé 0,30 mm

30 ga pour l'application de solutions telles que File-Eze™ et Ultradent™ EDTA 18% Solution.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 30 ga	27 mm	1354	1424
NaviTip 30 ga	25 mm	1250	1423
NaviTip 30 ga	21 mm	1349	1422
NaviTip 30 ga	17 mm	1249	1421
NaviTips 30 ga - 30 ga	27 - 17 mm	1351	3319



Embouts NaviTip™ 31 ga Tips avec embout d'irrigation Sideport double

- Les deux orifices latéraux permettent l'application de liquides d'irrigation sans danger, en minimisant le risque d'expulsion de produits chimiques au-delà de l'apex
- L'une des plus petites canules au monde pénètre dans les espaces canaux les plus difficiles d'accès

Recommandé pour : Ultradent™ EDTA 18% Solution et Ultradent™ Citric Acid 20% Solution.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités	50 unités
NaviTip 31 ga	21 mm	5121	5122
NaviTip 31 ga	27 mm	5123	5124



Embouts NaviTip™ FX™ 30 ga Tips

- Brosse unique en son genre qui nettoie, fait pénétrer les produits et irrigue simultanément
- Canule rigide

Recommandé pour : Ultradent™ Citric Acid 20% Solution et Ultradent EDTA 18% Solution.

Classé comme un produit « EXCELLENT » par un important institut de recherche indépendant¹.

LOK-TITE™	Longueur de l'embout	20 unités
NaviTip FX 30 ga	17 mm	1452
NaviTip FX 30 ga	25 mm	1454

¹. Clinical Research Associates Newsletter. Volume 29, Issue 1, January 2005.

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les embouts, destinés à une utilisation en cabinet médical uniquement, permettent l'application de solutions dentaires et ne sont pas remboursés. Classe I, certifiés TÜV Nord, Ultradent Inc.



Seringues d'application Skini et Clear Skini

- Génère, sans forcer, une pression sur le piston dans la seringue pour une application apicale plus précise
- Peu de pertes

Recommandé pour : EndoREZ™, MTAFlow™ et PermaFlo™ DC.



	<i>20 unités</i>	<i>50 unités</i>
Seringue d'application Skini 0,5 ml	1680	1681
Seringue d'application Skini Clear 0,5 ml	1880	—

Seringue d'application pour agent hémostatique

- Le filetage Luer Lock permet une fixation sûre de l'embout
- Le plastique coloré est sensible à la lumière pour préserver les propriétés chimiques du produit

Recommandé pour : seringues IndiSpense™ de 30 ml de ViscoStat™, ViscoStat™ Clear, Astringent™ et Astringent™ X.



	<i>20 unités</i>
Seringue d'application pour agent hémostatique 1,2 ml	1278

Seringue d'application pour Ultra-Etch™

- Le filetage Luer Lock permet une fixation sûre de l'embout
- Identification facilitée par sa couleur bleue

Recommandé pour : seringues IndiSpense de 30 ml d'Ultra-Etch™.



	<i>20 unités</i>
Seringue d'application pour Ultra-Etch 1,2 ml	129

Seringue d'application de 1,2 ml

- Le filetage Luer Lock permet une fixation sûre de l'embout

Recommandé pour : toutes les seringues IndiSpense™ de 30 ml.



	<i>20 unités</i>	<i>100 unités</i>
Seringue d'application de 1,2 ml	124	157

Seringue d'application de 5 ml

- Ailette du cylindre de la seringue positionnée pour des conditions optimales de contrôle et de poussée

Recommandé pour : produits d'irrigation destinés aux interventions au cabinet ou supervisées par le praticien et solutions Ultradent™ Citric Acid et Ultradent™ EDTA 18%.



	<i>10 unités</i>
Seringue d'application de 5 ml	201

Couvre-seringues Ultradent™

- Protection facile et fiable
- Garantit l'asepsie de la seringue pendant le nettoyage

Recommandé pour : toutes les seringues de 1,2 ml



	<i>300 unités</i>
Couvre-seringues de 1,2 ml	249



Capuchon Luer Lock

- Capuchon Luer Lock à ailettes en polypropylène
- Pour boucher les seringues chargées au cabinet

Recommandé pour : toutes les seringues en plastique Ultradent™.



Capuchon Luer Lock

20 unités

205

Adaptateur d'aspiration Ultradent™ Luer Vacuum

- Séchage canalaire



Adaptateur d'aspiration Luer Vacuum

10 unités

230

Présentoir à seringues

- Pour 14 seringues
- En acrylique transparent



Présentoir à seringues

1 unité


382

DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Les seringues, destinées à une utilisation en cabinet médical uniquement permettent l'application de solutions dentaires et ne sont pas remboursées. Classe I, certifiées TUV Nord, Ultradent Inc.

Lettres d'information électroniques d'Ultradent



Abonnez-vous gratuitement aux lettres d'information électroniques d'Ultradent pour recevoir les actualités sur les produits, les événements et plus encore.

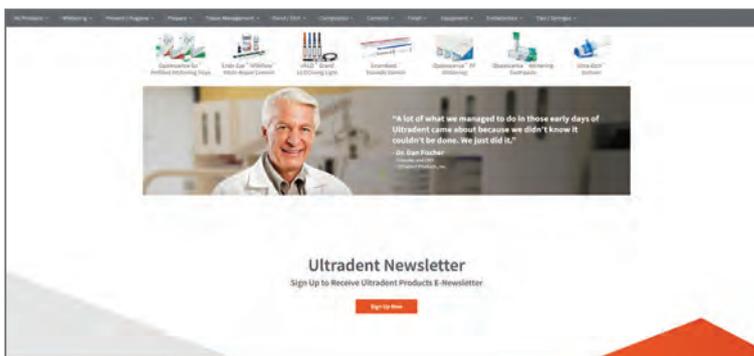

Scannez le code QR pour vous inscrire dès aujourd'hui !

- A**ccelerator 121
 Acide fluorhydrique 39, 57, 64
 Acide phosphorique . 33, 48, 57, 58, 62, 66, 84
 Adaptateur de PBM 112, 113, 115
 Adaptateur de PBM pour Gemini 113, 115
 Adaptateur d'aspiration 124
 Adaptateur d'aspiration Luer Vacuum 124
 Adhésif monocomposant 61
 Adhésif photopolymérisable 57, 60, 85
 Adhésifs émail 58-60
 Agents hémostatiques 50-52
 Agent siccatif 27, 30, 31, 87, 96, 98
 Agrégat de trioxyde minéral 117-118
 Anneaux de matrice 42-43
 Anneaux universels 40, 42
 Appui bilatéral 26
 Astringent Spot Remover 52
Bandes de finition 97
 Bandes diamantées 97
 Bandes diamantées Jiffy 97
 Barrière à base de résine 22
 Barrière à base de résine photopolymérisable 22, 65
 Base et fond de cavité 66
 Black Light Lens 103
 Black Micro FX Tip 134
 Black Micro Tip 134
 Black Mini Brush Tip . 33, 36, 59, 61, 64, 134
 Black Mini Tip 134
 Bloc d'alimentation pour VALO X 105
 Blue Micro Tip 135
 Blue Mini Dento-Infusor Tip 135
 Brossettes de polissage 96
 Brossettes de polissage pour composite Jiffy 96
 Brucelles 42
 Brucelles à action transversale 42
Cale-bouche 26
 Capillary Tips 137
 Capuchon Luer Lock 141
 Capuchons Luer Lock 119
 Chargeur de piles VALO X 105
 Chélatant 126
 Chlorure d'alumine 51
 Ciment au verre ionomère 84
 Ciment de scellement 78, 83
 Ciment endocanalair 117, 120-123, 126
 Ciments à base de résine 122, 126
 Ciment verre ionomère modifié par adjonction de résine 84
 Ciseaux 16, 116
 Ciseaux crantés 16, 116
 Ciseaux crantés Ultra-Trim 16, 116
 Citric Acid 127
 ClearTemp LC 80
 Coiffage pulpaire 66
 Coin 42
 Collage indirect 47, 59
 Composite 96
 Composite de restauration 70-73
 Composite fluide 72, 74
 Composite Mosaic 70-71
 Composite Wetting Resin 74
 Contrôle des fluides sulculaires 46
 Cordon assemblé VALO X 105
 Couvre-seringues 140
 Cupules de finition 24-25
 Cupules, disques et pointes de finition Jiffy 90-91
Dentifrice 34
 Dentifrice éclaircissant Opalescence 34
 Dentifrice Opalescence pour dents sensibles 34
 Dentifrice pour dents sensibles 34
 Dentifrices d'éclaircissement 34
 Dentine, Base et fond de cavité 66
 Dentin Sealant 33
 Dento-Infusor Tips 49, 135
 DermaDam 38, 124
 DermaDam synthétique 38, 124
 Diamond Polish Mint 96
 Digue en caoutchouc synthétique 38
 Dignes 38, 124
 Dignes en caoutchouc 38, 124
 Dispositif de protection interproximale 38
 Disques de finition 90-91, 92
 Disques de mise en forme et de finition 89
Écarte-joues 26, 37
 Écarte-joues Umbrella 26, 37
 Écarte-langue, -lèvres et -joues 26, 37
 Écarte-lèvres 26, 37
ÉCLAIRCISSEMENT 3-26
 Éclaircissement cosmétique 9-17
 Éclaircissement cosmétique à domicile . 10-15
 Éclaircissement dentaire cosmétique 9-15
 Éclaircissement dentaire médical 18-23
 Éclaircissement en cabinet 20-23
 Éclaircissement en salle d'attente 23
 Éclaircissement, gouttières préchargées 14-15
 Éclaircissement, gouttières sur mesure 23
 Éclaircissement médical 18-26
 Éclaircissement pour dents déulpées 19
 Éclaircissement « sur mesure » à domicile 10-12
 Écran protecteur 106-109
 Étuis à gouttière Opalescence 16
 Étuis à gouttières 16
Embout d'aspiration chirurgical 134
 Embouts brosettes 132-134
 Embouts d'irrigation Sideport double 127, 137
 Embouts endodontiques 135-137
EMBOUTS ET SERINGUES 133-141
 Embouts pour restauration 132-135
 Enamelast 32-33
ENDODONTIE 117-132
 Endo-Eze 126, 136
 Endo-Eze Irrigator Tip 138
 Endo-Eze MTAFlow 118
 Endo-Eze Tips 128, 138
 EndoREZ 120
 EndoREZ Accelerator 121
Fabrication d'une gouttière 12
 Facettes composites directes 75-76
 Fil de rétraction 53-55
 Fil de rétraction tricoté 53-55
 Fil de rétraction tricoté Ultrapak 53-55
 File-Eze EDTA 124
 Fils de rétraction 53-55
FINITION 87-98
 Fluorure de sodium 27, 32
 Forets 130-131
Gabarits 75-76
 Gabarits pour facettes composites 75-76
 Gel d'acide phosphorique 58
 Gel de mordantage à l'acide fluorhydrique 64
 Gel de mordantage Ultra-Etch 58
 Gel fluoré 26
 Gel hémostatique ViscoStat 50
 Gel hémostatique ViscoStat Clear 51
 Gels de désensibilisation 26
 Gels de mordantage 58-59
 Gemini™ 112
 Gouttières d'éclaircissement préchargées 14-15
 Gouttières sur mesure 10-12
 Gouttière UltraFit 14-15, 26
 Guide de référence NaviTip 123
 Guide de référence Opalescence 6-7
 Guide de référence pour l'éclaircissement dentaire 6-7
 Gutta-percha 120
 Gutta-percha enrobée 120
Hémostase 46-49
 HiShine 90-91
 Hypersensibilité radiculaire 33
 Hypersensibilité radiculaire transitoire 33
Inspiral Brush Tip 135
 Instruments d'ajustage et polissoirs pour céramiques 92-93
 Instruments d'ajustage et polissoirs pour composites 94
 Instruments d'insertion 56
 InterGuard 38
 Intraoral Tip 135
 Irrigator Tips 128, 138
 IsoBlock 26
Jiffy HiShine 90-91
 Jiffy One 88
 Jiffy Spin 89
 J-Temp 132
Kit extra-oral Jiffy 93, 95
 Kit intra-oral Jiffy 91, 93, 95
 Kits de matrices sectionnelles 40, 43
 KleerView 26
Lampe à LED 106
 Lampe à polymériser à LED VALO 109
 Lampe à polymériser à LED VALO Cordless 107
 Lampe à polymériser à LED VALO Grand 108, 110
 Lampe à polymériser LED à large spectre 100-109
 Lampe à polymériser VALO X 104-105
 Lampes à polymériser 100-109
 Lampes à polymériser à LED 100-109
 Laser à diode Gemini Evo 114-115
 Lasers à diode 110-113, 112-115
 Lasers à diode 810 + 980 . 110-113, 112-115
 Lasers Gemini & Gemini EVO 110
 LC Block-Out Resin 17
 Lentilles pour VALO et VALO Grand 103
 Lentilles, VALO et VALO Grand 103
 Lubrifiant de chélation et d'obturation 126
 Lubrifiant d'obturation 126
 Lubrifiant EDTA 126
 Lumière noire 29
 Lunettes 116
 Lunettes de protection 113, 115, 116

- Lunettes de protection pour Gemini . . . 113, 115
 Lunettes de protection UltraTect 116
Manchons protecteurs VALO 105–109
 Masquage du métal 72
 Matériau Caulking 39
 Matériau de restauration 70–73
 Matériau d'obturation 28–31
 Matériau pour fond de cavité 66
 Matériau Putty 39
MATÉRIEL 99–116
 Matrices 40–44
 Matrices à usage unique 44
 Metal Dento-Infusor Tip 49–52, 135
 Micro 20 ga Tip 136
 Micro Capillary Tips 128, 136, 137
 Mixing Tip 136
 Mordançage à l'acide 58, 64
MORDANÇAGE ET ADHÉSIFS 57–66
 Mosaic 70–71
 Mosaic en unidoses 71
 Mounting Bracket 106–109
 MTAFlow et MTAFlow White 118–119
 NaviTip 29 ga Tips 126
 NaviTip FX Tip 127, 137
Obturation/scellement 120
 Obturation/scellement canalair 120–122
 Omni-Matrix 44
 Omni-Matrix Sectional 43
 OpalCups 24–25
 OpalDam 22
 OpalDam Green 22
 Opalescence Boost 20–21
 Opalescence Endo 19
 Opalescence Go 14–15
 Opalescence PF 10–12
 Opalescence Quick 23
 Opalustre 24–25
 OraSeal 39
Packers insert-fils 56
 Packers insert-fils du Dr Fischer 56
 Packers insert-fils Ultrapak 56
 Packers insert-fils Ultrapak du Dr Fischer 56
 Pâte à l'acide chlorhydrique 24–25
 Pâte de micro-abrasion chimique 24–25
 Pâte de micro-abrasion mécanique 24–25
 Pâte d'hydroxyde de calcium 127
 Peak SE Primer 59
 Peak Universal Bond 60
 Peak-ZM 61
 PermaFlo 72
 PermaFlo DC 82–83
 PermaFlo Pink 74
 PermaFlo Purple 123
 PermaSeal 98
 PermaShade LC 81
 Peroxyde de carbamide 10, 23
 Peroxyde d'hydrogène 13, 14, 19, 20
 Peroxyde d'hydrogène ou de carbamide 7, 9
 Piles pour VALO X 105
 Piles rechargeables VALO 106–107
 Pince 42
 Pince pour la mise en place des anneaux 42
 Plaques 16
 Plaques pour le thermoformage de gouttières 16
 Plaques Sof-Tray standard 16
 Plaques standard 16
 PointCure Lens 103
 Pointes de finition 90–91
 Pointes de gutta-percha 122
 Pointes de gutta-percha enrobées de résine 122
 Pointes EndoREZ 122
 Polissage, céramique 93–94
 Polissage, Diamant 96
 Polissoirs à usage unique 88
 Polissoirs pour composites 92, 96
 Polycarboxylate 79
 Porcelain Etch 64
 PQ1 61
PRÉPARATION 35–44
 Présentoirs à seringues 141
 PrimaDry 31, 96
 Primer automordançant 59
 Primer pour métal 61
 Primer pour zircone/métal 61
 Primers, Métal 61
 Primers, Zircone 61
PROPHYLAXIE 27–34
 Protège-dent interproximal 38
 Protocole d'un traitement d'éclaircissement 5
 ProxiCure Ball Lens 103
Questions sur l'éclaircissement dentaire 4
Rééchantéification, composite 98
 Réparation de céramique étape par étape 65
 Résine de modelage 74
 Résine de scellement 82–83
 Résine de scellement Dual Cure 82–83
 Résine de scellement photopolymérisable 81
 Résine de scellement pour facettes 81
 Résine pour réservoir Block-Out 17
 Résine provisoire 130
 Résine provisoire photopolymérisable 130
 Résines de reconstitution 82–83
 Résines de scellement 61
RESTAURATION 67–76
 Révélateur de caries 36
Sable Seek et Seek 36
SCHELLEMENT 77–86
 Scellement des facettes 79
 Scellement provisoire des facettes 80
 Scellement provisoire (facette) 80
 Scellement provisoire sans eugénol 79
 Scie proximale 97
 Scie proximale Jiffy 97
 Sealant composite 98
 Sealant hydrophile pour puits et sillons 28–29
 Sealant hydrophobe pour puits et sillons 30–31
 Sealant pour puits et sillons 28–31
 Sealant pour sillons 28–31
 Seringue d'application pour agent hémostatique 138
 Seringues d'application 138
 Seringues d'application Skini 121
 Seringues de 1,2 ml en plastique 138
 Seringues de 5 ml en plastique 138
 Seringues Skini 138
 Seringues vides 138
 Sideport Irrigator Tips 127, 137
 Silane 64
 Single Sideport Tips 126, 136
 Skini Syringe 138
 SoftEZ Tip 136
 Solution à base de sulfate de fer et de subsulfate de fer 52
 Solution Citric Acid 20% 127
 Solution détachante 52
 Solution hémostatique Astringedent 52
 Solution hémostatique Astringedent X 52
 Solution hémostatique au sulfate ferrique 50, 52
 Solution Ultradent™ EDTA à 18 % 126
 Spot Remover 52
 SST Tip 136
 Support VALO Mounting Bracket 109
 Système de finition pour céramique 93–94
 Système de finition pour composite 96
 Système de gabarits pour composites directs 75–76
 Système de gabarits pour facettes 75–76
 Système de matrices 40–44
 Système de matrices sectionnelles 40–43
 Système de matrices sectionnelles HALO 40–42
 Système de mordançage total 57
 Système de polissage pour céramiques Universal 87, 93
 Système de polissage pour céramiques Universal Natural 93
 Système de polissage pour composites Natural 92
 Système de tenons et de forets 130–131
 Système de tenons et de forets UniCore 130–131
 Système d'adhésif photopolymérisable 60
 Système pour céramiques Jiffy Natural Universal 93
 Système pour céramiques Jiffy Universal 94–95
 Système pour composites Jiffy Natural 92
 Système pour composites Jiffy Original 90–91
Technique « double fil » 54
 Technique Walking Bleach 19
 Tenons 130
TISSUE MANAGEMENT 45–56
 Transcend 68
 TransLume Lens 103
Ultra-Blend plus 66
 UltraCal XS 127
 UltraCem 84
 UltraEZ 26
 UltraSeal XT hydro 28–29
 UltraSeal XT plus 30–31
 UltraTemp 79
 UltraTemp REZ II 79
 Unidoses, Composite 71
 Universal Composite 68–71
 Universal Dentin Sealant 33
 Uvener et Uvener Extra 75–76
VALO Bloc d'alimentation pour chargeur 108–109
 VALO Cordless Écran protecteur 107
 VALO Cordless Manchons protecteurs 107
 VALO Grand Chargeur de piles 106
 VALO Grand Cordless Manchons protecteurs 106
 VALO Grand Manchons protecteurs 108
 VALO Manchons protecteurs 105
 VALO™ Grand Cordless 106
 Vernis fluoré 32–33
White Mac™ Tip 137
 White Mini Tip 137

PHILOSOPHIE DE L'ENTREPRISE

Ultradent s'engage à fournir des produits qui augmentent la capacité des praticiens à administrer à leurs patients des soins professionnels à la pointe de la technique. Cela peut impliquer le développement de nouveaux produits ou le perfectionnement de produits et de techniques existants. Notre priorité absolue consiste à répondre à vos besoins avec des produits et un service de qualité. Vos suggestions, questions et remarques sont les bienvenues. La législation de certains pays peut limiter la disponibilité de certains produits ou exiger des informations et des instructions spéciales sur l'étiquetage pour une conformité avec les impératifs locaux. Pour de plus amples détails sur les procédures et les précautions d'utilisation, se référer aux instructions ou à l'emballage spécifique(s) au produit. Chez Ultradent, nous nous impliquons dans la sauvegarde de notre environnement. Toutefois, le transport de produits chimiques nécessite souvent des emballages plastiques secondaires. Aucun de nos produits ne contient de latex, exception faite de la digue en caoutchouc au latex DermaDam. Ultradent est certifiée ISO 13505, ce qui signifie que nous avons mis au point et mis en œuvre un système qualité complet. La société a également été audité et certifiée par un organisme européen indépendant reconnu par la CAN/CSA. Le cas échéant, les produits Ultradent vendus en Europe portent la marque CE, indiquant qu'ils sont conformes aux lois (directives) strictes de la communauté européenne.

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

La durée de vie d'un produit dépend de sa date de fabrication. Voir sur l'emballage du produit les informations complémentaires et les instructions de stockage.

GARANTIES

Se reporter au mode d'emploi pour connaître les informations sur la garantie éventuelle.

CONDITIONNEMENT

Chez Ultradent, nous nous impliquons dans la sauvegarde de notre environnement. C'est pourquoi nous essayons d'utiliser le moins de plastique possible dans nos emballages. Toutefois, pour votre sécurité et la protection appropriée de nos produits chimiques, il est parfois impératif d'utiliser des emballages plastiques secondaires.

ULTRADENT PRODUCTS SUR INTERNET

Consultez les dernières informations et l'actualité d'Ultradent Products sur internet. Vous trouverez sur le site WWW.ULTRADENT.FR des informations d'ordre général sur Ultradent Products, l'historique et la philosophie de la société, des renseignements sur les produits ou des liens pour télécharger le catalogue des produits d'Ultradent Products, les fiches de sécurité ou les modes d'emploi. Vous trouverez dans la rubrique Distributeurs les coordonnées complètes du distributeur le plus proche de chez vous.

DROIT D'AUTEUR

Copie de textes et d'illustrations, même en extraits, uniquement avec l'accord écrit préalable de la société Ultradent Products GmbH, Allemagne. Janvier 2024.

RÉCOMPENSES



ÉTIQUETAGE DES PRODUITS



BKP85 = numéro de lot
2023-03 = Mois, Mars
2023-03 = Année, 2023



BL2DC = numéro de lot
02-24 = Mois, Février
02-24 = Année, 2024

Toutes les seringues UPI sont marquées d'une date limite d'utilisation consistant en une lettre et 3 chiffres. La lettre correspond à une référence de lot utilisée à des fins de production, et les 3 chiffres correspondent à la date limite d'utilisation. Les 2 premiers chiffres indiquent le mois et le troisième est le dernier chiffre de l'année.



Ultradent Products, Inc., VOUS DIT MERCI

Cette année, nous avons l'honneur de célébrer le 45^e anniversaire d'Ultradent, un jalon significatif sur notre parcours. Lorsque nous réfléchissons à ce dernier, nous nous sentons emplis de fierté et de gratitude. Nous avons eu la chance, au fil des ans, de bâtir une communauté très unie – une famille composée par les salariés, les clients et les partenaires qui ont joué un rôle essentiel dans notre histoire. Ensemble nous avons constitué un héritage qui va au-delà des produits que nous créons. Cet héritage repose en effet sur la confiance, l'intégrité et un engagement sans faille pour atteindre notre objectif qui est l'amélioration de la santé bucco-dentaire à travers le monde.

Nos débuts ont certes été modestes, mais nous nous sommes développés, au fil des ans, jusqu'à devenir un acteur mondial important dans notre secteur.

Ce parcours remarquable, initié et inspiré tout au long de ces années par le fondateur d'Ultradent, le Dr Dan Fischer, est caractérisé par l'innovation. Dans les pages de cette nouvelle édition de notre Manuel des procédures cliniques, vous trouverez beaucoup des innovations que vous connaissez bien, ainsi que plusieurs innovations récentes. Parmi celles-ci figurent, par exemple, notre nouveau composite universel Transcend™ qui présente une correspondance des teintes sans précédents avec une seule teinte Universal Body, ou encore la lampe VALO™ X, dernière-née de la famille de lampes à polymériser VALO™.

Notre parcours jusqu'à ces 45 ans n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos estimés clients tels que vous. Votre loyauté est la pierre angulaire de notre réussite et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

Tournés vers l'avenir, notre engagement à respecter nos valeurs fondamentales reste plus essentiel que jamais. Nous continuerons à nous consacrer à la fourniture de produits de la plus haute qualité qui soit, tout en maintenant notre tradition de retour vers les communautés que nous servons.

Notre parcours est loin d'être terminé et nous sommes impatients de continuer à avancer avec votre soutien renouvelé.

Ensemble, nous poursuivrons notre mission qui est d'innover et de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire à travers le monde.



Restaurations avec **UNE SEULE TEINTE**

Le composite universel Transcend permet une correspondance des teintes sans précédent avec une seule teinte Universal Body, grâce à sa technologie brevetée **Resin Particle Match™** qui élimine la nécessité d'une teinte bloquante ou d'un opaquer.



Ultradent France

5, chemin du Jubin — Bât. A 69570 DARDILLY — FRANCE
N° vert 0 800 00 81 50 — france@ultradent.com
www.ultradent.fr

